





ZITZI GUPPY

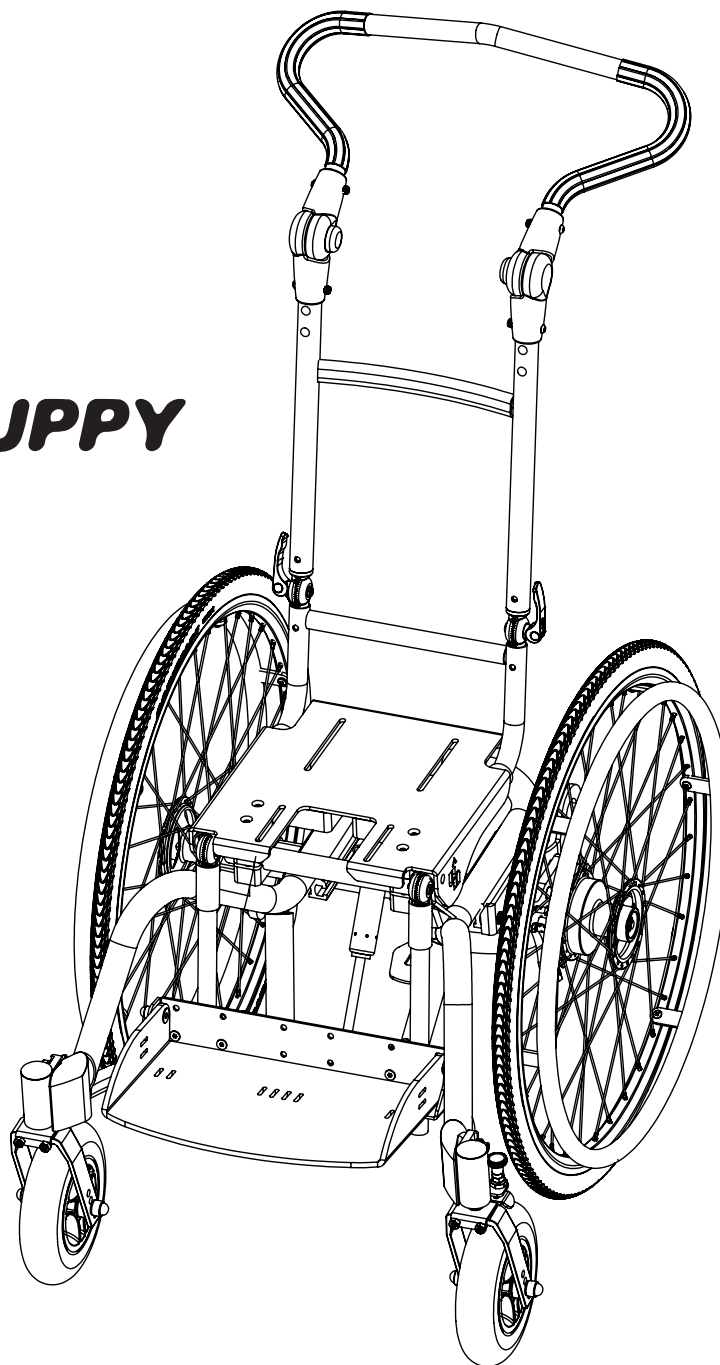

Bruksanvisning

Zitzi Guppy

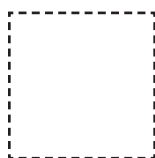

Obs!

Kryssa i rutan ovan vid eventuell specialanpassning av produkten.

CE-märkningen *upphör* att gälla vid specialanpassad produkt.



Produkten är endast avsedd att användas som ett *underrede* tillsammans med *sittsystem* producerade av Anatomic SITT AB. Om önskemål om *användning* finns, vänligen kontakta Anatomic SITT AB.

Säkerhetsföreskrifter

Inledning

För att ni ska kunna utnyttja Zitzi Guppy till fullo är det viktigt att ni läser igenom denna bruksanvisning ordentligt. Detta gäller alla personer som finns i brukarens närhet. Anpassning/inprovning av Zitzi Guppy ska alltid utföras av medicinskt behörig person. Om ni behöver kompletterande uppgifter är ni välkomna att kontakta Anatomic SITT AB.

Användningsområde

Produkten är avsedd att användas som ett underrede tillsammans med sittsystem producerade av Anatomic SITT AB. Om önskemål om annan användning finns, vänligen kontakta Anatomic SITT AB.

Korrespondens

Zitzi Guppy med dess tillbehör är en CE-märkt produkt. Ett unikt serienummer är placerat på en etikett som sitter på underredets rörarm. Detta serienummer skall anges vid all korrespondens gällande produkten.

Krocktestad & godkänd

Zitzi Guppy är krocktestad och godkänd enligt 7176-19 för 70 kg i bil.



OBSERVERA

Hjälpmedlets förskrivare eller person med motsvarande kompetens och kännedom om brukaren och hjälpmedlet ska alltid utföra en riskanalys innan användning. Om denna analys visar att det kan finnas risk för allvarlig personskada får brukaren aldrig lämnas utan tillsyn när hjälpmedlet används.

Produkten är tillverkad av Anatomic SITT AB

Postadress Anatomic SITT AB, Box 6137, 600 06 Norrköping

Besöksadress Anatomic SITT AB, Terminalgatan 1, 603 61 Norrköping

Telefon 011-161800

Fax 011-162005

E-post info@anatomicsitt.com

Web anatomicsitt.com

Instruktionsfilmer youtube.com/anatomicsitt

Följ oss på facebook.com/anatomicsitt

Innehållsförteckning

Säkerhetsföreskrifter	3	Broms.....	17
Inledning	3	Användning av trumbroms	17
Sittdel	6	Låsning av hjul.....	17
Montering av fästplatta	6	Frigöring hjul.....	17
Tilt.....	7	Felsökning av trumbroms	17
Sitstiltning.....	7	Montering av trumbroms	19
Armstöd från ryggrör.....	9	Parkeringsbroms	20
Höjdjustering	9	Montering av parkeringsbroms	20
Breddjustering	9	Att använda parkeringsbroms	20
Vinkeljustering uppåt/nedåt	9	Fotstöd	21
Körbåge.....	11	Montering av fotstöd.....	21
Montering av körbåge.....	11	Säkerhetsstopp	21
Höjdjustering av körbåge.....	11	Justering av vinkel vid knäleden.....	21
Djupjustering av körbåge.....	11	Justering av fotstöds höjd.....	21
Vinkeljustering av körbåge.....	11	Fotstödsbeslag	22
Vinkeljustering av körbågshandtag.....	11	Fasta fotstödsbeslag	22
Fällning av körbåge.....	11	Fjädrande fotstödsadapter	22
Hjul	12	Uppfällbart fotstödsbeslag.....	22
Montering av drivhjul m quick-release	12	Kulledsadapter	22
Demontering av drivhjul m quick-release.....	12	Vadstöd	24
Drivhjul	13	Montering av vadstöd	24
Drivhjulsplacering	13	Höjdjustering av vadstöd	24
Länkhjul.....	14	Breddjustering av vadstöd	24
Montering av länkhjul på rullstolsram	14	Tippskydd	25
Montering av länkhjul på länkhjulsgaffel ..	14	Montering av tippskydd.....	25
Länkhjulsplaceringar.....	14	Att använda tippskydd.....	25
Injustering av länkhjulsgaffel	15	Tramprör	26
Vinkeljustering av länkhjulsgaffel	15	Montering av tramprör	26
		Att använda tramprör	26

Transportfästen	27	Rekonditionering	35
Montering av främre transportfästen	27	Inledning	35
Montering av bakre transportfästen	27	Rengöring	35
Montering av säkerhetsbygel	27	Efterbehandling	35
Att använda transportfästen	27	Märkning	35
Färdriktningsspärr	28	Hjul	35
Montering av färdriktningsspärr	28	Lack	35
Aktivering av färdriktningsspärr	28	Stabilitet	36
Frigöring av färdriktningsspärr	28	Rörstomme och detaljer	36
Stänkskärm.....	30	Framgafflar.....	36
Montering av stänkskärm.....	30	Körbåge och körhandtag	36
Justering av stänkskärm.....	30	Bromsar	36
E-drive	31	Ihopfällningsmekanism och tilt.....	36
Transport i bil.....	32	Funktionskontroll	36
Anvisningar för transport i bil.....	32	Anpassning och specialanpassning	37
Krocktestad och godkänd	32	Rekommendationer	37
Underhåll och skötselanvisningar	33	Tillåtna anpassningar	37
Serviceintervall	33	Riskanalys	37
Rengöring och tvätt.....	33	Märkning.....	37
Gaskolv	33	Försäljningsvillkor.....	38
Garanti.....	34	Garanti	38
Kombinationer	34	Reklamation	38
Reservdelar	34	Returer.....	38
Märkning.....	34	Tekniska data	39
Återvinning.....	34		

Sittdel


Montering av fästplatta

Sittsystemets fästplatta monteras enkelt på underredet genom fyra (4) skruvar, brickor och muttrar i markerade spår (A) på underredets sittplatta.

Placera sittsystemets fästplatta (B) på underredets sittplatta (C) och stick igenom medföljande skruv (D). Möt sedan upp med bricka och mutter (F) på undersidan av underredets sittplatta. Dra åt skruvarna (D) ordenligt.



Tips! Bilden visar endast en typ av fästplattas monteringsanvisning. För ytterligare information kring fästplattor, se respektive bruksanvisning för valt sittsystem.

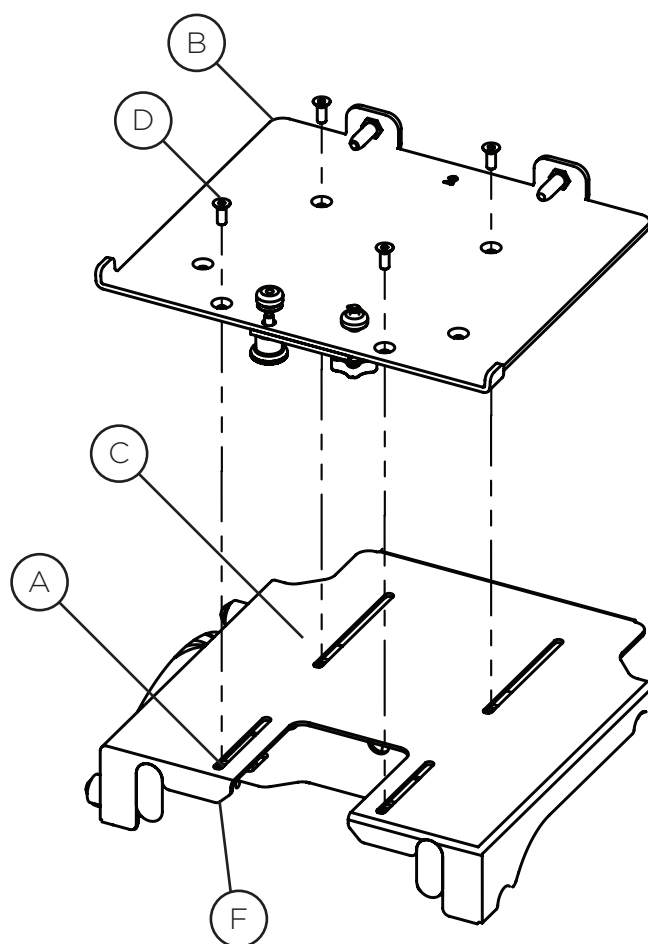

Tilt

Sitstiltning



Guppy har två olika lägen för tilt vilket ställs in med hjälp av hål under sittplattan. Om kolven fästs in i hålet längst bak (som på bild nedan) erhålls tilt på 0-32°. Om kolven fästs in i hålet framför erhålls en tilt på -7-25°. För att tilta underredet trycker du in reglaget (A) samtidigt som du håller i körbågen med ena handen och trycker nedåt/framåt. Släpp sedan reglaget (A) när du uppnått önskad tilt. För att återställa sitsvinkeln till ursprungsläge, tryck in reglaget (A) och dra körbågen uppåt och bakåt genom att hålla i körbågens/körhandtagens handtag.



OBS! Var uppmärksam på eventuell klämrisk vid tiltning av sitsen.



OBS! Var uppmärksam på eventuell ökad tipprisk vid tiltning.

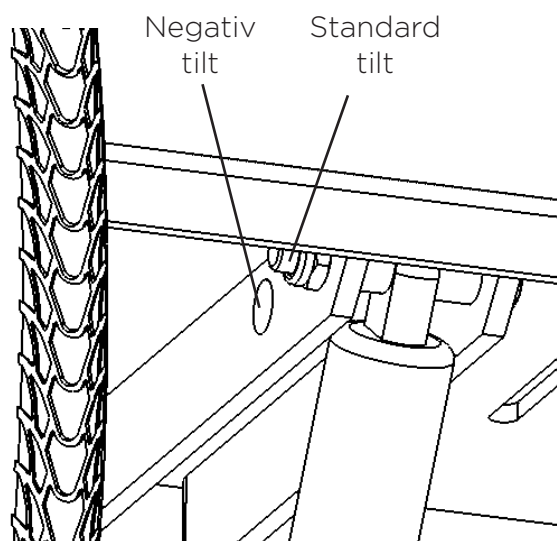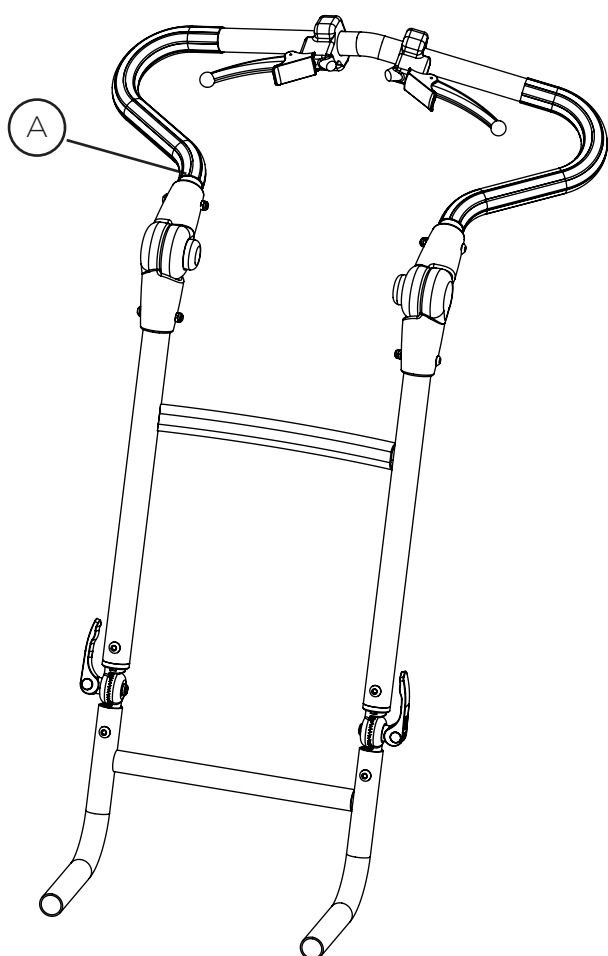

Armstöd från ryggrör

Montering på underrede

Skruva ut skruvarna (A) helt på båda sidor. Montera klämfästet runt körbågen. Sätt tillbaka skruvarna (A) och dra åt.

Höjdjustering

Lossa skruvarna (A) lite och justera till önskad höjd. Dra åt skruvarna.

Breddjustering

Lossa skruvarna (B) lite och justera till önskad bredd. Dra åt skruvarna.



Vinkeljustering uppåt/nedåt

För vinkeljustering av armstödsplattan, lossa vred (C) lite och justera till önskad vinkel.

För att kompensera vid vinkel på körbågen kan man också ställa vinkeln i fästet. Lossa den bakre av skruvarna (A) helt och justera vinkeln med hjälp av de 3 hålen i fästet.

Djupjustering av armstödsplatta

Lossa skruvarna (D) under armstödsplattan och flytta till önskat djup med hjälp av hålen under plattan.

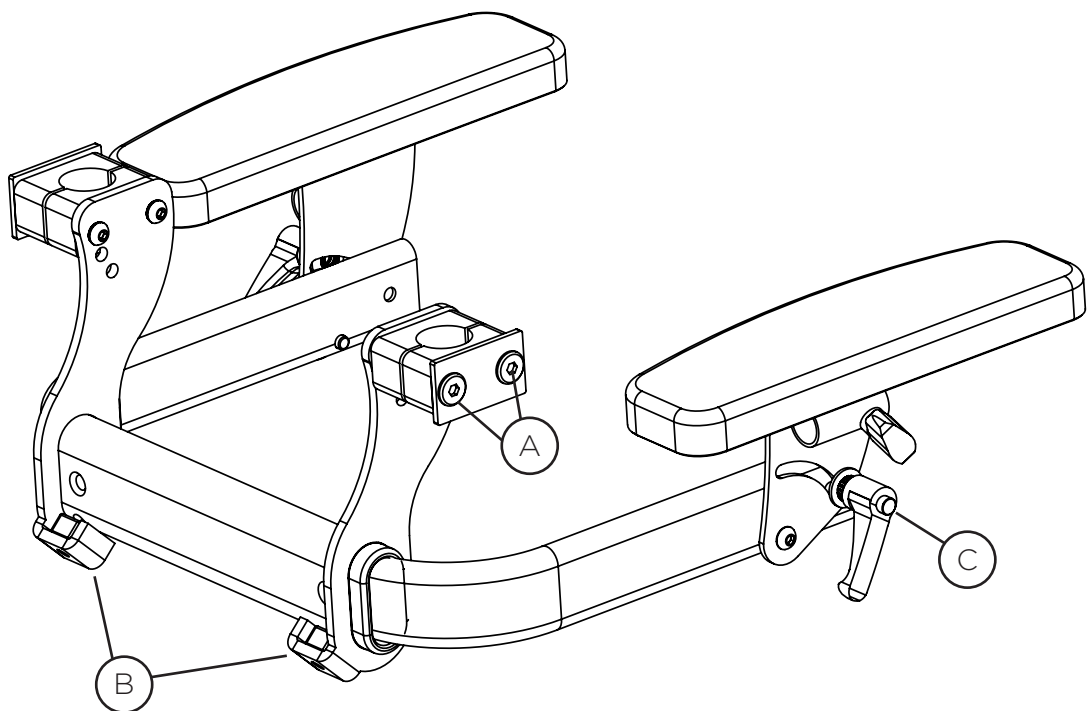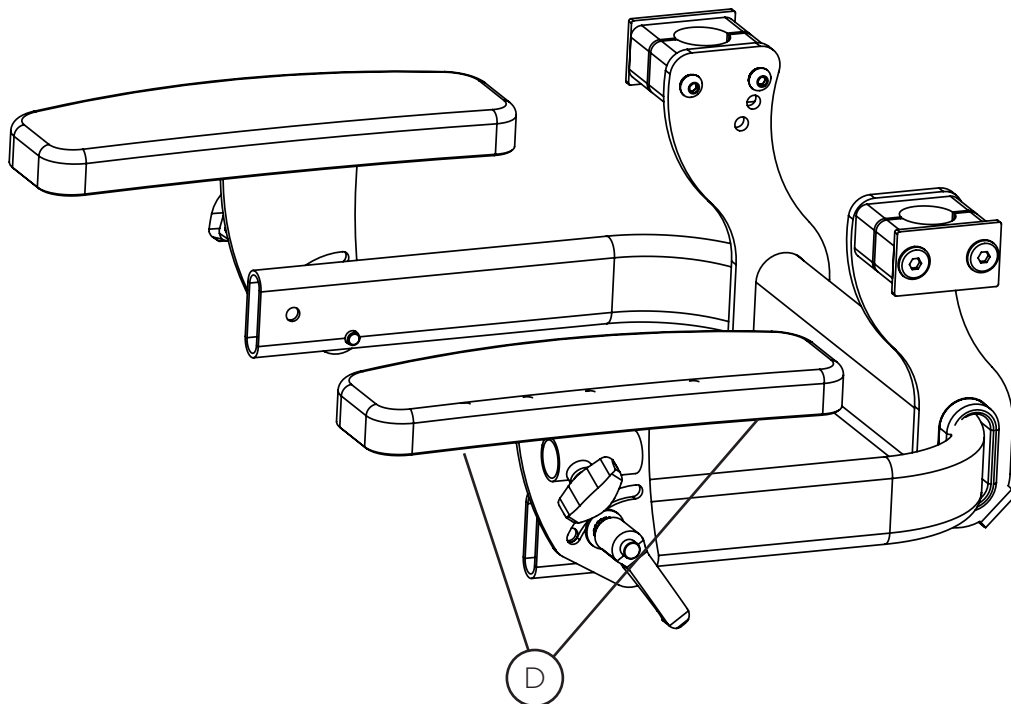

Körbåge

Montering av körbåge

För in körbågsinfästningen (A) i avsedda hål under sittdelsplattans bakre del på underredet och dra sedan åt skruvarna (B). Det finns fyra fasta lägen att välja på.

Djupjustering av körbåge

För att djupjustera körbågen (förlänga sittdjupet) lossar du skruvarna (B), under sittplattans bakre del och flyttar sedan körbågen till önskat djup. Dra sedan åt skruvarna (B).



Notera! Skruven ska passa in i ett av de fyra fasta lägen som finns på körbågen.

Vinkeljustering av körbåge

Körbågen kan vinkeljusteras efter typ av sittsystem. Frigör låsningen av körbågen genom att lossa båda spakarna (C) och justera sedan till önskad vinkel. Dra sedan åt spakarna (C).



OBS! Körbågen ska alltid ligga an mot sittsystemets rygg vid transport i fordon.

Vinkeljustering av körbågshandtag


För att vinkeljustera körbågens körhandtag trycker du in knapparna (D) på insidan av körbågslederna och justerar sedan till önskad vinkel.

Fällning av körbåge

Lossa båda spakarna (C) och fäll körbågen framåt. Dra sedan åt spakarna (C) igen.



OBS! Häng ej väskor eller tunga föremål på körbågen. Detta tillsammans med andra faktorer kan föranleda att underredet kan tippa bakåt.

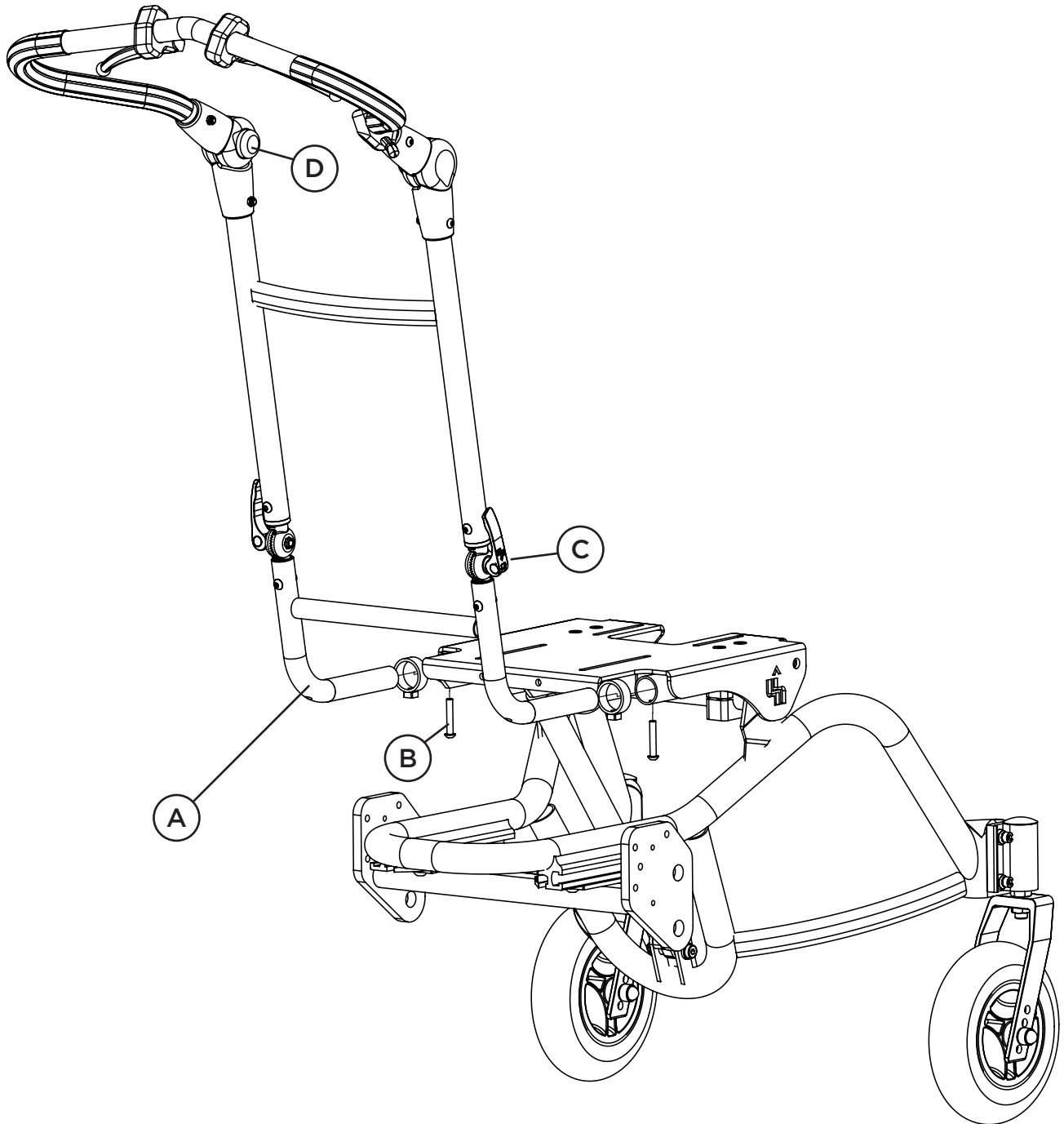

Hjul

Montering av drivhjul med quick-release

Drivhjulen kan enkelt monteras på och av genom dess quick-releasefunktion. Detta kan vara användbart vid exempelvis transport av underredet.


För att montera drivhjulen (A) håller du in tryckknappen (B) som är centrerad i navet på quick-release axeln och skjuter in drivhjulet (A) till det tar stopp. Nu kan du släppa tryckknappen (B). Säkerställ att drivhjulet hamnat i låst läge genom att dra försiktigt i drivhjulet utan att hålla in tryckknappen (B).



OBS! Säkerställ att hjulen är i låst läge efter användning av quick-releasefunktionen.

Demontering av drivhjul med quick-release

För att montera av drivhjulen från underredet håller du in tryckknappen (B) som är centrerad i navet och drar sedan ut hjulet.

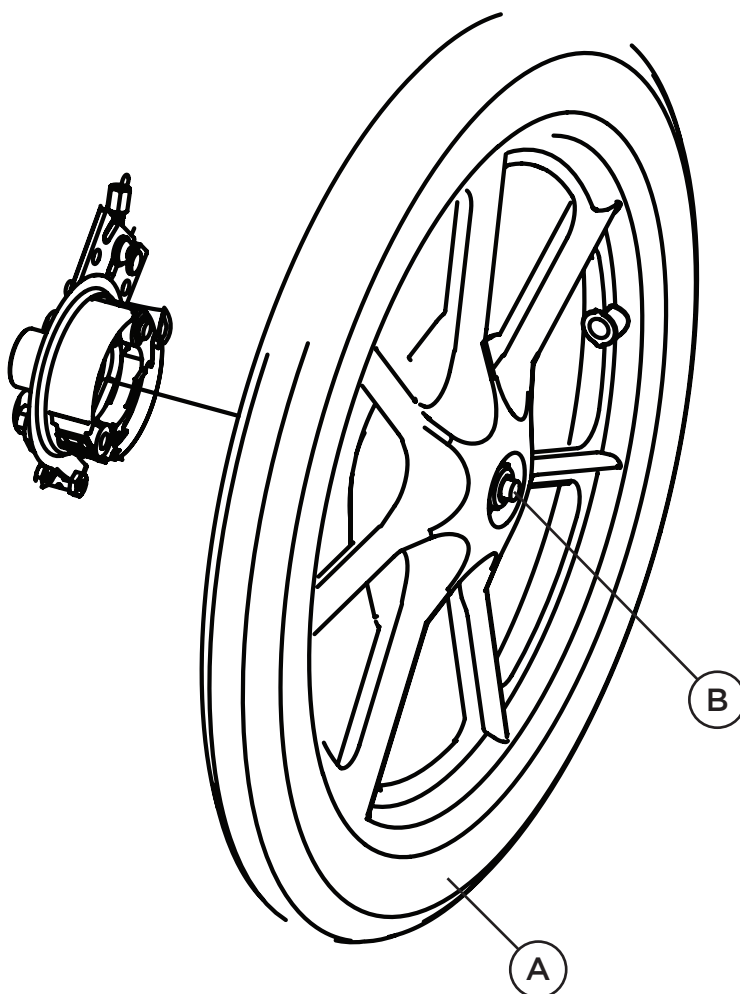

Drivhjul

Drivhjulsplacering

För att erhålla korrekt tyngdpunkt kan drivhjulet justeras steglöst i djupled beroende på sittsystemets placering på underredets sittplatta.

För att justera hjulet i djupled så släpper du på fyra stycken skruvar (A) på undersidan av hjulaxeln och justera till önskat djup. Kontrollera med tex. linjal eller tumstock att hjulaxeln sitter på samma djup på båda sidor.

16" hjul monteras i hål B + C.


20", 22" och 24" monteras i hål D + E.



OBS! Tänk på att förändring av drivhjulsplacering kan öka tipprisken.



OBS! Skruvarna ska inte skruvas ut helt utan bara släppas lite på.

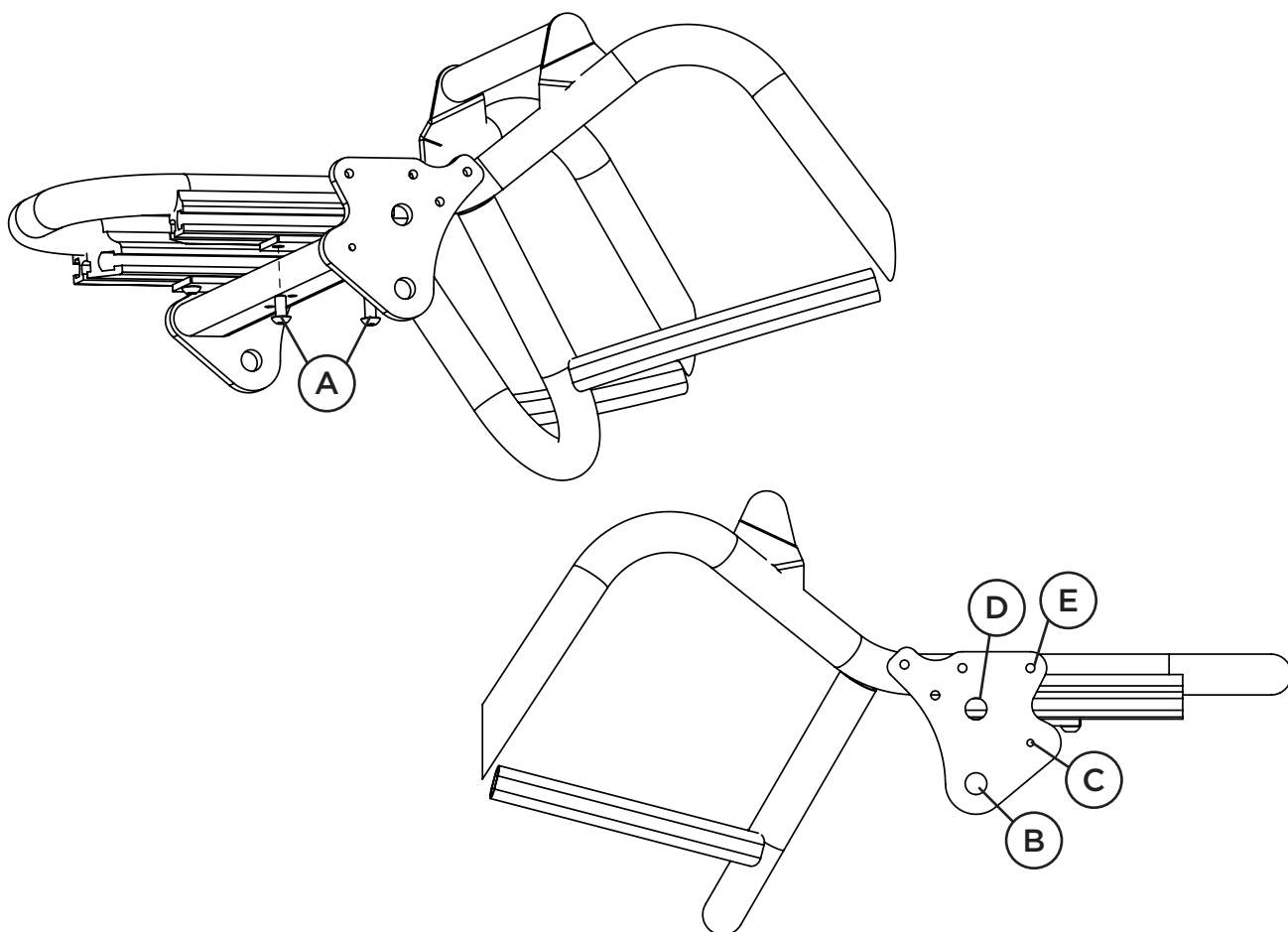

Länkhjul

Montering av länkhjul på rullstolsram

För in sargsprinten (A) i avsett hål på undersidan av rullstolsramen i länkhjulskutsen enligt bild. Montera sedan länkhjulet med hjälp av skruv (B), bricka (C) och excentermutter (D) och dra åt.

Montering av länkhjul på länkhjulsgaffel

Välj mellan fem (5) olika länkhjulsplaceringar och montera sedan länkhjulet (F) med hjälp av medföljande hjulaxel (G), bricka (H) och låsmutter (I) i önskat infästningshål på länkhjulsgaffeln (K).

För upp länkhjulet (F) i länkhjulsgaffeln (K) enligt bildbeskrivning. Sätt en bricka på hjulaxeln (G) och stick sedan igenom den i önskat hål på länkhjulsgaffeln.

Möt sedan upp på motsatt sida med bricka (H) och låsmutter (I). Dra åt muttern. Avsluta sedan med att sätta dit mutterkåporna (J) över låsmuttern.


Länkhjulsplaceringar

Länkhjulet kan placeras i fem (5) olika höjdpositioner.

Detta gör att du kan justera länkhjulets höjd efter val av drivhjulsplacering.



OBS! Tänk på att dra åt skruvarna ordentligt efter justering av länkhjulsplacering.

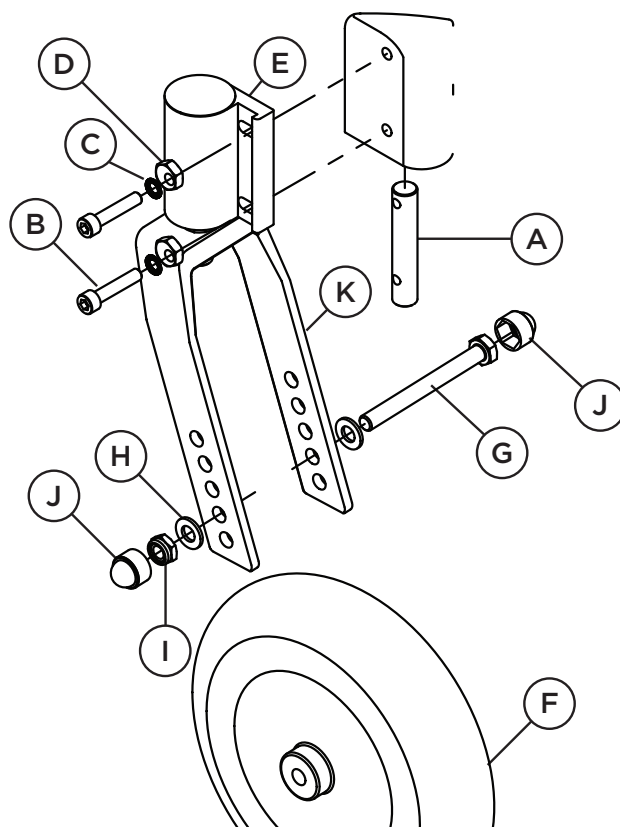

Injustering av länkhjulsgaffel

Om rullstolen inte rullar som den ska kan du behöva justera länkhjulsgaffeln (A). Detta kan uppstå om man justerat länkhjulsposition utan att justerat in länkhjulsgaffeln (A).

Det streckade området på bilden visar att länkhjulsinfästningsens (B) position ska vara 90° i förhållande till markytan.


Vinkeljustering av länkhjulsgaffel

För att vinkeljustera länkhjulsgaffeln lossar du och roterar de excentriska muttrarna (C) på länkhjulsinfästningen (B) tills korrekt vinkel erhålls.

Var noga med ett dra åt muttrarna när injustering av länkhjulsgaffeln är uppnådd.



OBS! Tänk på att dra åt muttrarna ordentligt efter injustering av länkhjulsgaffeln.

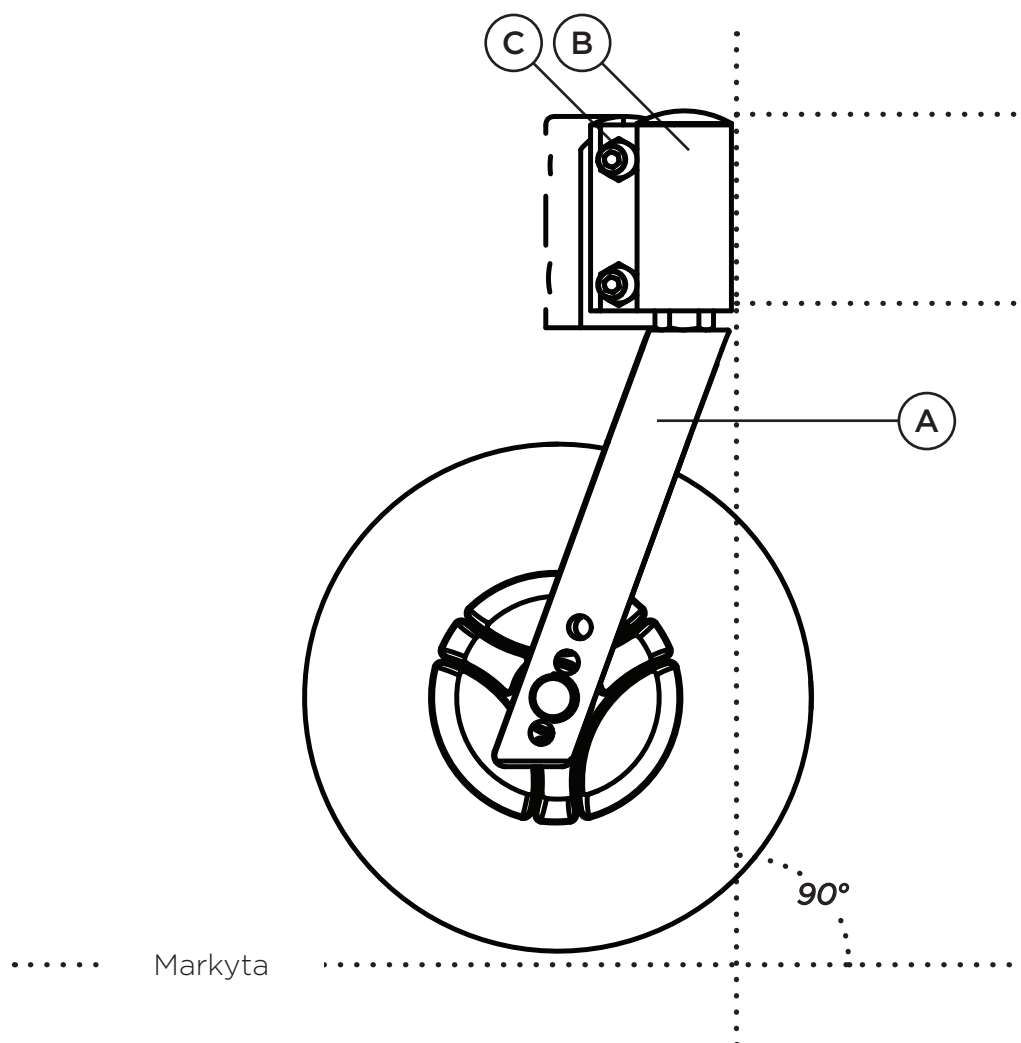

Broms

Användning av trumbroms

Underredet är utrustat med trumbroms som manövreras av vårdaren.
Kontrollera alltid att bromsarna fungerar innan användning.

Tryck in höger bromshandtag (A) samtidigt som du för underredet framåt.
Bakhjulet ska då bromsa och ej rulla. Bromshandtaget (A) ska ej gå att pressa ända in mot körhandtaget, utan det ska vara ett glapp på 5-10 mm mellanrum.

Upprepa sedan ovanstående procedur fast med vänster bromshandtag.

Låsning av hjul

För att aktivera låsning av hjul trycker du in bromshandtaget (A) och skjuter fram den röda låsspaken (B) till önskat läge.



Frigöring hjul

För att frigöra låsning av hjul trycker du in bromshandtaget (A) och den röda låsspaken (B) släpps automatiskt. Släpp sedan bromshandtaget (A).

Felsökning av trumbroms

Om bromsarna inte fungerar ska du först kontrollera att bromsvajern har korrekt spänning. Om vajern har en låg spänning, kan det räcka med att spänna den igen genom att skruva upp skruv (C). Om justering av skruv (C) inte räcker kan du prova nedanstående snabbguide för ompänning av bromsvajer.

- 1) Skruva in skruv (C) i bottenläge
- 2) Lossa mutter (D)
- 3) Pressa ihop bromsen genom att lyfta trumbromsarmen (E) och flytta mutter (D) något längre upp på vajern
- 4) Lås mutter (D) och finjustera sedan spänningen med skruv (C)

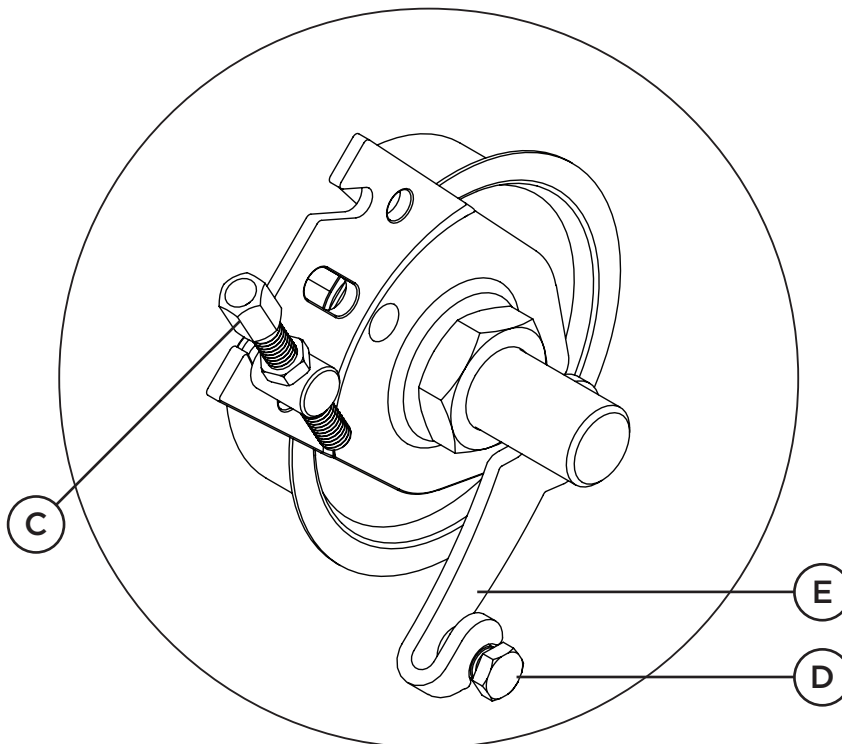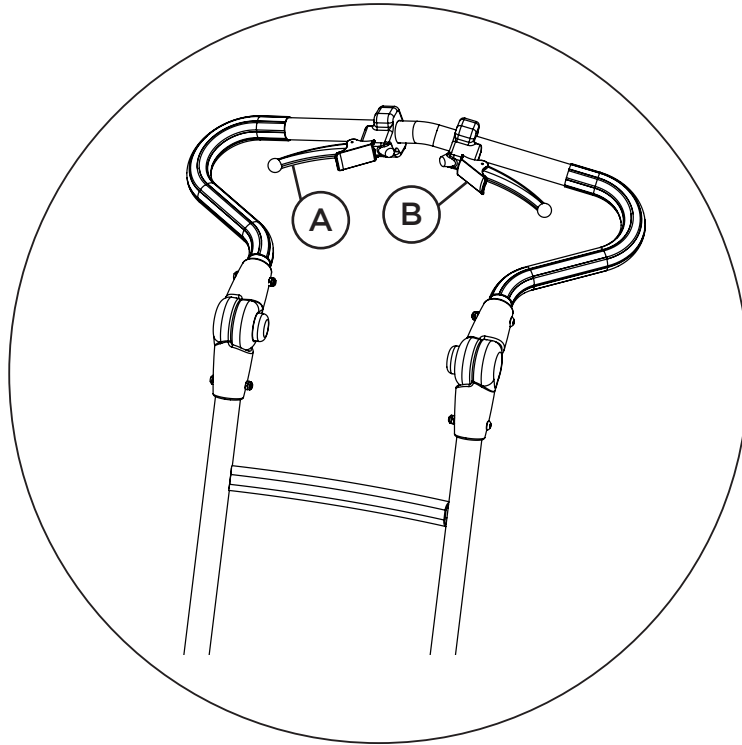

Detaljvy trumbroms

Broms

Montering av trumbroms

För att montera trumbromsen behöver du ta loss drivhjulet från rullstolen genom att trycka in knappen på quick-releaseaxeln och dra hjul och axel ut från trumbromsen.

Montera sedan trumbromsen på rullstolsramen genom att trä den stora distansen (A) över trumbromsens gänga och stick sedan in gängen genom avsett hål i den position du önskar. Fäst med den stora muttern (B) på insidan av ramens sidoplåt och dra åt något. Det är viktigt att du inte drar åt fullt ut.

Ta sedan skruven (C) och stick den genom det avlånga hålet för rotationsspärr i bromstrumman, in genom den lilla distansen (D) och genom hål i ramsidan.

Fäst med bricka (E) och mutter (F) på insidan av ramens sidoplåt. Dra åt båda muttrarna (B) och (F) så att bromstrumman sitter fast ordentligt.

Stick sedan tillbaka quick-releaseaxeln med hjulet och tryck in tills hjulet fäster. Testa genom att dra hjulet lätt utåt (utan att trycka på quick-releaseknappen).



Notera! Vid val av 16" drivhjul så gängas skruven (C) direkt i plåten.




OBS! Mutter (B) (och skruv C vid val av 16") ska fästas med gänglåsning tex. Loctite 243 eller motsvarande.



Notera! För ytterligare information kring hur du använder quick-release, se sida 14-15.



Notera! Monteringsprincipen av trumbroms är den samma oavsett hjulstorlek.

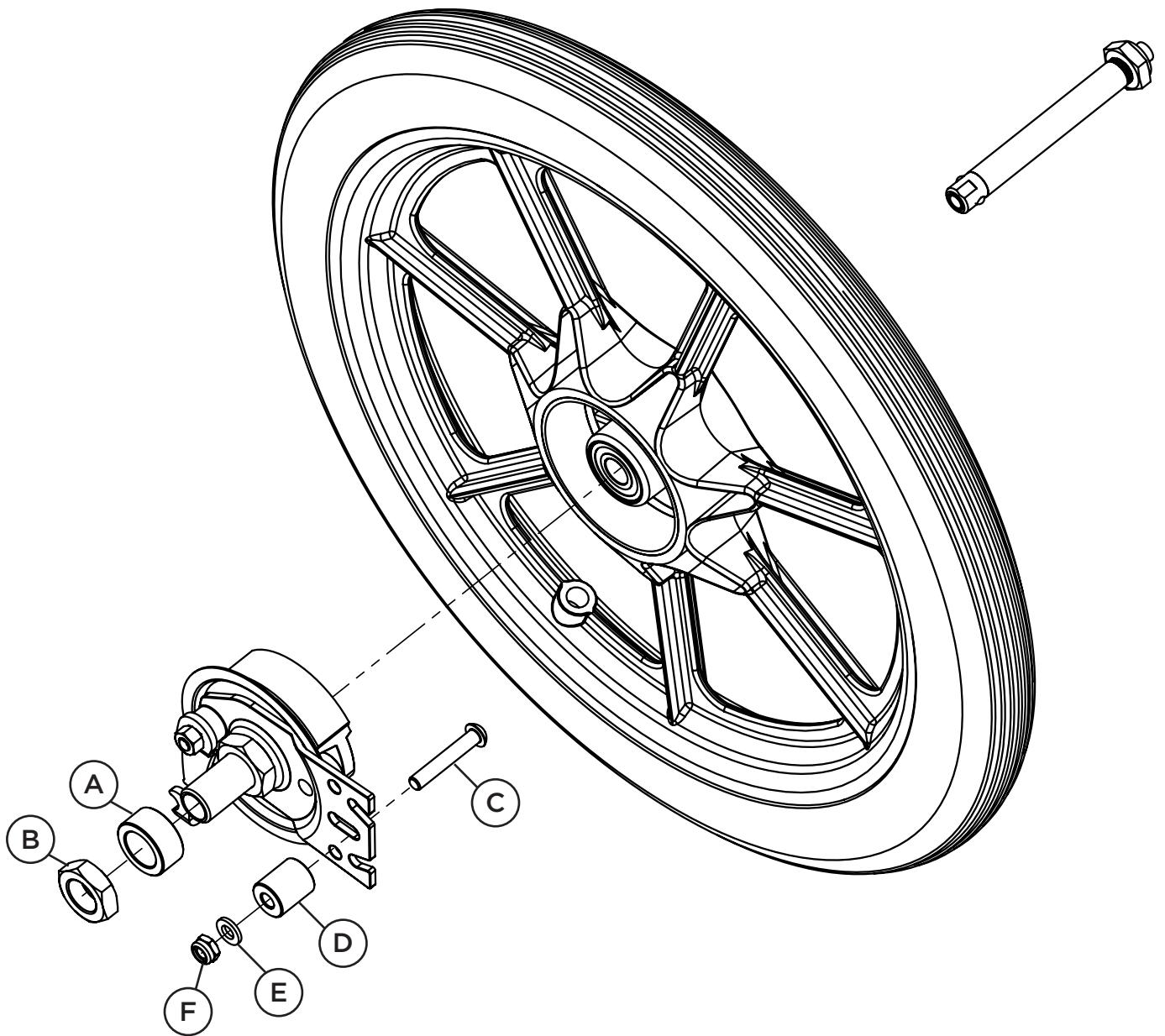

Parkeringsbroms

Montering av parkeringsbroms

Parkeringsbromsfästet monteras enligt bild i avsedd hålbild på rullstolsramens sidostycke med medföljande skruvar (A), brickor (B) och muttrar (C).


Justera in parkeringsbromsen (D) vid behov genom att lossa skruvarna (E) och flytta sedan parkeringsbromsen (D) framåt eller bakåt i spåret.

Dra sedan åt skruvarna (E) när önskad position är uppnådd.

Att använda parkeringsbroms

Lås parkeringsbromsen (D) genom att trycka parkeringsbromsarmen framåt.

Dra parkeringsbromsarmen bakåt för att frigöra parkeringsbromsen.

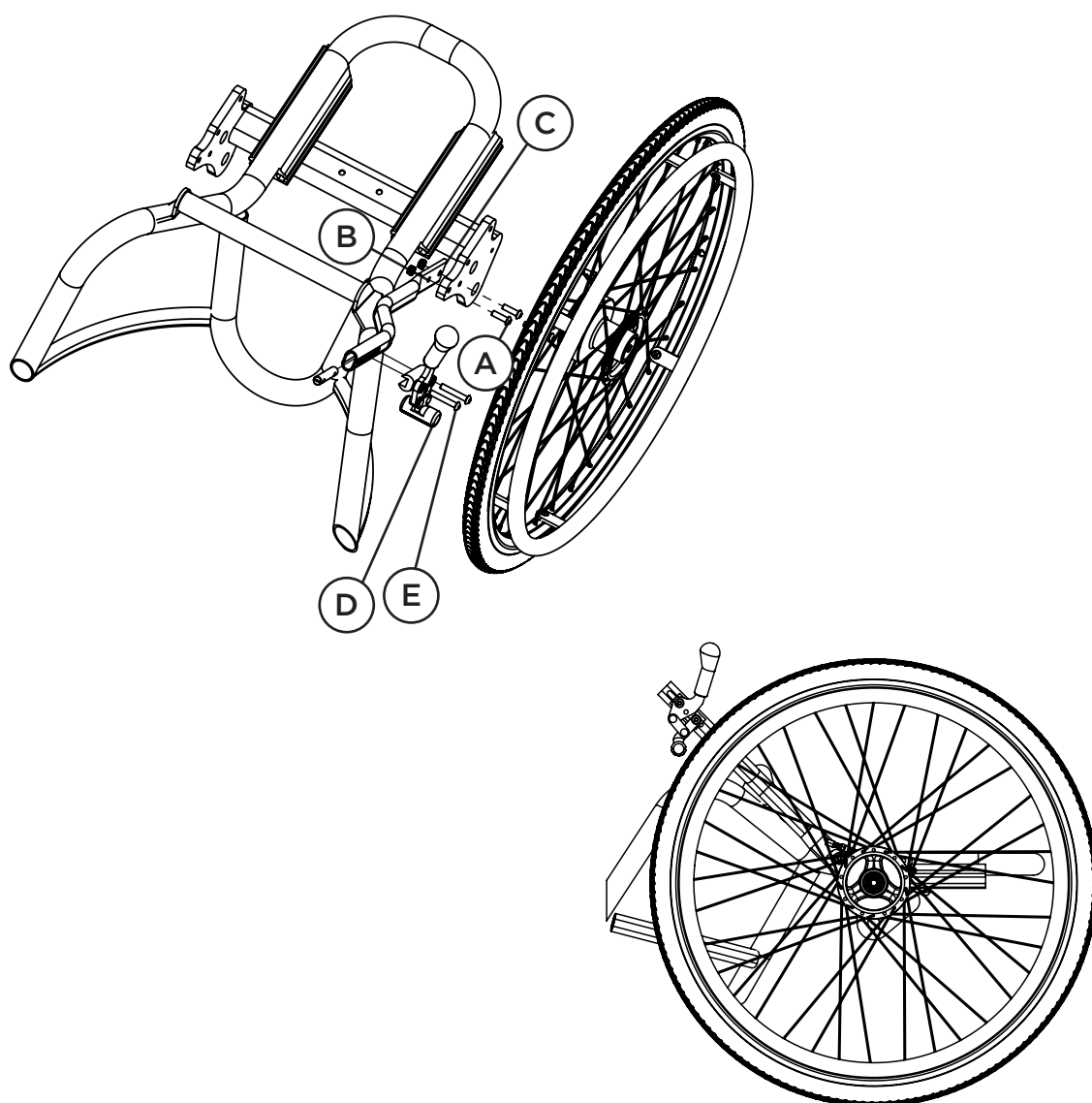

Fotstöd

Montering av fotstöd

För in fotstödsinfästningen (A) i avsedda hål under sittdelsplattans främredel på underredet och dra sedan åt skruvarna (B) på båda sidor med mutter och bricka (C). Det finns två lägen för djupjustering på fotstödsinfästningen.



Notera! Du behöver avlägsna ändavslutet från fotstödsinfästningen på underredets sittplattas främre del innan montering av fotstöd sker.

Säkerhetsstopp

Säkerhetsstopp (D) i form av en sargsprint finns monterad i botten av fotstödsprofilen. Säkerhetsstoppet (C) kan även användas för att hitta tillbaka till en förinställd höjdposition.




Tips! Montera ett extra säkerhetsstopp ovanför fotstödet i fotstödsprofilens spår för att enkelt hitta tillbaka till en alternativ höjdposition (exempelvis med eller utan skor).

Justering av vinkel vid knäleden

När fotstödet är monterat i sittdelsplattan finns möjlighet att vinkeljustera fotstödet vid knäleden. Lossa skruven (E) något och justera till önskad vinkel. Dra sedan åt skruven.

Justering av fotstödet höjd

När fotstödet är monterat i sittdelsplattan finns möjlighet att höjdjustera fotstödet vid fotleden. Lossa vreden (F) något och justera till önskad höjd. Dra sedan åt vreden.

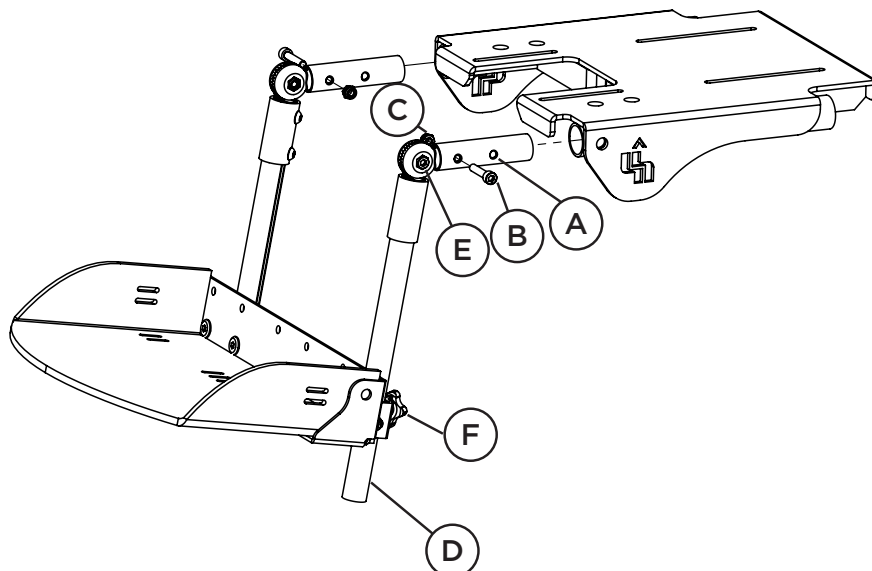

Fotstödsbeslag

Fast fotstödsbeslag (1)

För att höjjustera fotstödet lossar du spakvredet (A) något för att justera till önskad höjd. Dra sedan åt spakvredet.

Fjädrande fotstödsadapter (2)

För att höjjustera fotstödet lossar du skruven (D) och eventuellt skruven (E) något för att sedan justera till önskad höjd. Dra åt skruven (D). Välj längd på fjäderväg genom att justera skruven (E) till önskad position och dra åt den.



Tips! Fjädringens motstånd kan justeras med en spårmejsel genom att skruva på skruven i fjäderpaketet (F).




Uppfällbart fotstödsbeslag (3)

För att höjjustera fotstödet lossar du spakvredet (A) något för att justera till önskad höjd. Dra sedan åt spakvredet. För att använda den uppfällbara funktionen, lyft fotstödsplattan i framkant.

Kulledsadapter (4)

För att höjjustera fotstödet lossar du spakvredet (A) något för att justera till önskad höjd. Dra sedan åt spakvredet.

För att använda kulledsfunktionen lossar du först skruvarna (B) och (C) och justerar till önskad position. Dra sedan åt skruvarna (B) och säkerhetslås positionen med skruven (C).

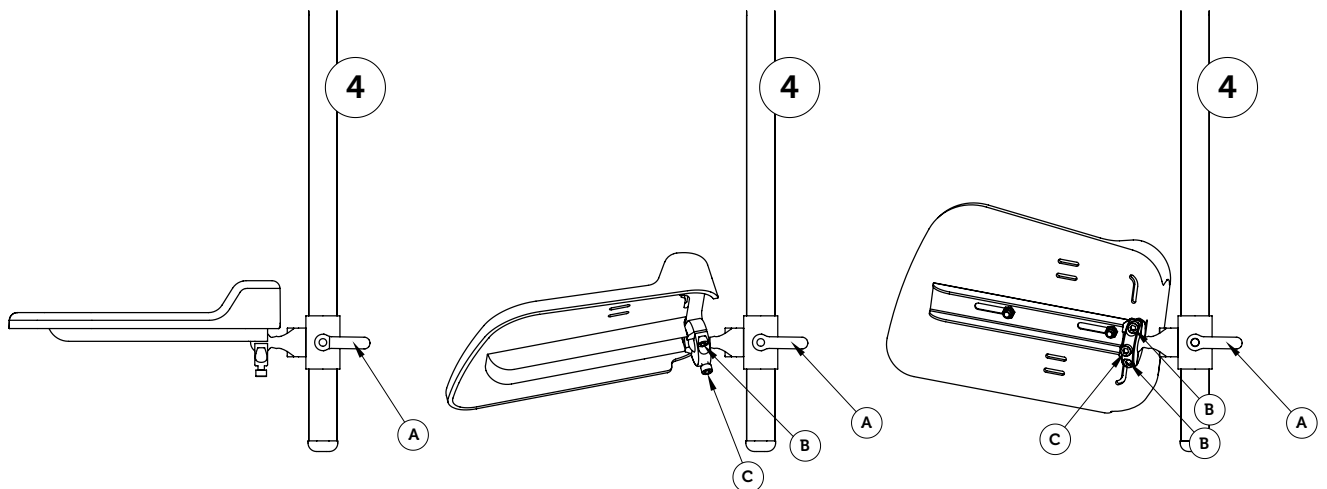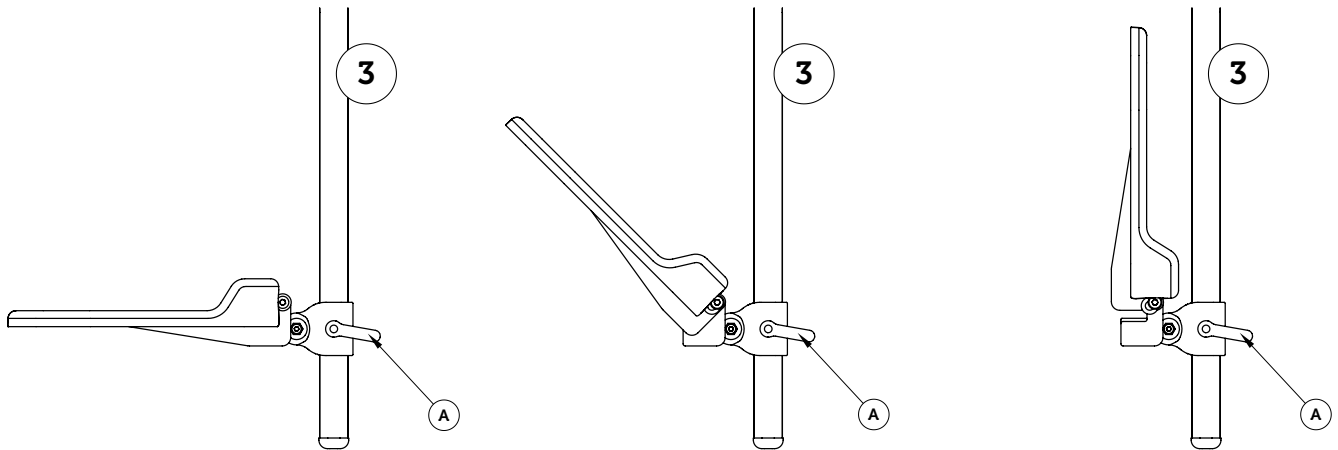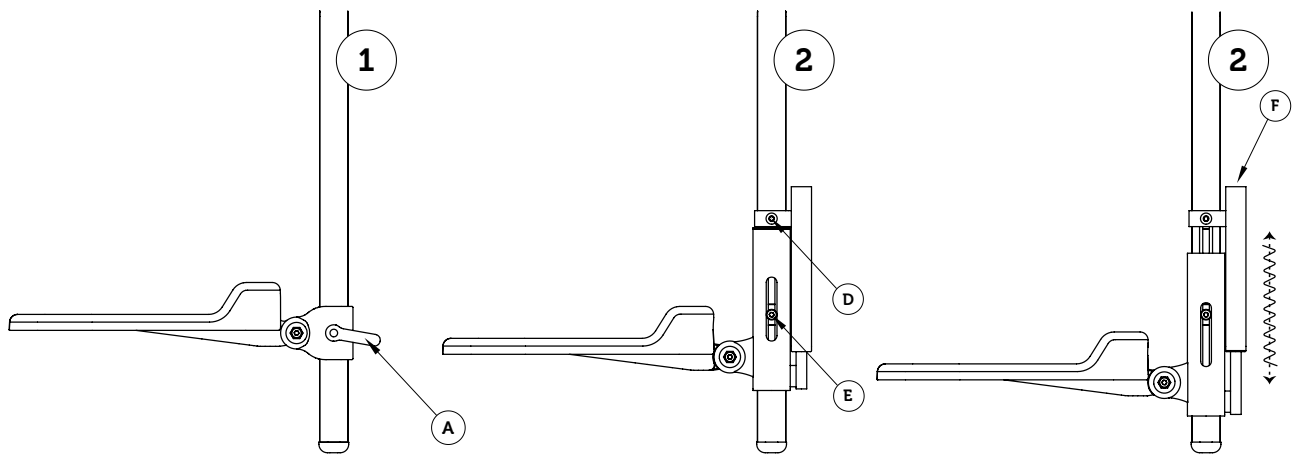

Vadstöd till Guppys fotstöd

Montering av vadstöd


Montera vadstödet med medföljande skruvar och sargsprintar i hålen i fotstödsbeslaget enligt bild.

Höjdjustering av vadstöd

För att höjdjustera vadstödet lossar du skruvarna (A) något för att sedan justera till önskad höjd. Dra sedan åt skruvarna (A).

Breddjustering av vadstöd

För att breddjustera vadstödet lossar du skruvarna (B) något för att sedan justera till önskad bredd. Dra sedan åt skruvarna (B).

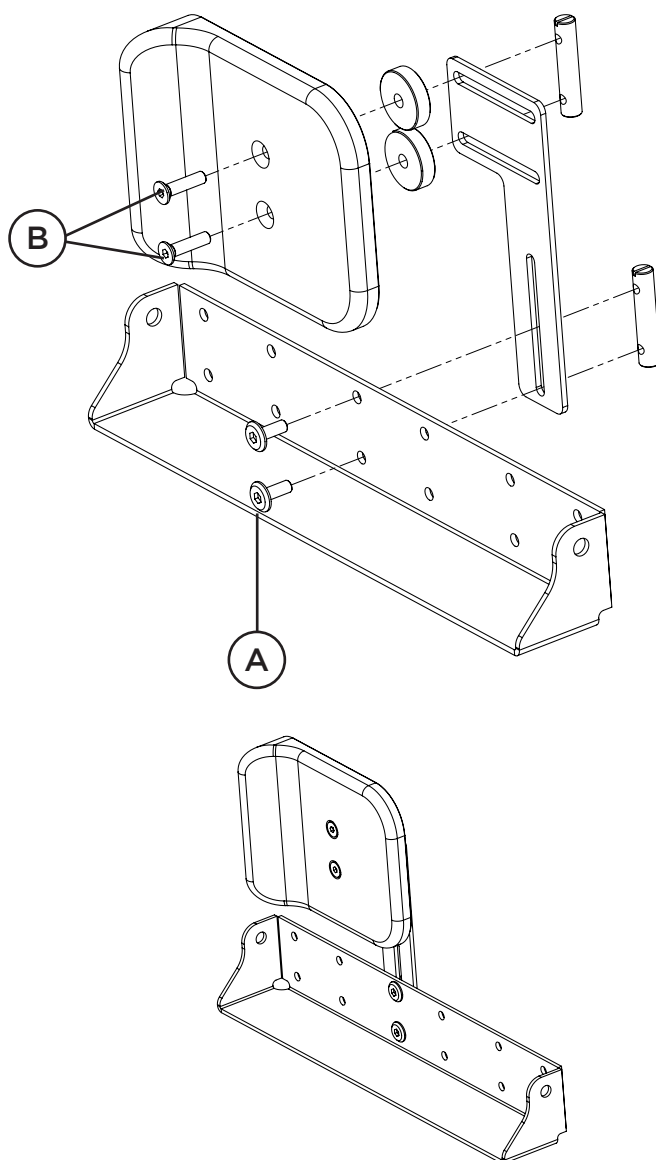

Tippskydd

Montering av tipskydd

Tippskyddet monteras på hjulaxeln enligt bild med medföljande skruvar (A), brickor (B), muttrar (C) och mutterkåpor (D).

Stick igenom skruv (A) i avsedda hål på tipskyddsfästet och genom rullstolsramen. Möt sedan upp på motsatt sida med bricka (B), mutter (C) och dra åt skruvarna.

Avsluta sedan med att sätta på mutterkåpor (D).




Notera! Guppy bör alltid utrustas med tipskydd med tanke på dess många inställningsmöjligheter.

Att använda tipskydd

Tippskydd används för säker och trygg användning av underredet och kan enkelt vikas undan för att inte vara i vägen när det inte används. Trampa försiktigt ned tipskyddet med foten och vrid det åt sidan. Försök att trampa så nära tipskyddsstaget som möjligt vid deaktivering av tipskyddet.

Se till att vrida tipskyddet ända tills du hör ett klick, vilket indikerar att tipskyddet hamnat på plats.

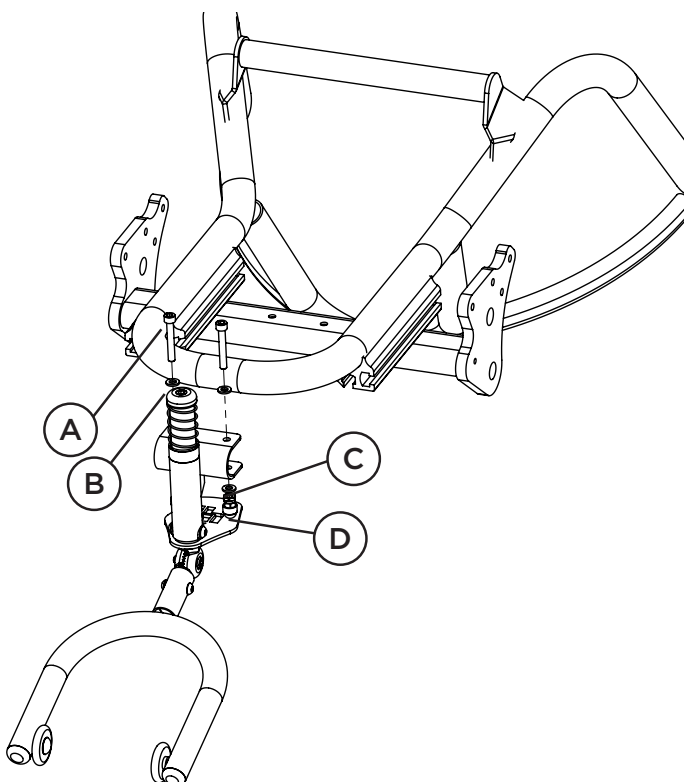

Tramprör

Montering av tramprör

Montera trampröret (A) på insidan av profilen vid bakre delen av rullstolsramen, genom att trä in muttrarna i spåret och lås dess placering med en av skruvarna (B) från utsidan.




Notera! Trampröret sitter monterat på höger sida som standard.

Att använda tramprör

Tramprör används för att underlätta uppresning av underredet, exempelvis vid trottoarkanter. Tryck med foten på trampröret samtidigt som du håller i körbågen, och dra lätt bakåt, för att frigöra utrymme under länkhjulen.



OBS! Vid användning av trampröret är det viktigt att du håller i körbåge eller körhandtag ordentligt.

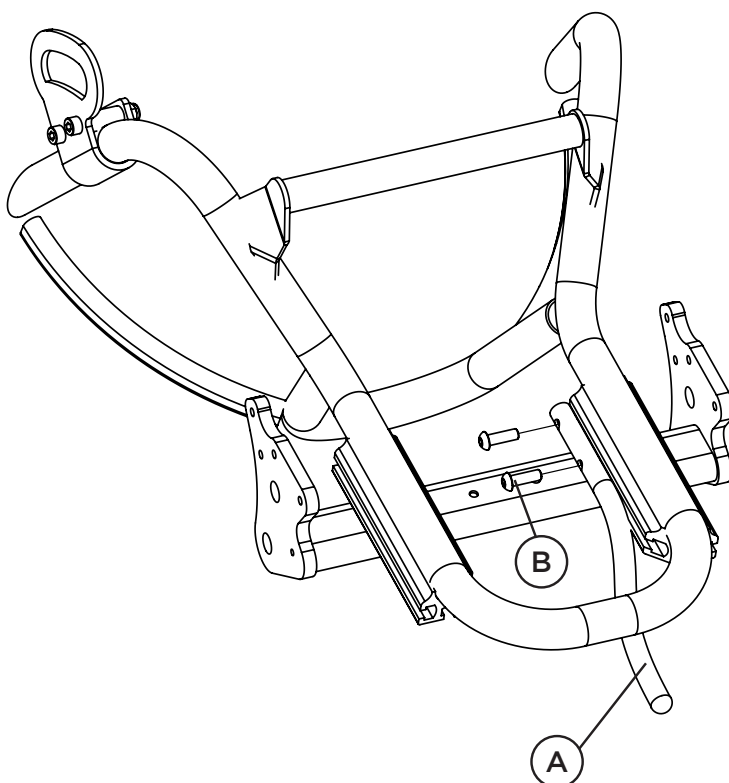

Transportfästen

Montering av främre transportfästen

Montera fästet runt rörramen. För gängad bygel (A) genom fästet och spärrplåt (B). Observera att distansen (C) ska monteras i fästet. Spänn fast fästet med bricka (D) och mutter (E), samt dölj mutter med kåpa (F).

Montering av bakre transportfästen

Det bakre transportfästet monteras på utsidan av profilen vid bakre delen av ramen med hjälp av medföljande skruvar (G), brickor (H) och muttrar (I) enligt bildbeskrivning.

Att använda transportfästen

Se avsnittet "Transport i bil" för ytterligare information och rekommendationer av hur du på ett säkert sätt använder transportfästen.




OBS! Körbågen ska alltid ligga an mot sittsystemets rygg vid ransport i fordon.

Krocktestad och godkänd

Guppy är krocktestad och godkänd enligt ISO 7176-19 för 70 kg i bil.



Notera! Krockgodkännande gäller belastningsvikt upp till 70 kg.

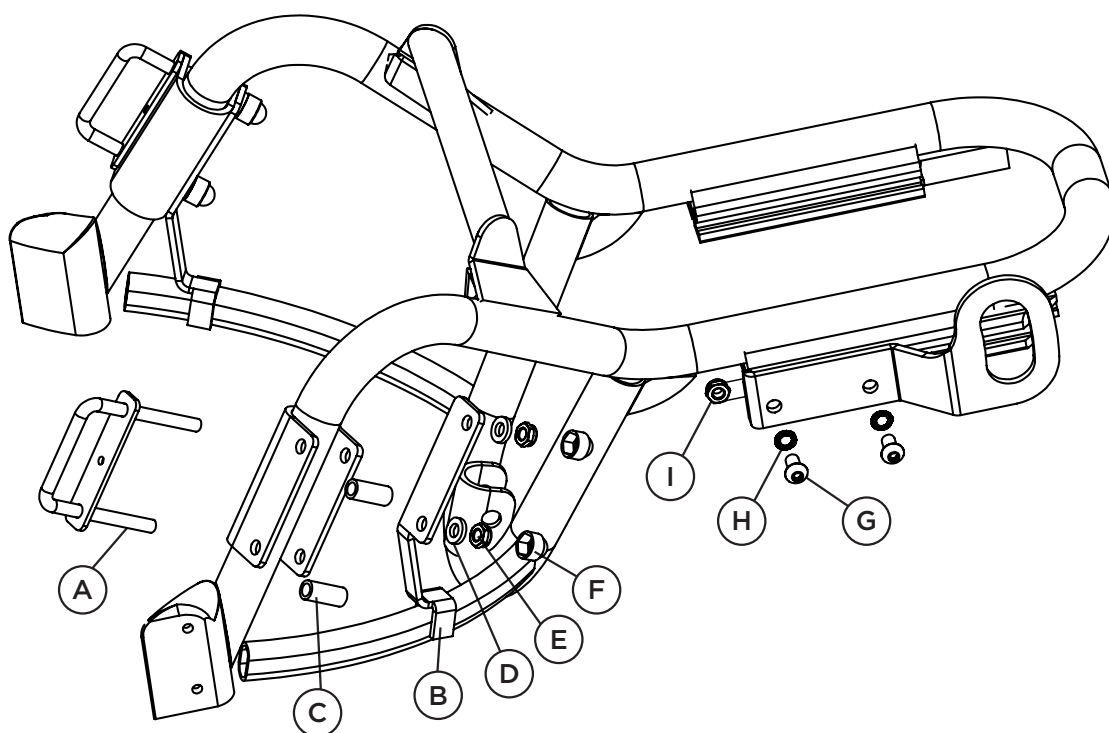

Färdriktningsspärr

Montering av färdriktningsspärr

Montera färdriktningsspärren på länkhjulsinfästningen med hjälp av medföljande monteringsdetaljer.

Börja med att ta loss länkhjulsinfästningen (A) från rullstolsramens länkhjulskuts (B) genom att skruva ur skruvarna (C). Lyft sedan bort ändavslutet (D) från länkhjulsinfästningens (A) topp och skruva ur centerbulten (E).

Montera sedan färdriktningsspärrebslagen (F) mellan länkhjulsinfästningen (A) och rullstolsramens länkhjulskuts (B) och mellan länkhjulsinfästning (A) och länkhjulsgaffeln (G) med monteringsdetaljer enligt bildbeskrivning.

När montering av färdriktningsspärren är slutförd monterar du tillbaka länkhjulet på rullstolsramen igen. Finjustera sedan länkhjulets färdriktning genom att justera något på skruv (J).

Aktivering av färdriktningsspärr


För att aktivera färdriktningsspärren drar du låsbulten (H) rakt upp och vrider den sedan 90° och släpper ner spärren i hålet på den rörliga delen. Säkerställ att färdriktningen är låst.

Frigöring av färdriktningsspärr

För att frigöra färdriktningsspärren drar du låsbulten (H) rakt så att spärren (I) dras upp ur hålet på den rörliga delen. Vrid sedan spärren 90° och släpp ner den försiktigt.



Notera! Färdriktningsspärr passar enbart vid val av 7" länkhjul.

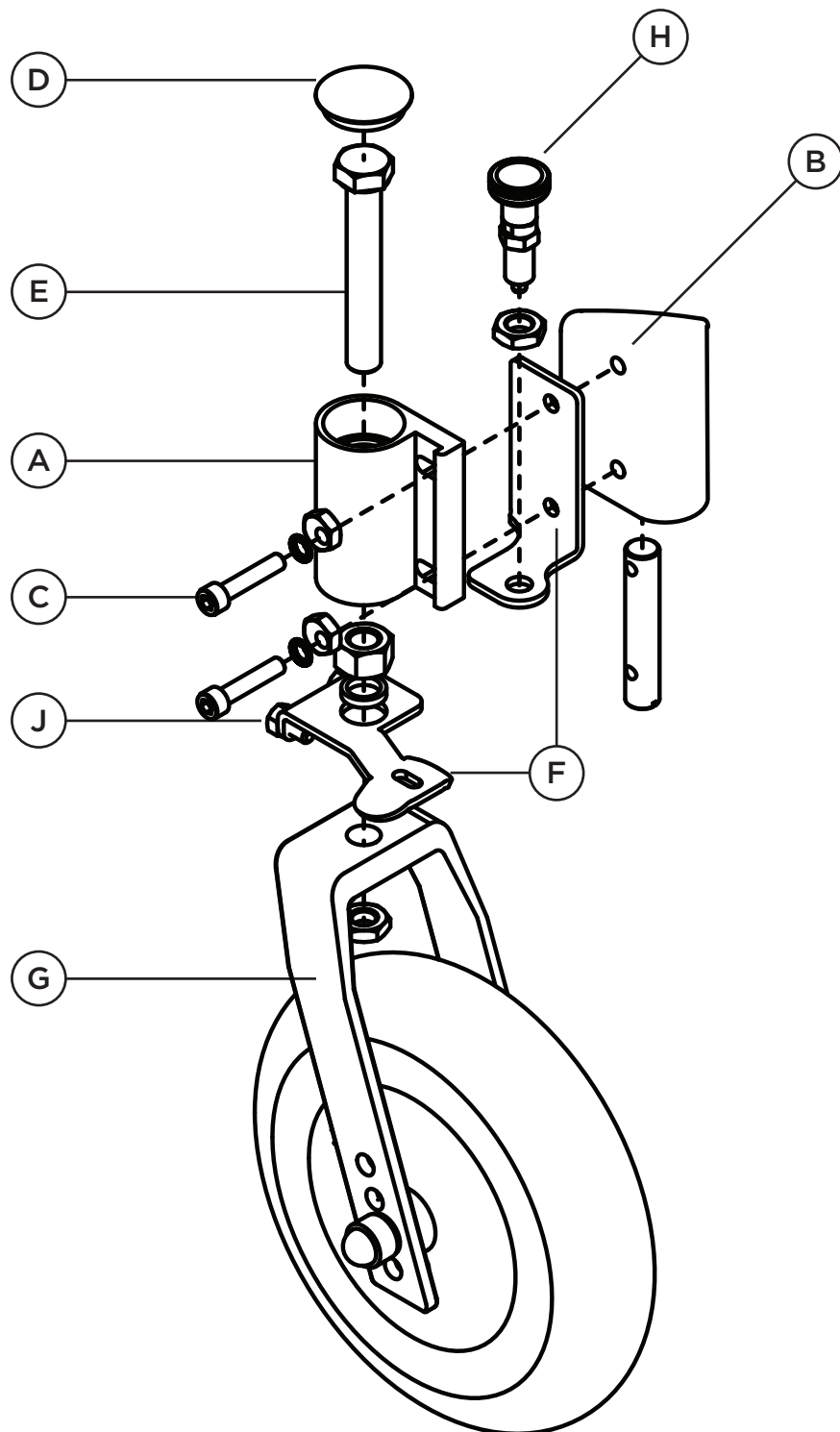

Stänkskärm

Montering av stänkskärm

Stänkskärmen monteras med hjälp av medföljande skruvar (A), distanser (B), och muttrar (C).

För att montera stänkskärmen behöver du först lossa drivhjulet från dess drivhjulsaxel med hjälp av quick-release funktionen och lägga det åt sidan så länge. Lossa skruven som håller rotationsspärren på trumbromsen och ta bort distansen.


Montera stänkskärmen med medföljande skruv. Distansen vid trumbromsen byts ut till en kortare för att ge plats åt stänkskärmsplåten.

Justering av stänkskärm

Stänkskärmen kan justeras i höjddled genom att lossa skruvarna (D). Justera till önskad höjd och dra åt skruvarna (D) när önskad höjdposition är uppnådd.



Tips! Du behöver inte skruva ur skruvarna (D) helt, det räcker med att lossa dem.

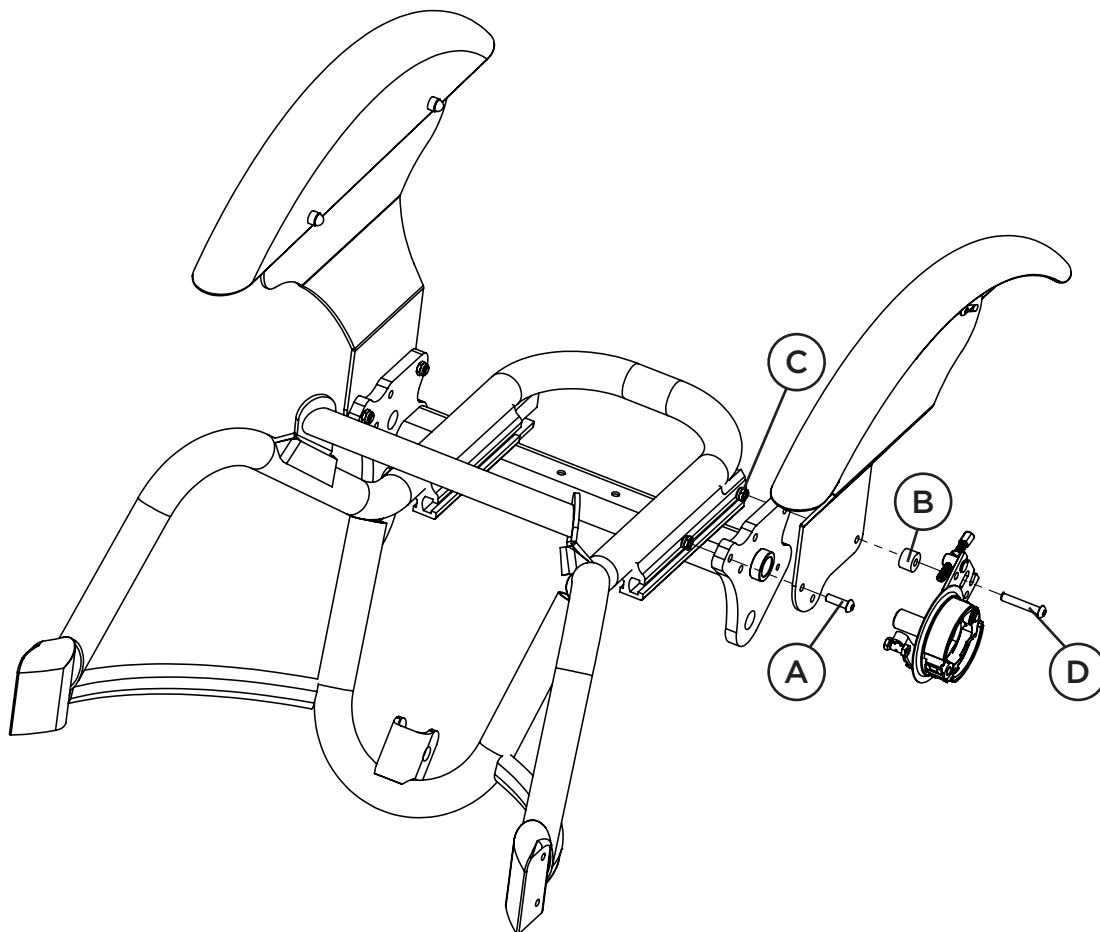

E-drive

E-drive tillsammans med Guppy

E-drive är ett elpaket som gör Guppy elmanövrerad. E-drive finns som tillval för Guppy i utförande 16" samt 20" drivhjulstorlek.

Montering av e-drive


E-drive ersätter befintliga drivhjul och monteras enligt bildbeskrivning, i avsedd hålbild på rullstolsramens sidostycke med distans, bricka, skruv, mutter och navhysla. Handkontrollen monteras med medföljande detaljer på körbågens körhandtag.



Tips! För mer utförlig information kring e-drive hänvisar vi till separat monteringsanvisning.

Att använda e-drive

E-drive gör Guppy till en elmanövrerad vårdastyrd rullstol och manövreras med hjälp av en handkontroll.

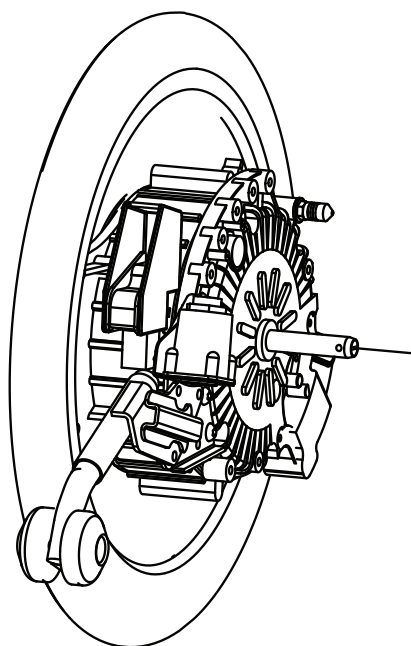


Transport i bil

Anvisningar för transport i bil

Infästning ska ske med spännband, godkända enligt ISO 10542, i avsedda transportfästen enligt markeringar på bildbeskrivning.

Guppy ovanifrån
med drivhjulen
till vänster

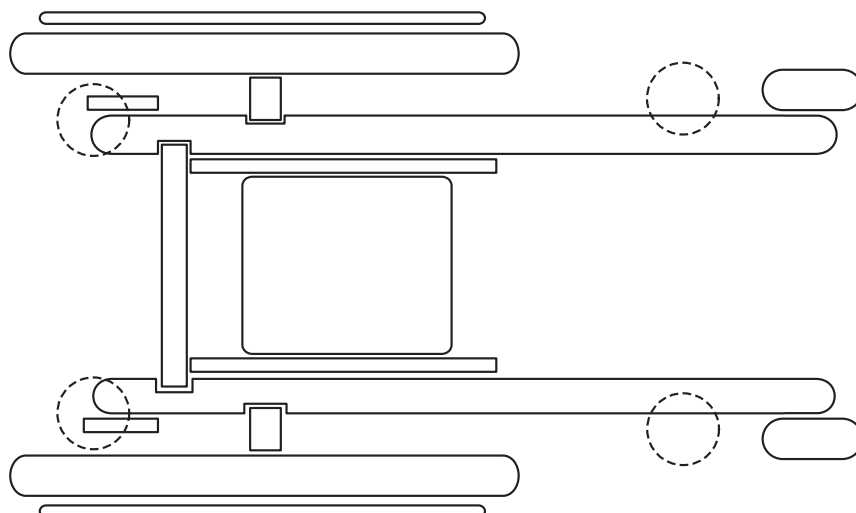

OBS! Det är viktigt att endast sträcka banden, och inte spänna dem för hårt. För hård spänning av banden kan orsaka att underredet blir skevt.

Krocktestad och godkänd

Guppy är krocktestad och godkänd enligt ISO 7176-19 för 70 kg.



Notera! Krockgodkännande gäller belastningsvikt upp till 70 kg.



Underhåll och skötselanvisningar

Serviceintervall

För att hjälpmedlet ska fungera tryggt och säkert bör regelbunden service och kontroll utföras. Behovet av service skiftar och måste bedömas från fall till fall, helt beroende på användning och slitage. Kontrollera alla rörliga delar och fästdetaljer med avseende på slitage. Arbetet ska alltid utföras yrkesmässigt och av kvalificerad personal. Om du känner dig osäker är du alltid välkommen att kontakta Anatomic SITT AB.

Rengöring och tvätt

Plast- och metalldelar kan torkas av med en fuktig trasa, alternativt tvättas med antibakteriell vätska eller liknande. Tänk grönt, tänk på miljön! Använd gärna biologiskt nedbrytbart tvättmedel.

Kontrollera hjälpmedlets skick regelbundet och utför underhåll vid behov.

Gaskolv

Gaskolven bör användas regelbundet för att bibehålla sin funktion. Då produkten inte används måste gaskolven aktiveras minst en gång var 6:e månad. Dessutom bör de lagras på så sätt att kolvstången är riktad nedåt. Annars kan gaskolvens tätning gå sönder och gaskolven sluta fungera.



OBS! Gaskolven måste aktiveras regelbundet

Garanti

12 månader mot fabrikationsfel. För utförligare information kring den garanti vi lämnar, se sida 37 i denna bruksanvisning.

Kombinationer

Zitzi Guppy och dess tillbehör är en CE-märkt produkt som kan kombineras med samtliga tillbehör som beskrivs i denna bruksanvisning. Zitzi Guppy passar bl.a. ihop med sittsystem som Zitzi Delfi Pro och Anatomic Sits.

För övriga kombinationer vänligen kontakta Anatomic SITT AB.

Reservdelar

För att Zitzi Guppy ska behålla sin CE-märkning får hjälpmedlet endast förses med reservdelar levererade av Anatomic SITT AB.

Märkning

Guppy med dess tillbehör är en CE-märkt produkt. Ett unikt serienummer är placerat på en etikett som sitter på rörramen. Detta serienummer ska anges vid all korrespondens gällande produkten.

Återvinning

En förbrukad del eller produkt demonteras och skrotas. Delarna ska sedan separeras efter materialtyp, metall, plast och brännbart (textilier). Gaskolv sorteras som farligt avfall.



OBS! Kontrollera alltid vid rekonditionering att hjälpmedlet inte är specialanpassat, innan det skickas till ny brukare.

Rekonditionering

Inledning

För att hjälpmedlet ska fungera tryggt och säkert bör regelbunden service och kontroll utföras. Behovet av service skiftar och måste bedömas från fall till fall, helt beroende på användning och slitage. Kontrollera alla rörliga delar och fästdetaljer med avseende på slitage. Rekonditionering av hjälpmedlet får endast ske med originaldelar från Anatomic SITT AB.

Arbetet ska alltid utföras yrkesmässigt och av kvalificerad personal.
Om du känner dig osäker är du alltid välkommen att kontakta Anatomic SITT AB.

Behovet av rekonditionering varierar och måste bedömas utifrån fall till fall.
Samtliga punkter bör utföras minst en gång per år eller vid behov och funktionskontrollen bör utföras inför varje gång underredet ska användas.

Rengöring

Lackerade ytor, drivhjul, länkhjul och handtag rengörs med rengöringsmedel utan lösningsmedel. Använd absolut inte lacknafta, bensin eller andra lösningsmedel.

Efterbehandling

Efter tvätt ska alla leder, trånga utrymmen och dräneringshål blåsas torra och spraysmörjas med tunnflytande olja.

Märkning

Kontrollera att CE-märkningen finns kvar och att den går att tyda.
På Guppy sitter denna märkning på rörramen.

Hjul

Kontrollera att både länkhjul och drivhjul inte är slitna och att de snurrar lätt utan missljud. Se sida 12-15 i denna bruksanvisning för ytterligare information kring drivhjul- och länkhjulsjustering.

Lack

Kontrollera skador i lacken genom att syna av underredet.
För att förhindra korrosionsskador och bättra på repor.
Bättringsfärg kan beställas från Anatomic SITT AB.

Stabilitet

Kontrollera att alla hjul står stadigt på underlaget och att inte finns någon skevhet i chassit. Se sida 12-15 i denna bruksanvisning för ytterligare information kring drivhjul- och länkhjulsjustering.

Rörstomme och detaljer

Svets och skruvförband kontrolleras. Grindbussningar och gångjärn ska fungera utan missljud. Smörj vid behov. Kontrollera även vred, skruvar och övriga monteringsdetaljer. Byt dessa vid behov.

Framgafflar

Kontrollera att infästningar och lager inte glappar och att de snurrar lätt. Smörj framgafflar vid behov.

Körbåge och körhandtag

Kontrollera att polstring och handtag sitter fast ordentligt och att körbåge/körhandtag går att justera i höjdlid. Kontrollera även skicket på vred och skruv.

Bromsar

Kontrollera att vårdarbroms och eventuell parkeringsbroms fungerar korrekt. Ytterligare information kring bromsar, se sida 16-20 i denna bruksanvisning.

Ihopfällningsmekanism och tilt

Kontrollera att man enkelt kan fälla ryggrör och körbåge och att man enkelt kan tilta sittenheten. Se sida 7-11 för ytterligare information kring tilt.

Funktionskontroll

Funktionskontroll innebär att du går igenom Hjul, Stabilitet, Bromsar och Körbåge och körhandtag.



OBS! Kontrollera alltid vid rekonditionering att hjälpmedlet inte är specialanpassat, innan det skickas till ny brukare.

Anpassning och specialanpassning

Rekommendationer

Varje gång Zitzi Guppy ändras på något sätt måste bedömning göras om det är en anpassning eller en specialanpassning.

En anpassning är en ändring som görs inom ramarna för produktens CE-märke. Allt annat är specialanpassning. Anpassningar får endast göras av den som bedöms kvalificerad för uppgiften och ska alltid utföras på ett yrkesmässigt sätt. Att produkten är CE-märkt innebär att den uppfyller alla relevanta europeiska säkerhetskrav.

Tillåtna anpassningar

Notera att en riskbedömning alltid bör göras, såväl vid anpassning som vid specialanpassning, av ett hjälpmedel. Produkten får aldrig bli farlig för brukaren att använda efter anpassning.

Kapa fotstödsprofiler

Fotstödsprofilens längd får kortas ned för att bättre passa brukaren.

Hål i sittplatta

Hål i sittplattan får läggas till för montering. Dock ska följande kriterier följas:

- Inte fler än 4 hål
- Hål ej större än 6,5mm
- Hål får ej vara mindre än 15mm från befintliga hål och spår
- Hål får ej vara mindre än 15mm från kant på platta

Risikanalys

Notera att en riskbedömning alltid skall göras, såväl vid anpassning som vid specialanpassning av ett hjälpmedel. Produkten får aldrig bli farlig för brukaren att använda efter anpassning.

Märkning

Produkten bör förses med upplysning att den är anpassad till en specifik brukare, så att den inte kan misstas för en produkt i standardutförande.



OBS! CE-märkningen upphör att gälla vid specialanpassad produkt

Försäljningsvillkor

Garanti

Garanti gäller ett (1) år mot fabrikationsfel fr.o.m. leveransdatum. Garanti utgår inte för yttre påverkan eller onormal hantering. För garantibehandling krävs felaktig vara i retur. Bifoga alltid följesedel.

Reklamation

Beskriv felet samt orsak så ingående som möjligt. Åberopa garantireparation eller eventuellt garantiutbyte. Bifoga en kopia på fakturan och ange att produkten skall tillbaka till dig efter reparation. Ange leveransadress, kontaktperson samt telefonnummer. Blankett för reklamation finns att hämta på vår hemsida.

Förpacka produkten väl för att skydda den mot eventuella stötar vid transport. Glöm inte att anteckna sändningsnummer eller liknande på dina dokument. Detta är för att du ska kunna spåra sändningen om något skulle hända under transporten.

Returer

Felbeställda eller fellevererade varor skall returneras inom 20 dagar från leveransdatum. Bifoga alltid en kopia på både följesedel och faktura. Ange orsak till retur av dina varor. Returblankett finns på vår hemsida.

Förpacka produkten väl för att skydda den mot eventuella stötar vid transport. Glöm inte att anteckna sändningsnummer eller liknande på dina dokument. Detta är för att du ska kunna spåra sändningen om något skulle hända under transporten.

Vid retur senare än 20 dagar från leveransdatum

Görs ett returavdrag på 80 % av fakturavärde

Vid retur senare än 60 dagar från leveransdatum

Görs ett returavdrag på 60 % av fakturavärde

Vid retur senare än 150 dagar från leveransdatum

Görs ett returavdrag på 40 % av fakturavärde

Senare än 360 dagar från leveransdatum


Varorna återtages ej



Specialanpassade produkter återtages ej

Tekniska data

Guppy

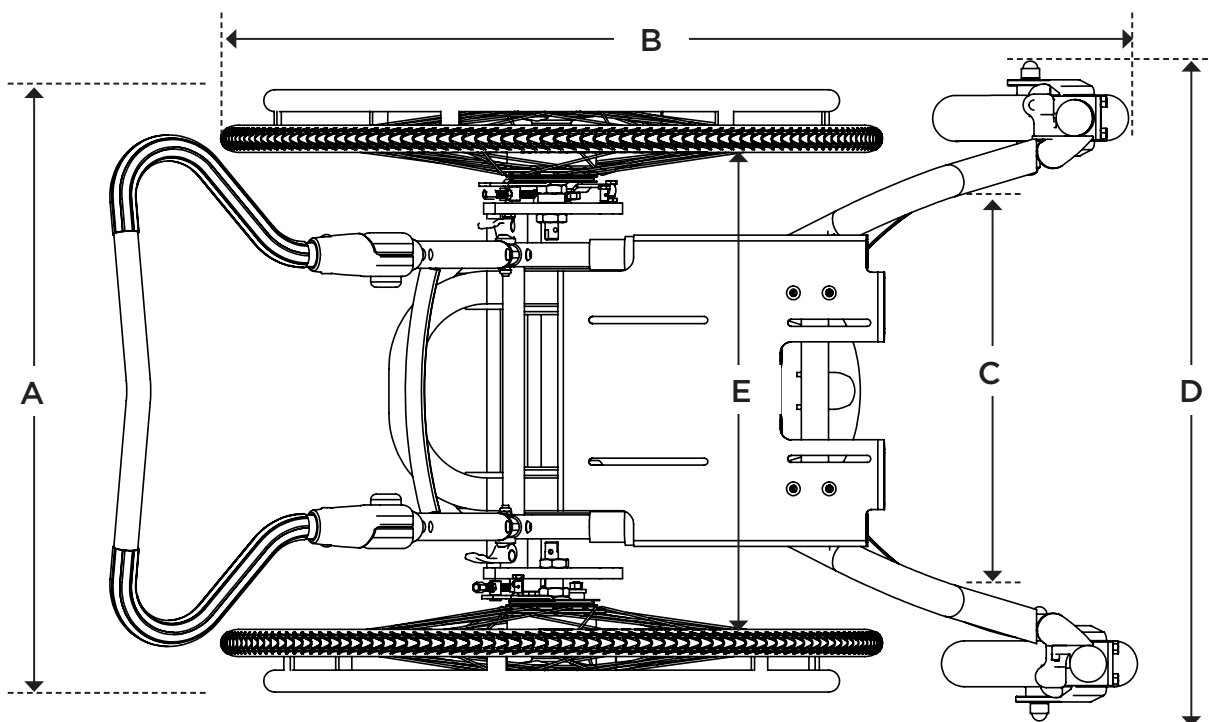

Med 16" drivhjul (6" länkhjul)

Storlek	Tilt	Sitthöjd	Vikt	A	B	C	D	E
1	0° - 32° -7° - 25°	46 cm	14 kg	51 cm	67-73 cm	41 cm	57 cm	41 cm
2	0° - 32° -7° - 25°	46 cm	14 kg	56 cm	67-73 cm	41 cm	57 cm	46 cm

Med 20"/22"/24" drivhjul (6" länkhjul)

Storlek	Tilt	Sitthöjd	Vikt	A	B	C	D	E	E med stänkskärm
1	0° - 32° -7° - 25°	46 cm	15 kg	57 cm	71-82 cm	41 cm	57 cm	43.5 cm	39.5 cm
2	0° - 32° -7° - 25°	46 cm	15 kg	62 cm	71-82 cm	41 cm	57 cm	48.5 cm	44.5 cm

Den totala längden av underredet förändras beroende på läge och hjul.
C-måttet är taget i höjd med länkhjulshuset.

SE

Anatomic SITT AB (tillverkare)

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden

Tel +46 11 16 18 00

Fax +46 11 16 20 05

Support +46 11 16 18 05

Besöksadress

Terminalgatan 1, SE-602 29 Norrköping, Sweden

DK

Anatomic SITT A/S

Viengevej 4, 8240 Risskov, Denmark

Tel +45 86 17 01 74

Fax +45 86 17 01 75

FI

Rehaco OY

Haaransuontie 6 A7, 90240 Oulu, Finland

Tel: +35 840 775 22 88

NL

Anatomic SITT Nederland BV

Postbus 6027 / 4000 HA Tiel, Netherlands

Tel +31 344 63 45 40

Fax +31 344 62 33 61

World wide

anatomicsitt.com

info@anatomicsitt.com

facebook.com/anatomicsitt

youtube.com/anatomicsitt

