


Startguide

TD I-110



Vad innehåller förpackningen?

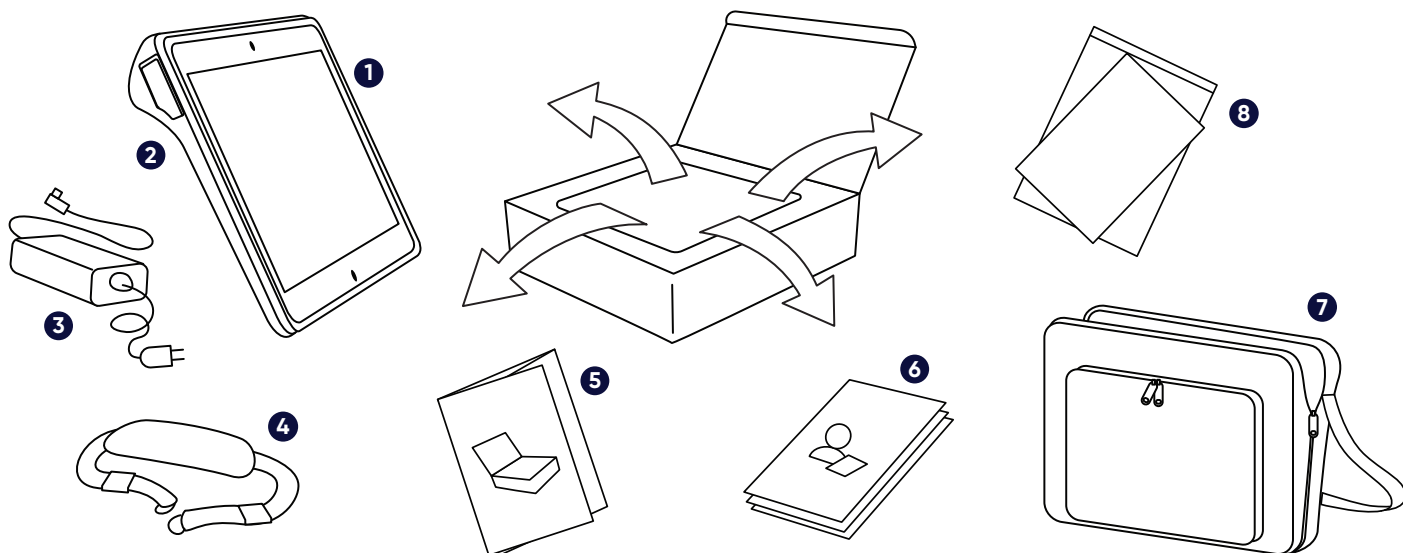

1 Enhet

2 Skyddsfodral

3 Strömkabel

4 Axelrem


5 Startguide

6 TD Snap utbildningskort


7 Transportväska

8 Dokument om säkerhet
och överensstämmelse,
konfiguration och licens


Lär känna din enhet

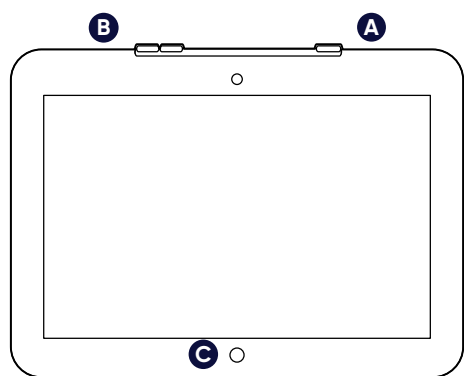

Framsida

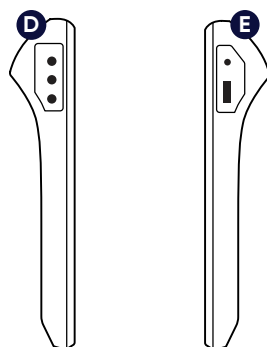

Sidor

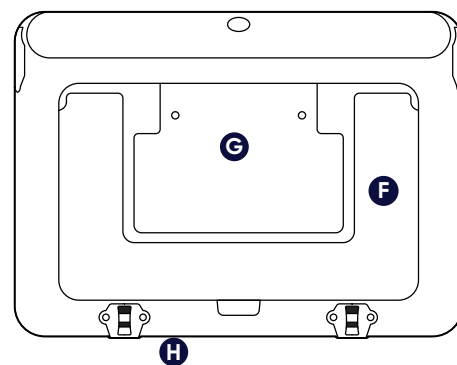

Baksida

A Strömknapp

B Volymknappar

C Hemknapp

D Ljud- och kontaktportar

E Strömkontakt
och USB-portar

F Stativ

G Monteringsplats



H Fäste för bärrem

Följ stegen i guiden för att konfigurera och börja använda din enhet.

Steg 1: Första installationen

Starta enheten


- 1 Anslut strömkabeln till enheten och kontakten till ett uttag.
- 2 Tryck på strömbrytaren

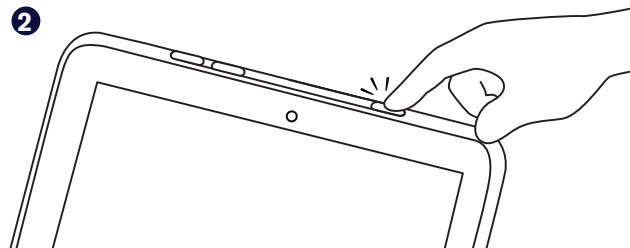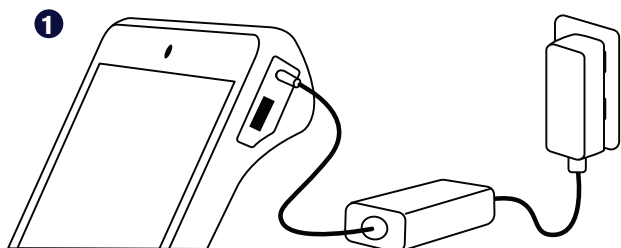

Installation av Windows

Om din enhet inte har konfigurerats i förväg, blir du ombedd att slutföra inställningsprocessen för Windows.

Trots att denna process inte kräver ett Microsoft-konto, rekommenderar vi att du ansluter till eller skapar ett konto för användaren. Undvik att använda någon annans konto.

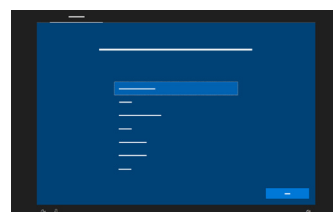

Steg 2: Konfigurera TD Snap



Dubbelklicka på ikonen för att starta appen TD Snap. Följ anvisningarna för att skapa en ny användare eller återställa en sparad användarfil.

Steg 3: Montera och placera

Enheten kan fästas i ett monteringsystem, läggas platt på en yta eller ställas upp med det inbyggda stativet. Börja med att se till att användaren sitter bekvämt och placera sedan enheten så att användaren ser skärmen tydligt och enkelt kan komma åt med sin valda manövermetod. Placera alltid enheten så att den är anpassad efter användaren, inte tvärtom. Under dagen kommer enheten troligtvis att behöva placeras om för att följa användaren. Fäst axelremmen för säker transport.

Steg 4: TD Snap utbildningskort

Fortsätt konfigureringen med hjälp av TD Snaps utbildningskort som följde med i lådan till din enhet. Utbildningskortet går igenom funktionerna i TD Snap, grundläggande redigering, hur du säkerhetskopierar dina data och tips på aktiviteter för att hjälpa dig att börja använda TD Snap i vardagen.

Ytterligare resurser

Skanna QR-koderna med din telefon eller använd länkarna.



Tobii Dynavox
se.tobiidynavox.com



myTobiiDynavox
mytobiidynavox.com



TD Facebook-community
grco.de/TDFB



Tobii Dynavox Learning Hub
(endast på engelska)
learn.tobiidynavox.com



Supportsida för TD I -110
grco.de/I-110manual



Supportsida för TD Snap
grco.de/bcgYPO



Läs om manövermetoder
grco.de/bbFkqc



Teknisk support i Sverige
08 522 950 20 (välj 1 för support)