




PCEye 5

Startguide

Vad innehåller förpackningen?

- | | |
|--|---|
| 1 PCEye 5 | 5 Dokument om säkerhet och överensstämmelse |
| 2 Startguide | 6 Bärväska |
| 3 Monteringsplatta | 7 USB-C till USB-A-adapter |
| 4 Förberedelsekit för monteringsplatta | |

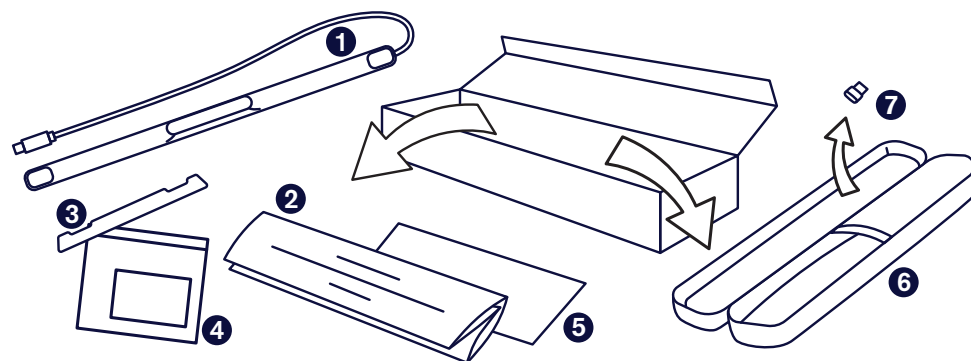


Mjukvara

PCEye 5 inkluderar mjukvaran TD Control. Om du har köpt Magic EyeFx-paketet, se licenskortet för mer information.

Lär känna din enhet

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1 Ögonstyrningsenhet | 3 Installationsmarkeringar |
| 2 USB-anslutning | 4 Monteringsmagneter |

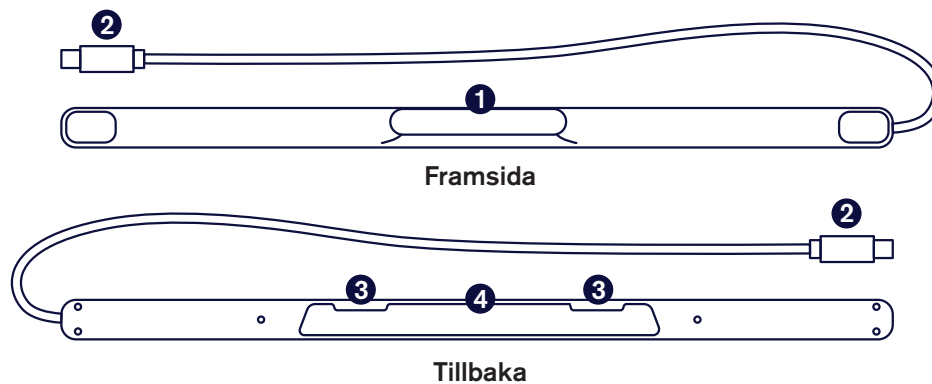

Vi är här för att hjälpa dig

Learning hub

Tobii Dynavox Learning hub:
learn.tobiidynavox.com

Extra support

Community: <http://qrco.de/TDFB>

Teknisk support i Sverige:

08 522 950 20 (välj 1 för support)

Utbildningsmaterial

Användarmanual: <http://qrco.de/PCEyeManual>

TD Control-manual: <https://qrco.de/TDCmanual>

Communicator 5 träningskort: <https://qrco.de/C5Cards>

TD Snap Core First träningskort: <https://qrco.de/TDSnapCards>

TD Snap Text träningskort: <https://qrco.de/TextCards>

Ytterligare resurser för PCEye 5 finns här:


qrco.de/PCEyeHelp



Installation

Utför de tre stegen i guiden för att ladda ned nödvändig mjukvara och montera PCEye 5-enheten på din dator. Ladda ned mjukvaran FÖRST för att få instruktioner på skärmen som tar dig steg för steg genom installation och användning.

PCEye 5 kan användas på bärbar eller stationär dator.

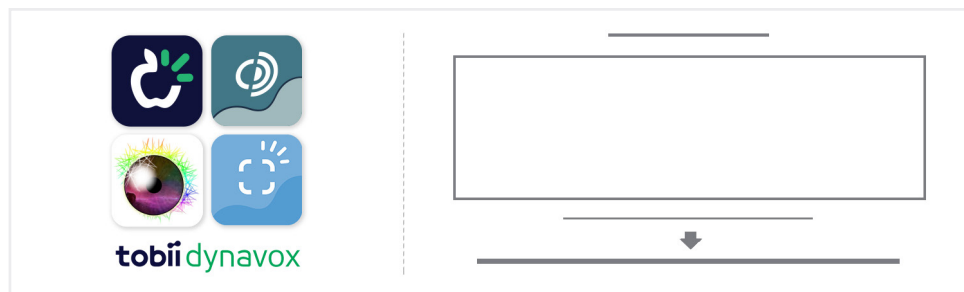

Steg 1: Ladda ned mjukvaran PCEye 5

Gå till <https://qrco.de/PCEyeCC> och ladda ned mjukvaran PCEye 5.

Steg 2: Montera och kalibrera PCEye 5

i Om PCEye 5 används med det valfria PCEye 5-fästet, hoppa över detta steg och se istället de medföljande instruktionerna för detaljerad information.

Följ anvisningarna på skärmen. Återgå till guiden för mer information om mjukvaran.

Steg 3: Starta mjukvaran

Om du har köpt ett mjukvarupaket eller har mottagit licenskort följer du instruktionerna för nedladdning och installation på vart och ett av korten (se vänster).

Komma igång med TD Control


När den används tillsammans med PCEye 5 ger TD Control dig åtkomst till mus- och tangentbordsfunktioner. När TD Control öppnas för första gången får du en överblick över de olika funktionerna i snabbstartsguiden.

i Du kan gå tillbaka till snabbstartsguiden genom att trycka på informationsknappen.

Välj Dölj guide för att avsluta.

Utforska spårning

Spårning ger dig återkoppling om var du tittar på skärmen. När du fixerar blicken på ett objekt visas aktiveringsknappen. Genom att fixera blicken på aktiveringsknappen öppnar du den interaktiva menyn.

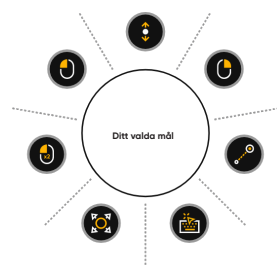

Utforska den interaktiva menyn

Den interaktiva menyn ger åtkomst till tangentbordet och primära musfunktioner.



i För detaljerad beskrivning av varje funktion, se Användarmanualen.

Utforska menyn utanför skärmen



Menyn utanför skärmen ger dig åtkomst till ytterligare funktioner såsom Kontinuerligt klick, Inställningar, Paus m.fl.

Kalibrera om genom att gå till menyn utanför skärmen, välj Mer och sedan Snabbkalibrering.

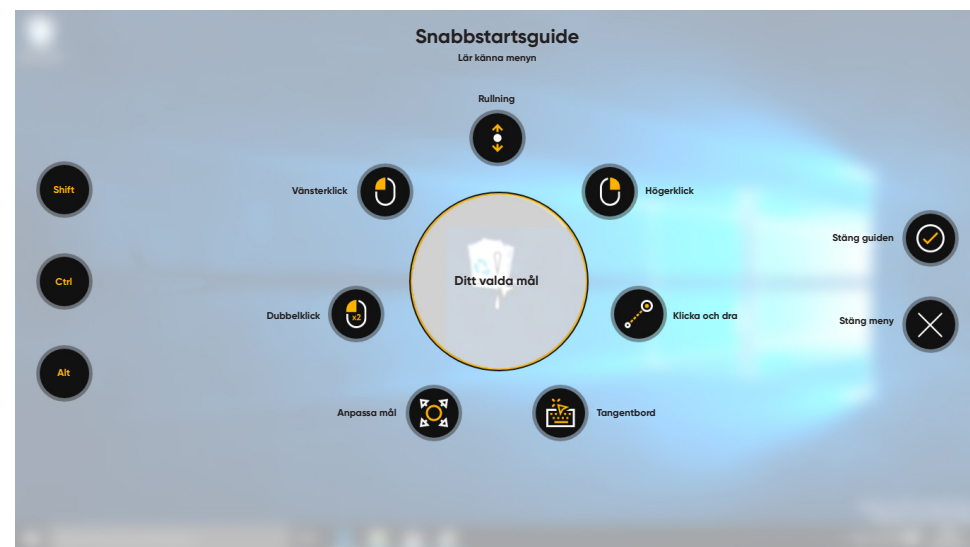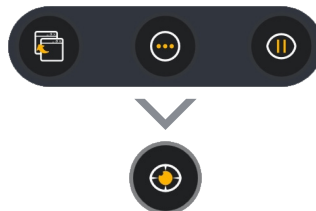i Under tiden som du utforskar TD Control är det okej att kalibrera om ifall exaktheten inte är optimal.



Användbara tips för användning av TD Control

- Använd Paus när du behöver vila dina ögon.  Paus
- Det önskade objektet behöver inte vara placerat exakt i mitten av spårningsmarkeringen.  Anpassa mål
- Öka exaktheten med Anpassa mål.
- När du använder Rullning rullar sidan snabbare ju längre bort från rullikonen du tittar. Du kan rulla uppåt, neråt och från sida till sida.
- För att skriva i textfält placerar du spårningsmarkören i textfältet och väljer sedan tangentbordet. Inga vänsterklick krävs.