

Meywalk 2000 är en gåstol som finns i tre storlekar: **Small, Medium och Large**

Storlek Small, grön

Storlek Medium, blå

Storlek Large, blå

Standardutförande: Bålstödsring, sadel, fjädrar, handtagsbygel, parkeringsbromsar, avbärarhjul och massiva hjul.



Meywalk 2000, storlek Medium

Användningsområde

Meywalk 2000 är en gåstol som skall användas som stöd vid upprätt gående eller stående. Gåstolen kan användas både ute och inne. Gåstolen skall endast användas av en person åt gången och vara individuellt inställd i bålstöds- och sadelhöjd. Meywalk 2000 får inte användas att köra någon/något på.

Läs igenom bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

Se www.maydayaid.se



Viktigt att veta

Vid utomhusanvändning får aldrig brukaren lämnas ensam i gåstolen, en vuxen person måste alltid övervaka. Tänk på att ojämn mark kan orsaka att gåstolen välter eller rullar iväg. Försök att förutse olycksrisker såväl i inomhusmiljö som utomhus.



Ta med i bil / Fäll ihop



Meywalk 2000 kan delas i två delar. Dra upp sittenheten som sitter fästad på de två vertikala rören ur den nedre chassidelen. Tänk på att fjädrarna kan följa med och ramla ur. Överdelen får inte placeras i nedre chassit om inte fjädrarna sticker upp, se bild.



Skötsel / Underhåll

Runt hjul samlas mycket damm och hår, skruva av hjulen och ta bort smuts och damm regelbundet eller när gästolen rullar trögt. Kontrollera alltid att hjulen sitter fast och att bålstöds-och sadelhöjd är placerad på rätt höjd för användaren. Använd aldrig en skadad eller defekt produkt. Tvätta ren gästolen med mjuk, fuktig trasa och milda rengöringsmedel t ex diskmedel. Kontrollera alltid att bromsar fungerar efter tvätt! Förvara gästolen inomhus.

Mer information hittar du på www.maydayaid.se