



Miniwalk stl 1

Miniwalk stl 2

Rekonditioneringsanvisning för gästolarna: Meywalk Miniwalk storlek 1 och storlek 2

Observera!

Gästolarnas utseende kan variera beroende på modell, storlek och tillbehör. På nedre ramen, vid bakhjulet sitter en etikett med benämning och serienummer.

Gästolens olika delar



*

Se Lathund på www.maydayaid.se/meywalk,-gastol.aspx för att avgöra dvs mäta storleken på bålstödsringen.

Rengöring av gästolen i hemmiljö

Tvätta av gästolen med rengöringsmedel, använd ett rengöringsmedel utan slipmedel. Torka av med torr trasa. Vid behov kan också desinfektionsprit användas.

Använd ej scotchsvamp eller andra hårda material som kan skrapa sönder lacken.

Använd gärna dagligen tryckluft för att få bort grus och damm från gästolen. Högtryckstvätt skall inte användas direkt på hjullager.

Rengöring av gästol på hjälpmedelscentral

Tvättkabinett:

Meywalk Miniwalk kan rengöras i tvättkabinett med program innehållande tvätt i 60°C under 3 min och tvätt i 90°C under 1 min med en normal tvättcykel på ca 25 - 45 minuter.

Eftertorka gästolen genom att dela /lyfta av sitheten och placera de öppna rörändarna neråt så att avrinning sker. Montera ihop gästolen

Miniwalks fjäder sitter placerad i nedre sidorören på chassiramen. Se bruksanvisningen om fjäder behöver bytas.

Rekonditioneringsanvisning för gästolarna: Meywalk Miniwalk storlek 1 och storlek 2

Byte av skumrör

Byte av skumrör på bålstödsring, handtagsbygel och rumpstopp på Meywalk Miniwalk.

Allt skadat och torkat skumrör skall bytas ut mot nytt, se reservdelar för respektive storlek och modell.

Montera av respektive del från gästolen.

Avlägsna alla gamla rester. Använd tryckluft för att trycka på det nya skumröret. Talk på insidan av skumröret kan underlätta vid byte.

För att undvika hårt slitage på skumröret på bålstödsringen, rekommenderar vi att montera på konstläderöverdrag till bålstödsringen, se tillbehör på www.maydayaid.se.



Byt ut

Delar som har spruckit, fått rostskador eller skadats skall omedelbart bytas ut, originaldelar skall alltid användas. Önskar man bättre på med samma färg som på gästolsramen kan detta beställas.

På ramen skall det finnas en etikett med följande information:

*Denna produkt säljs i Sverige genom
Mayday Aid AB
Arendalsvägen 35
434 39 KUNGSBACKA*

Gör rent länkhjulen:

Runt länkhjulen samlas mycket damm, hår mm.

Smutsen gör rullstolen trög att köra.

Tänk på att ta bort/ rengöra länkhjulen ofta.

Gör så här:

Skruva av länkhjulen från gaffel. Borsta rent. Montera tillbaka hjulet.

Kontrollera att hjulet rullar lätt framåt.

Kontrollera att framhjulet kan rotera runt sin axel.



Kontrollera innan användning att:

- Tippstöden fungerar och är rätt placerade i höjd.
- Fram och bakhjulen rullar lätt.
- Hjulen inte är sönder eller slitna.
- Gästolen rullar rakt då den skjuts framåt.
- Parkringsbromsarna fungerar.
- Bålstödsringen kan öppnas och stängas.

