

Produktinfo och Bruksanvisning **Förstoringslampa 1,75X/3D** **Loop LED XL**



En slimmad och enkel förstoringslampa för bordsmontage med optik 1,75 ggr förstoring/3 dioptrier med en diameter på 12 cm (art nr **55662**). Integrerat skyddslock. Högeffektiva LED-ljuskällor som ger ett jämnt dagsljus – 6500K. Förbrukar endast 8W

Armens längd från bordfäste till lamphusets ställskruv 91 cm.
Lamphusets längd från ställskruv 29 cm, total längd 120 cm.

Extra linser 4D och 6D med silikonram finns som tillbehör
(art nr **55593**)

Längd sladd 1,5 meter. Vikt exklusive förpackning 2,5 kg
(förpackning 2,9 kg)

VARNING

Rikta aldrig ljuset mot ögonen

När du har använt förstöringslampan så fäller du ned skyddslocket. Montera inte förstöringslampan i solljus. Optiken kan då i värsta fall åstadkomma bränder.

Montering

I förpackning finner du ett bordsfäste. Se till att det skruvas fast ordentligt och att det sitter stabilt. Var försiktig när du lyfter ur armaturen ur förpackningen. Fjädern är kraftig och expanderar. Ta bort skyddsplasten som omger arm och lamphuvud. Montera armpinnen i bordsfästet.

OBS. Säkerställ att förpackningsmaterial sorteras i återvinning. Vid eventuell återvinning av armaturen lämnas den till återvinningsstation alternativt återsänds till Iris Hjälpmedel.

Produkten är CE-märkt.