

## Manual Diana "svart" Touch - 51146

### Svensktalande armbandsur



Armbandsuret Diana Svart Touch är ett svensktalande ur utan visare. Diana kan återge dag och tid analogt samt med dygnsbestämning ("Måndag, fem i halv tre på eftermiddagen") eller digitalt utan dygnsbestämning ("Måndag, fjorton och tjugofem"). Vid tryck på talknapp, eller att lägga fingret mitt på frontglaset, anges först dag vilket indikerar att tid kommer.

Starta talet genom att hålla TALKNAPPEN nedtryckt alternativt hålla fingret på frontglaset i ca 2 – 3 sekunder. Två korta ljudsignaler indikerar att talfunktionen är igång. För att stänga av talet upprepas samma procedur i ca 5 sekunder med en kort signalbekräftelse. Aktivera talet för att ställa uret alternativt att få tiden uppläst.

Tryck med ett spetsigt föremål (till exempel penna, gem) på den infällda knappen för DAG på boettens sida vid klockan 10 (se skiss). Stega fram tills rätt dag programmerats. STÄLL TIMME genom att göra likadant på den infällda knappen vid klockan 8 (se skiss). STÄLL MINUT med den infällda knappen vid klockan 4 (se skiss).

Du skiftar mellan digital och analog tidsangivelse genom att bläddra förbi 00:00 med Ställ Timme. Diana låser sig automatiskt efter ca 5 sekunder eller när du trycker på talknappen alternativt lägger fingret på frontglaset.

Diana kan även ange tiden på norska, danska, finska och polska. Tryck ned ställknappen DAG/SPRÅK i ca 5 sekunder. Därefter stega fram till önskat språk. Lås genom att trycka på TALKNAPPEN eller lägga fingret mitt på frontglaset. Alternativt ställs klockan på ett språk och kan sedan växlas över till ett annat språk där gjorda inställningarna följer med.

Intervall för dygnsangivelse i enlighet med SMHI:s intervall:

Morgon	06:00 – 09:00
Förmiddag	09:00 – 12:00
Eftermiddag	12:00 – 18:00
Kväll	18:00 – 23:00
Natt	23:00 – 06:00

## VIKTIGT ATT VETA

Om inte Diana pratar har du antingen stängt av talet av misstag eller så behöver du byta batteri. Prova alltid först att aktivera talet igen.

När batteriet börjar att bli svagt kan ljudet bli lite skorrande eller så anges bara delar av talet. Batteribyte sker med fördel hos vanliga urmakare med standardbatteri (CR2025). Ett kvalitetsbatteri håller i 6 till 18 månader beroende på hur ofta du aktiverar talet. En instruktionsvideo för urmakare på batteribyte finns på vår hemsida.

Diana gillar inte fukt och salt. Ta av dig uret om du till exempel diskar, duschar eller sportar. Det finns två hål på baksidan som är högtalare.

Uret är behandlat mot nickelallergi och läderarmbandet är fritt från latex. Armbandet kan enkelt bytas mot andra armband på marknaden.

Garanti under ett år. Gäller dock inte för förbrukat batteri, fuktskador eller åverkan i samband med batteribyte.

Armbandsuren Diana är CE-märkta och godkända som medicinsktekniska hjälpmedel.