

Manual termometer MyDegrees



Svensktalande termometer för inom- och utomhustemperatur med display med tydliga siffror på grön bakgrund, stora taktila knappar och taktil märkning. Utomhusgivaren är trådlös

Tillbehör mat/vätsketermometer

Produkten är CE-märkt medicinsktekniskt hjälpmedel

Art nr 55113

Förpackningens innehåll;

Termometerenhet (klarar -29 - +240 grader Celsius)

Utomhusenhet

Självhäftande kardborrefästen för väggmontering

Batterier för inom- och utomhusenheten, 3 + 3 stycken AA-batterier

Tillbehör;

Givare för matlagning (s.k. mättermometer), art nr 55113-01

Termometern fysiska egenskaper;

Framsida. Högst upp finns en display med stora tydliga svarta siffror på grön bakgrund. När termometern rapporterar är displayen upplyst. I annat fall släckt. Nedanför displayfönstret finns två stora knappar vertikalt. Den övre är röd med taktillmärkning till höger om knappen. Den är bland annat till för att avläsa yttertemperatur. Knappen nedanför är vit med taktillmärkning till höger om knappen. Den är bland annat till för att avläsa innertemperatur.

MyDegree rapporterar temperatur på svenska men kan också ställas om till de flesta stora nordiska och europeiska språk. Termometerns mäter från -29 till +240 grader Celsius. Det senare viktigt då man nyttjar givaren för matlagning (tillbehör).



Höger långsida. Här sitter en ratt för volym.



Vänster långsida. Här finns två uttag varav det övre är till för att ansluta tillbehöret mattermometer (art nr 55113-01).



Baksida. Överst finns ett hål för att kunna hänga enheten på en skruv eller tavelspik. Överst till vänster finns två knappar, en mindre och en större. Den mindre är till för att ställa språk och den större för att para utomhusenheten då den är trådlös. I mitten finns en karborrehona för eventuell montering på vägg eller list med kardborre. Självhäftande kardborrehane finns i förpackningen. Längst ned finner du batteriluckan med plats för tre AA-batterier.



Utomhusgivare

På baksidan sitter batteriluckan med plats för tre AA-batterier. Här finns även ett kardborrefäste eller ett hål att hänga givaren på. Givaren kan sitta mellan 20 – 25 meter från termometern beroende på hur fritt läge som erbjuds (dvs hindrande väggar och dörrar).



Gör så här;

- Sätt batterierna i termometern. Fjädern ska sitta mot batteriets minuspol.
- Tryck och håll inne den röda (översta) knappen på framsidan. Använd en penna eller spetsigt föremål för att trycka på språkknappen EN gång. Släpp nu den röda knappen och stega sedan fram till rätt språk. Spara genom att trycka ned den vita knappen en gång eller lägg termometern åt sidan en halv minut så låser valt språk och kvarstår till dess det eventuellt ändras.
- Sätt i batterierna i den trådlösa givaren. Lägg termometer och givaren en meter från varandra. Tryck in den större vita knappen på termometers baksida till dess du hör en signal. Släpp då knappen. En blinkande symbol i displayen visar att parning pågår. Det kan ta 3 till 5 minuter innan enheterna parats. Du kan prova genom att trycka på den

översta röda knappen. Om enheten är parad läser den upp temperatur. Om inte så hör du en signal. Gör då om parningen.

Montering av enheterna

- Fäst huvudenheten på till exempel väggen eller på kylskåpsdörren. Använd kardborrefästet, tavelspik eller magnetfästet. Den kan också ligga ned på ett bord. Undvik att sätta/lägga den i närheten av ett element, i solljuset eller någon annan värmekälla. Då kan den ange felaktig innetemperatur.
- Fäst utomhusenheten på ytterväggen eller under ett fönster för att minimera strålvärme från fönster. Undvik i direkt solljus eller i närheten av någon värmekälla. Utomhussensorn behöver ca 1 timme på sig att kalibrera temperatur.

Stektermometer (tillbehör) art nr 55113



MyDegree fungerar också som mattermometer med den externa givaren som du har i ugnen eller i vätskor, varma eller kalla. Du kan även mäta andra typer av temperaturer med givaren. Känselkroppen är spetsig. Vid leverans har den ett

skydd i gummi. Kabeln är 1 meter lång och har värmetålig flätad metall.

Gör så här;

- Anslut kontakten till huvudenheten i det övre hålet på vänster sida.
- Den spetsiga delen, sensorn, ska till exempel sitta i mitten på en stek. Lyft in steken i ugnen och låt kabeln komma ut via luckan.
- För att ställa "matlagningsalarm" håller du inne den översta röda knappen på framsidan i ca 4 sekunder. Termometern säger "ställ in temperatur". Stega uppåt med den övre röda knappen eller nedåt med den undre vita knappen. Genom att hålla den ena eller den andra knappen nedtryckt som snabbändrar du.
- När den valda temperaturen är uppnådd väntar du ca 5 sekunder att termometern visar/talar om vald temperatur. Efter ytterligare 5 sekunder så startar mätning efter en signal.
- MyDegree rapporterar automatiskt 5 minuter innan programmerad temperatur är nådd samt varje minut därefter. 20 sekunder efter det att rätt temperatur är uppnådd så talar termometern om att allt är klart.

Denna termometer är godkänd som medicintekniskt hjälpmedelklass 1.

Andra talande produkter från oss och Talktech



- Talande armbandsur Diana, med eller utan urtavla, art nr 51142, 51143, 51144, 51145 och 41146.
- Talande fickuret MyTime, art nr 51086.
- Etikettläsningspennan Penny Talks, art nr 55084 och 55085.

Se vår hemsida på info och ljudprov

Lyssna till temperaturen

Bra för alla – nödvändigt för en del

