

# Artone 3 MAX

## Bluetooth-hörslinga



Art. nr. 276040

## Bruksanvisning

### Introduktion

Tack för att du har valt att köpa en Artone 3 MAX! Artone 3 MAX är en trådlös lyssningsenhet med inbyggd Bluetooth och är kompatibel med alla hörapparater med t-spole. Vänligen läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder produkten. **OBS! Vik/rulla/knyckla inte ihop halslingen, det kan orsaka brott och ogiltiggör garantin! Förvara ej heller enheten ihoprullad i fickan.**

### I förpackningen


- Artone 3 MAX
- USB-laddningskabel (80cm)

### Notera

1. **Musik** – Ljudkällan ska stödja Bluetooth A2DP.
2. **Mediakontroll** – Ljudkällan ska stödja Bluetooth AVRCP.
3. **Telefonanvändning** – Telefonen ska stödja Bluetooth HSP. (Headset profile) en del mobiltelefoner stödjer inte funktionen där man kan växla från musik till samtal.
4. **Datoranvändning** – Datorn ska stödja HSP. (Headset profile)
5. **TV** – för att möjliggöra lyssning från TV behövs tillbehöret TVB Streamer som överför ljud från enheter som inte är utrustade med egen Bluetooth-funktion.

### Översikt

1. Halslinga
2. Volym +
3. Mikrofon
4. Framåt/Nästa
5. Multifunktionsknapp/Spela/Paus
6. Volym -
7. Bakåt/Senast
8. Laddningsuttag (micro-USB)
9. LED-indikatorer

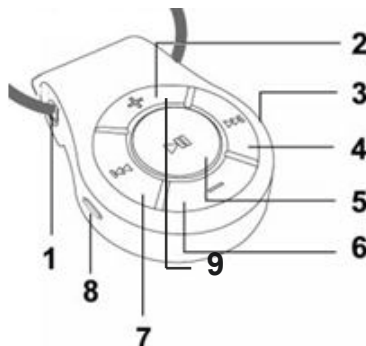

## Laddning

Artone 3 MAX har inbyggt uppladdningsbart batteri. Ladda batteriet fullt (ca 2-3 timmar) innan användning första gången. Lyssningstid vid fullt batteri ca 4-5 timmar, standbytid ca 150 timmar.

1. Anslut laddningskontakt till uttag (8) via en USB-laddare eller en dator. Vid laddning lyser en röd LED.
2. När headsetet är fulladdat slocknar den röda LED-indikatorn och en blå LED-indikator tänds. Tag bort laddaren från enheten. **OBS! Enheten bör underhållsladdas (ej ligga oladdad längre tid).**

### Batteri-indikation (9)

Röd LED blinkar: låg batterinivå

Röd LED lyser med fast sken: laddar

Blå LED lyser med fast sken: färdigladdad

Blå/Röd LED blinkar om vartannat: enheten är i parningsläge

## Användning

### Starta Artone 3 MAX

Starta genom att hålla ner ►► (5) tills den blå LED-indikatorn börjar blinka.

### Stänga av enhet

Tryck och håll in ►► (5) tills röda LED-indikatorn tänds, håll kvar tills den röda LED-indikatorn slocknar.

### Anslut Artone 3 MAX med annan Bluetooth-enhet, t ex mobiltelefon

Enheterna bör vara max 1m från varandra.

1. Se till att Artone 3 MAX är fulladdad och i avstängt läge.
2. Tryck på ►► (5) tills LED-indikatorn blinkar blått och rött (ca sju sek).
3. Nu är Artone 3 MAX i parningsläge.
4. Aktivera Bluetooth på ex mobiltelefonen och sök ny enhet.
5. Välj Artone 3 MAX i listan för parkopplade enheter.
6. Om det begärs inloggningskod, tryck 0000.
7. Notera: Om LED-lampan blinkar rött på Artone 3 MAX betyder det att det finns en enhet inom räckvidden som är ihopkopplad med Artone 3 MAX, men som inte är påslagen alternativt att Bluetooth-funktionen är inaktiverad på den.

### Svara på eller avsluta ett samtal

Tryck på ►► (5) på Artone 3 MAX.

### Avvisa inkommande samtal

Tryck och håll in (ca sju sek) på ►► (5) på Artone 3 MAX.

### Återuppringning av senaste telefonsamtal

Tryck två gånger på ►► (5) när enheten är i standbyläge. Ett "beep" hörs i hörapparaten om den kopplat upp.

### Röstuppringning

Håll ner ►► (5) i två sekunder för att aktivera funktionen, när enheten är i standby-läge.

### Musikfunktionen

Spela/Paus: I standby-läge. Tryck kort på ►► (5) för att aktivera musik, tryck igen för att göra paus.

Framåt / Nästa: Tryck kort på ►► (4)

Volym+/-: Tryck kort på +/- -knapparna

### Dubbel anslutning

Artone 3 MAX kan ha två Bluetooth-enheter anslutna samtidigt.

1. Anslut en andra enhet på samma sätt som ovan. När du anslutit den andra enheten så har den första blivit nedkopplad.
2. Anslut den första på nytt till Artone 3 MAX.

OBS! Återuppringning fungerar endast på den först anslutna telefonen.

## Felsökning

Om det inte går att ansluta Artone 3 MAX till din enhet, prova med följande:

- Kontrollera att Artone 3 MAX är påslagen och laddad.
- Kontrollera att Artone 3 MAX är i parningsläge när ni försöker ansluta till mobilen.
- Kontrollera att Bluetooth-enheten är parat med Artone 3 MAX.
- Kontrollera att din enhet har Bluetooth-koppling, se enhetens manual för instruktion.
- Se till att Artone 3 MAX är inom högst 10 meter från Bluetooth-enheten och att det inte finns några hinder som väggar eller andra elektroniska enheter.
- För att återställa Artone 3 MAX, anslut laddningskabeln till laddningsporten på enheten i 3-5 sekunder och koppla bort den. Detta återställer enheten.
- Om du upplever att ljudet är dåligt/skrapar kan det bero på att Artone 3 MAX är inställd på för hög förstärkning. Vi rekommenderar att ställa in maxvolym på ansluten enhet och dämpa volymen i Artone 3 MAX för att undvika missljud. Detta gäller också för mikrofonljudet.

## Underhåll och skötsel

- **OBS! Vik/rulla/knyckla inte ihop halsslingan, det kan orsaka brott och ogiltiggör garantin! Förvara ej heller enheten ihoprullad i fickan.**
- Undvik att bära halsslingan direkt mot kroppen, då svett m.m. kan ha negativ påverkan på halsslingan.
- Försök inte öppna höljet eller ta ut batteriet.
- Tappa den inte från höga höjder och placera inga tunga objekt på den.
- Utsätt den inte för fukt, vatten/andra vätskor eller värme/starkt solljus.
- Rengör produktens ytor med en mjuk, luddfri trasa. Använd aldrig rengöringsmedel eller lösningsmedel.

## Säkerhetsföreskrifter/garanti

Vänligen kontakta försäljningsstället om produkten trots ovanstående åtgärder inte fungerar. Observera att produktgarantin inte omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering eller underhåll. Använd inte produkten med annan nätadapter än den som levereras med produkten.

## Service

Om produkten, trots felsökning i enlighet med bruksanvisningen, inte fungerar skall den lämnas till försäljningsstället.

Produkt som är köpt direkt av Bo Edin AB skall sändas med företagspaket eller motsvarande till: Bo Edin AB, Förrådsvägen 2B, 181 41 Lidingö.

## Miljö och återvinning



Släng förbrukade batterier/produkt enligt gällande miljöföreskrifter.



Bo Edin AB är anslutna till FTI (fd REPA) och El-kretsen.

Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.

## Tekniska data

Bluetooth version:	Trådlös Bluetooth teknologi v.4.2
Storlek (LxBxH):	32x45x17mm, hals slinga längd 70cm
Vikt:	20g
Batteri:	Li-ion polymer 120mAh
Laddningstid:	2~3 timmar
Användningstid:	5-6 timmar
Standby-tid:	130-150 timmar
Räckvidd:	Inomhus ~5 meter / Utomhus ~10 meter
Frekvens:	2,4 ~2,4835 GHz ISM band
Bluetooth-profiler:	Stöd för A2DP, AVRCP och HS/HF
Anslutning:	Point to point, stöd för dubbel anslutning



Bo Edin AB  
Besöksadress

Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö  
Förrådsvägen 2B, 181 41 Lidingö

Tel: 08 7671818  
@univox.by.edin

Email: info@edin.se  
Webb: www.edin.se