

**Benpåse**  
Conveen Security+  
Simpla Plus  
Simpla Profile

**Fixeringsband**  
Conveen®  
Simpla



**Bruksanvisning**

23314063 Version 1  
Coloplasts logotyp är ett registrerat varumärke som tillhör Coloplast A/S. Med ensamrätt. © [2013-06]

**Miljöfakta**  
Coloplast fabriker i Danmark, Ungern och Kina är miljöcertifierade enligt den internationella standarden SS/EN/ISO 4001. Övriga fabriker kommer successivt att bli certifierade. Coloplast AB är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA. Produkt: Efter användning rekommenderar vi att produkten går till sophöbörbränning med energutvinning. Förpackning: Sortera och lämna till förpackningsinsamling. Allt material i Coloplast förpackningar kan återvinnas.

**Indikation**  
Urinuppsamlingspåse

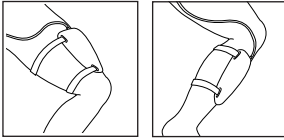
**Information**  
Coloplast tar inget ansvar för eventuella skador eller förluster som kan uppstå om produkten används på ett sätt som står i strid med Coloplasts aktuella rekommendationer.

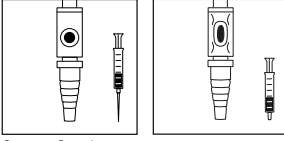
**Försiktighet!**  
Använd inte produkten om förpackningen är skadad.

**Varning**  
Återanvändning av denna engångsprodukt utgör en potentiell risk för användaren. Ombearbetning, tvättning, desinficering och sterilisering äventyrar produktens egenskaper, vilket utsätter patienten för en ökad risk för fysiska skador eller infektion.

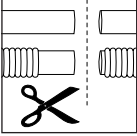
**Bruksanvisning för Coloplasts bempåse med fixeringsband från Coloplast**

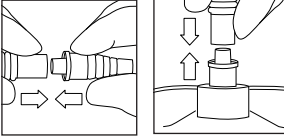
**Förberedelser**

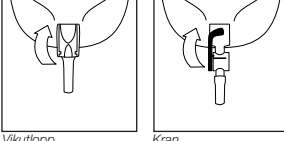
- 

1. Bempåsen har en inlopps slang som kan vara separat eller fäst vid påsen. Slangens längd avgör var påsen kan fästas på benet.
- 

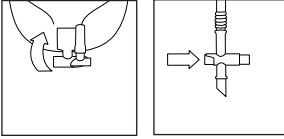
2. Om påsen har en provtagningsport kan urinprov tas vid behov.  
Använd en spruta med eller utan nål, beroende på behov.

Conveen Security+      Conveen Security+  
Simpla Profile
- 

3. Om slangen saknar inloppsanslutning, eller om själva slangen inte redan är fäst vid påsen, så kan slangen kapas till önskvärd längd. Klipp helt enkelt av slangen med en sax.  
När du klipper av en veckad slang ska du lämna kvar så mycket av den släta delen som möjligt. Det gör att anslutningen mellan slangen och kopplingen blir säkrare då kopplingen monteras.
- 

4. Sätt fast konnektorn på slangen genom att trycka och samtidigt vrida in den smala änden av konnektorn så långt in som möjligt i slangen.  
För anslutning av slang till påse, tryck och vrid in den avklippta änden av slangen in i påsens inloppskoppling.
- 

5. Kontrollera att utloppsventilen är stängd.

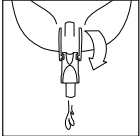
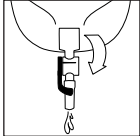
Vikutlopp Conveen Security+      Kran Conveen Security+  
Simpla Profile
- 

6. Fäst fixeringsbanden på påsen. Sätt fast påsen på benet. Om fixeringsbanden är för långa kan du klippa av dem till önskad längd.  
*Conveen/Simpla fixeringsband med silikon*  
Använd det längre fixeringsbandet till påsens överdel. Om påsen ska fästas vid vaden ska du vira det övre fixeringsbandet i åttaturer bakom och över knät.

2-stegsutlopp      Kran med skjutreglage

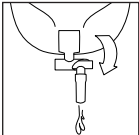
## Användning

7. Avlägsna skyddshatten om kopplingen är försedd med en sådan.
- 
- 
- Anslut kopplingen ordentligt till urindroppssamlaren eller katetern. Urinuppsamlingssystemet kan nu användas.

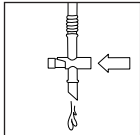
8. Vi rekommenderar att påsen töms då den är något mer än halvfull för att dräneringen ska bli optimal.
- 
- 
- Hävertpåsen Simpla Plus*  
Rikta den förlängda utloppsslangen mot toalettstolen. Försäkra dig om att utloppskranen befinner sig i en lägre position än urinpåsen. Tryck på påsen för att starta urinflödet.

Vikutlopp  
Conveen Security+

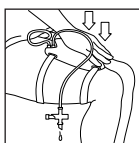
Kran  
Conveen Security+  
Simpla Profile



2-stegsutlopp



Kran med skjutreglage

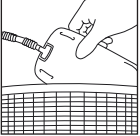


## Borttagning

9. Koppla bort påsen från urindroppssamlaren eller katetern.

Lossa fixeringsbanden och ta bort påsen från benet.

## Avfallshantering

10. Byt påse enligt gällande riktlinjer och rekommendationer.
- 
- Fixeringsbanden kan återanvändas.
- Töm påsen innan den kasseras.
- Påsen är endast avsedd för engångsbruk och ska kastas i hushållsavfallet.
- Spola inte ned produkten i toaletten.

## Symboler



Använd inte produkten om förpackningen är skadad.