

Hydrofil kateter, klar att använda.
Kvinna/ Man



Bruksanvisning

23315403 Version 4

Coloplasts logotyp är ett registrerat varumärke som tillhör Coloplast A/S. Med ensamrätt. © [2014-01-22]

Miljöfakta

Coloplast fabriker i Danmark, Ungern och Kina är miljöcertifierade enligt den internationella standarden SS/EN/ISO 4001. Övriga fabriker kommer successivt att bli certifierade. Coloplast AB är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA.

Produkt: Efter användning rekommenderar vi att produkten går till söpförbränning med energutvinning.

Förpackning: Sortera och lämna till förpackningsinsamling.

Allt material i Coloplast förpackningar kan återvinnas.

Indikation

Tappningskateter för intermittent kateterisering.

Information

Coloplast tar inget ansvar för eventuella skador eller förluster som kan uppstå om produkten används på ett sätt som står i strid med Coloplasts aktuella rekommendationer.

Katetern kan utsättas för extrema temperaturer (under 0 °C och upp till 60 °C) i upp till ett dygn utan att ta skada.

Katetern kan ligga hoprullad i upp till tre timmar utan att påverkas.

Den vätska som katetern ligger i är ofarlig. Vätskan kan dock orsaka fläckar.

Kateteriseringen ska ske så snart som möjligt efter att förpackningen har öppnats.

Katetern ska alltid avlägsnas så fort urinblåsan har tömts.

Försiktighet

Använd inte produkten om förpackningen är skadad.

Kontakta vårdpersonal innan du utför självkateterisering för första gången.

Kontakta vårdpersonal om du:

- får symptom som feber, obehag vid blåstömning, överaktiv blåsa eller blod i urinen.

Varning

Återanvändning av denna engångsprodukt utgör en potentiell risk för användaren.

Ombearbetning, tvättning, desinficering och sterilisering äventyrar produktens

egenskaper, vilket utsätter patienten för en ökad risk för fysiska skador eller infektion.

Bruksanvisning för SpeediCath Standard


Hydrofil tappningskateter som är klar att använda direkt.

Coloplast tappningskateter, SpeediCath Standard, består av en klar att använda, hydrofil och pvc-fri tappningskateter som levereras förpackad i koksaltlösning.

Börja med att tvätta händerna och området runt urinrörets mynning. Det är viktigt att undvika överföring av bakterier från händerna till tappningskatetern.

Förpackningen innehåller den hydrofila katetern placerad i en koksaltlösning. Se till att du är helt redo att utföra kateteriseringen innan du öppnar kateterförpackningen.

Om katetern har förvarats stående ska den läggas ner för att se till att koksaltlösningen fördelas jämnt, så att den blöter hela kateterns ytbeläggning. Detta ger en optimal glidförmåga.

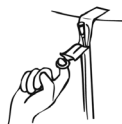

Använd klisteretiketten på förpackningens baksida för att fästa förpackningen på en glatt, jämn och torr horisontell yta. Öppna förpackningen genom att dra ringen mot dig och sedan neråt. Ta ut SpeediCath Standard -katetern som är klar att användas direkt.

Män



Håll upp penis med ena handen för att rätta ut urinröret. För in katetern i urinröret ca 2 cm i taget med den andra handen. Strax innan katetern når urinblåsan kan det hända att blåsans slutmuskel ger upphov till ett visst motstånd. Kläm inte ihop penis eftersom det kan försvåra införandet av katetern.

Gäller enbart katetrar med Tiemann-spets (böjd spets):

Se till att kateterns böjda spets pekar uppåt innan införandet påbörjas. Tiemann-indikator (den förhöjda markeringen) på konnektorn är avsedd att underlätta korrekt införande av katetern. När katetern hålls horisontellt med indikator vänd uppåt pekar kateterspetsen också uppåt.

Kvinnor



Sära på blygdläpparna med ena handen för att frilägga urinrörets mynning. För försiktigt in katetern i urinröret med den andra handen, ca 2 cm i taget. Strax innan katetern når urinblåsan kan det hända att blåsans slutmuskel ger upphov till ett visst motstånd.

Fortsätt föra in katetern i urinröret tills urinflödet börjar. Om det inte finns någon toalett i närheten kan en urinpåse eller en förlängnings slang kopplas till katetern.

Dra försiktigt ut katetern 2–3 cm när urinflödet upphör. Vänta i några sekunder om urinflödet åter börjar innan du försiktigt drar ut katetern ytterligare 1–2 cm.

Dra långsamt ut katetern när urinblåsan är fullständigt tömd.

Produkten är endast avsedd för engångsbruk och ska kastas i hushållsavfallet. Spola in ner produkten i toaletten.

Symboler



Använd inte produkten om förpackningen är skadad.



Ej tillverkad av naturgummilatex