

Självhäftande urindropsamlare



Coloplast A/S  
Høttedam 1  
3050 Humlebaek  
Denmark

### Bruksanvisning 23314482 Version 1

Coloplasts logotyp är ett registrerat varumärke som tillhör Coloplast A/S. Med ensamrätt. © [2013-06]

### Miljöfakta

Coloplast fabriker i Danmark, Ungern och Kina är miljöcertifierade enligt den internationella standarden SS/EN/ISO 4001. Övriga fabriker kommer successivt att bli certifierade. Coloplast AB är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA.

**Produkt:** Efter användning rekommenderar vi att produkten går till sophförbränning med energiutvinning.

**Förpackning:** Sortera och lämna till förpackningsinsamling. Allt material i Coloplast förpackningar kan återvinnas.

### Indikation

Urindropsamlare för män. Urinuppsamling för män i kombination med en urinuppsamlingspåse.

### Information

Coloplast tar inget ansvar för eventuella skador eller förluster som kan uppstå om produkten används på ett sätt som står i strid med Coloplasts aktuella rekommendationer.

### Varning

Återanvändning av denna engångsprodukt utgör en potentiell risk för användaren. Ombearbetning, tvättning, desinficering och sterilisering äventyrar produktens egenskaper, vilket utsätter patienten för en ökad risk för fysiska skador eller infektion.


Klipp ner pubishåren vid behov.  
Tvätta och torka penis och det omgivande området.



1. Fatta tag i den nedre delen av förpackningen med ena handen och tryck upp den övre delen (1) med andra handens tumme för att öppna förpackningen (2).



2. Håll i överdelen av urindropsamlaren. Placera urindropsamlaren över ollonet, men se till att hålla ett avstånd på 1–2 cm mellan ollonet och utloppet. Dra i öglan på greppet med dubbel-strip med andra handen långsamt mot dig så att urindropsamlaren rullas ut följsamt och jämnt.

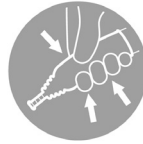

3. Krama försiktigt åt urindropsamlaren runt penis för att säkerställa vidhäftning. Någon ytterligare häfta behövs inte. Urindropsamlaren kan sitta på i ett dygn innan det är dags för byte. Urindropsamlaren får inte återanvändas.



4. Anslut urindropsamlaren till en urinpåse genom att ansluta påsens konnektor ordentligt till urindropsamlaren. Urindropsamlaren är försedd med räfflor på utloppet för ett säkert grepp och en konnektorring i änden av utloppet som gör det lätt att hålla i urindropsamlaren vid anslutningen till urinpåsen.



5. Avlägsnande: Lossa urindropsamlaren från urinpåsen och rulla av den försiktigt. Använd vid behov ljummet vatten för att underlätta avlägsnandet.

6. Den använda urindropsamlaren ska kastas i hushållsavfallet. Spola inte ned produkten i toaletten.