

Urindroppssamlare

Brett sortiment i många varianter

- PVC-fri
- Latexfri
- Sitter säkert
- Knickfri



Conveen® Security+

Urindroppssamlare

Funktionell och hudvänlig lösning

Urinläckage (inkontinens) kan ha olika omfattning; alltifrån några droppar till ofrivillig tömning av hela blåsan. En urindroppssamlare (uridom) ansluten till en urinuppsamlingspåse är en funktionell och bra lösning för män med urinläckage eller som har svårt att hinna till toaletten.

Huden kommer inte i kontakt med urin, som vid användning av absorberande skydd, så risken för hudirritation minskar och användaren slipper urinlukt.

Knickfri och självhäftande

Med Conveen Security+ självhäftande med applikator blir fixeringen enkel och hygienisk.

Urindroppssamlaren är knickfri, vilket säkerställer att urinen rinner fritt i alla lägen, även om den böjs.

Vid användning, placeras urindroppssamlaren över ollonet och rullas ut, applikatorn tas bort och urindroppssamlaren kramas till för att få ordentligt fäste runt penis.

Conveen Security+ kan sitta på i ett dygn, innan det är dags att byta.

Conveen® Security+	Omkrets mm	Diameter mm	Längd mm	Förp styck	Coloplast art nr
Självhäftande Standard med applikator	● 70	21	82	30	052210
	● 80	25	82	30	052250
	● 90	30	82	30	052300
	● 105	35	82	30	052350
	● 125	40	82	30	052400
Självhäftande Kort med applikator	● 70	21	50	30	220110
	● 80	25	50	30	220120
	● 90	30	50	30	220130
	● 105	35	50	30	220140
Med häftremsa (kombipack) Remsans mått: 120 x 17 mm	● 70	21	82	30	050210
	● 80	25	82	30	050250
	● 90	30	82	30	050300
	● 105	35	82	30	050350
	● 125	40	82	30	050400


Häftremsa

Conveen Security+ finns även med häftremsa. Häftremsan placeras runt penis mot penisroten och urindroppssamlaren rullas ut över det.

Användartips

Vid tvätt av penis, använd inte återfettande tvål för att säkerställa att urindroppssamlaren fäster ordentligt.

Det är viktigt att ha rätt storlek på urindroppssamlaren. Penis ska mätas vid penisroten i avslappnat tillstånd. Använd t ex Conveen mätsticka som kan beställas utan kostnad från Coloplast kundservice, tel 0300-332 99.

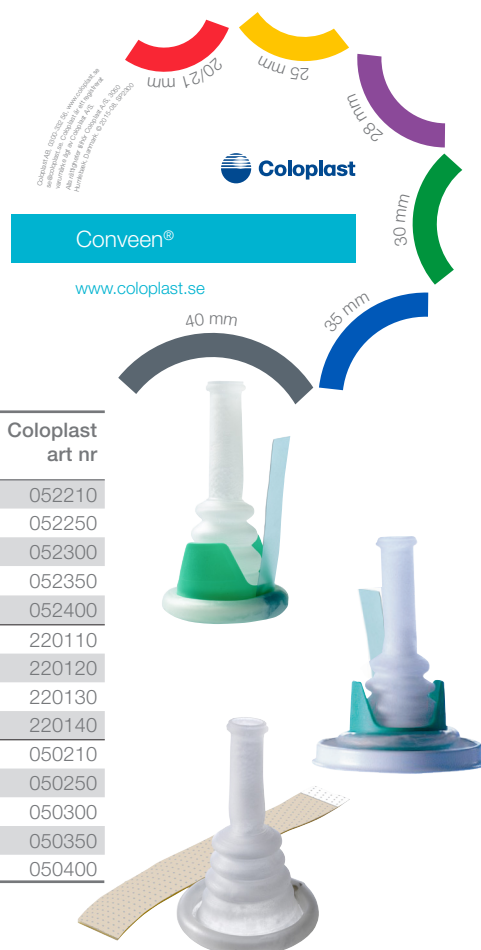

Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.
 Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till sopförbränning med energitvinnning



0543