

Vattenlavemang

För bättre tarmkontroll

- Komplet system
- Latexfri
- Säker
- Påsen kan stå på golvet

Peristeen®



Peristeen®

Vattenlavemang

Erkänd metod

Vattenlavemang är en erkänd metod för personer som främst lider av förstoppning, men även avföringsläckage. Metoden kallas också för tarmsköljning. Vid användning förs ljummet vatten in i ändtarmen genom en rektalkateter. Tarmsköljning skall göras först efter instruktion av läkare eller sjuksköterska.

Effektivt

Peristeen vattenlavemang är en av de mest effektivaste och bekväma metoderna att tömma tarmen på och förebygger även avföringsläckage och kronisk förstoppning. Effektiviteten är dokumenterad i en klinisk studie¹.

Två storlekar

Peristeen vattenlavemang finns i en standardstorlek för vuxna och i en mindre storlek för barn. Det mindre systemet är unikt och är i första hand utformat för barn över 3 år, men kan även användas av vuxna som tycker att standardsystemet har en för lång rektalkateter och/eller för stor ballong.

Skötsel

Rektalkatetern är för engångsbruk. Övriga delar kan rengöras med mild tvål och vatten. Vattenpåsen byts en gång per månad eller efter att ha använts ca 15 gånger. Kontrollenhet, pump och lock byts ut var 6:e månad.

Peristeen vattenlavemang	Innehåll styck	Förp styck	Coloplast art nr
System standard	1 kontrollenhet 2 rektalkatetrar standard 1 vattenpåse 2 fixeringsband	1	291210
Tillbehörsset standard	15 rektalkatetrar standard 1 vattenpåse	1	291220
Rektalkatetrar standard	10	10	291230
Fixeringsband	2	10	291240
Extraslang 120 cm	2	1	291250
System small	1 kontrollenhet 2 rektalkatetrar small 1 vattenpåse 2 fixeringsband	1	291260
Tillbehörsset small	15 rektalkatetrar small 1 vattenpåse	1	291270
Rektalkatetrar small	10	1	291280

¹ Christensen, P. et al 2006. A randomized, controlled trial of transanal irrigation versus conservative bowel management in spinalcord-injured patients, *Gastroenterology*, September 2006, volume 131, nr 3, 738-747.



Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.
Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till sophänsamlingsstation med energitvättning.



Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Urology Care

Coloplast AB, 0300-332 99, www.coloplast.se, mail@coloplast.com. Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2016-10. Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark. SP2501

