

Peristeen®

Analpropp

En unik problemlösare

- Latexfri
- Förhindrar avföringsläckage
- Ökad frihet
- Säker



Peristeen®

Analpropp

Vanligt problem



Avföringsinkontinens innebär nedsatt förmåga att hålla tätt för gaser och avföring och är ett relativt vanligt problem. Flertalet söker inte hjälp, utan försöker dölja sina problem med egna lösningar, men det behöver inte vara så.

Effektiv och unik problemlösare

Peristeen analpropp används vid avföringsinkontinens och hindrar avföringsläckage (även lös), lukt och hudirritationer. Vid användning vidgar sig analproppen och formar sig efter tarmväggen och sitter säkert på plats. Effektiviteten hos Peristeen analpropp är dokumenterad i kliniska studier*.

Material

Analproppen är tillverkad i ett mjukt skummateriale och har ett polyesterband ingjutet. Analproppen hålls sammanpressad av en vattenlöslig film som löses upp när den kommer i kontakt med fukt och värme ifrån tarmen. Peristeen analpropp hindrar läckage i 12 timmar. Den kan tryggt användas varje dag. Produkten är latexfri.

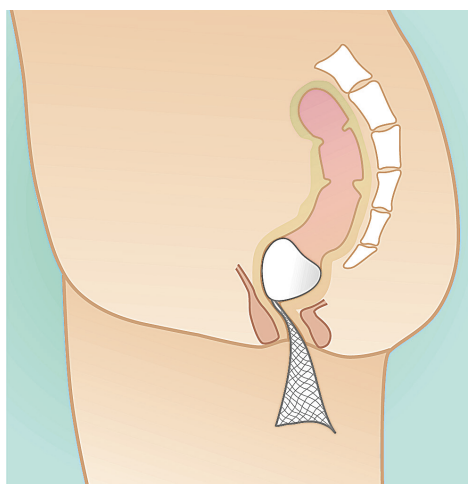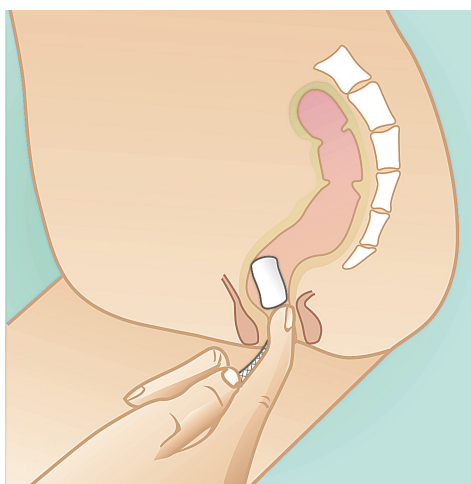

| Peristeen analpropp | Längd mm | Diameter mm | Diameter utvidgad mm | Förp styck | Coloplast art nr |
|---------------------|----------|-------------|----------------------|------------|------------------|
| | 26 | 12 | 37 | 20 | 014500 |
| | 26 | 13 | 45 | 20 | 014510 |

* W. Pfommer, A. M. Holschneider, N. Löffler, B. Schauff, B. M. Ure. A new Polyurethane Anal Plug in the Treatment of Incontinence after Anal Atresia repair (European Journal of Pediatric Surgery, October 2000;10, pp 186-190).

Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till sopförbränning med energitvinnning.



0543