


-Relax Duogel-

Relax Duogel är tillverkad och avsedd för att användas i alla på marknaden förekommande rullstolar. Denna manual skall användas för den Relaxdyna som erhållits. Om det är någon information i denna manual som är oklar eller om du behöver ytterligare hjälp, vänlig kontakta Salubrious AB. **Maxvikt brukare: 130 kg.**

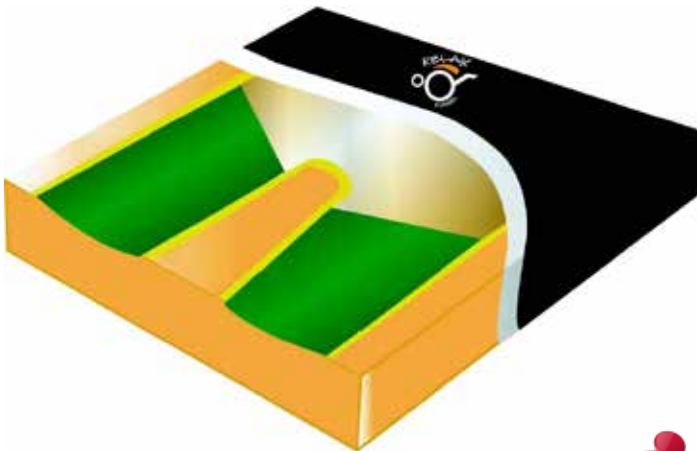

Innehållsförteckning:

Placering	2
Förvaring	2
Rengöring	3
Silikonrengöring	4


-Relax Duogel-

Placering:

Relax Duogel är uppmärkt på både dynstomme och överdrag för rätt placering.

För korrekt placering av Relax Duogel gör följande:

1. Hitta etiketten med texten "back" och en pil på överdraget. Dynstommens markeringar för rätt placering återfinns på produkten. (Dynan exkl. överdrag)
2. Placera dynan på sitsen så att öppningen på överdraget, där "back" och pil är markerade, hamnar bak på stolens/ rullstolens sittyta. Pilen skall peka uppåt. Viktigt att tänka på när du sätter på överdraget.
3. Nu är Din dyna klar att användas!

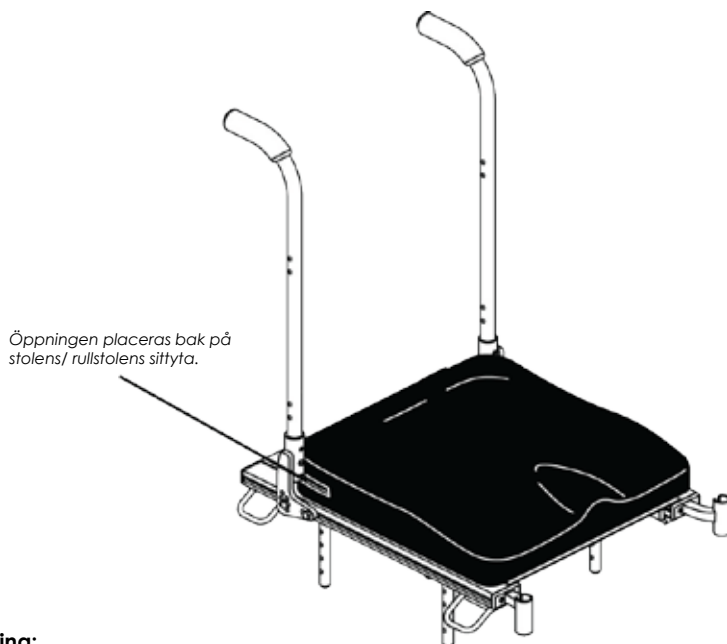

Förvaring:

Relax Duogel bör förvaras i rumstemperatur på en ren, torr plats och plant i sin låda när den inte används. Används dynan under extrema temperaturer (mindre än -20°C eller mer än +40°C), vänta då tills dynan återfått rumstemperatur innan användning.

-Relax Duogel-


Rengöring:

Överdrag:

1. Öppna överdraget och dra ut dynan. Används ett avtorkningsbart överdrag på Relax Duogel kan man torka av dynan med mild tvållösning eller desinfektionsmedel direkt på överdraget om så önskas.
2. Överdraget tvättas i maskin på 60°C. Hängtorka eller torka i torkskåp på **låg** temperatur, max 30°C. Använd ej blekmedel.

Dynstomme:

1. Rengör dynstommen (den inre plastfilmen) med mjuk fuktig trasa och utspädd tvållösning eller desinfektionsmedel. Använd inte rengöringsmedel med slipmedel eller starka kemikalier. Var noga med att torka bort alla tvålrester med rent vatten och ren trasa. Sänk aldrig ner dynan i vätska, detta skadar dynan (svår att få torr).
2. Låt dynan torka!
3. Sätt på överdraget på dynan när detta torkat helt, stäng dragkedjan. Observera att markeringen "bak" på dynstommen alltid ska vara åt samma håll som öppningen på överdraget.

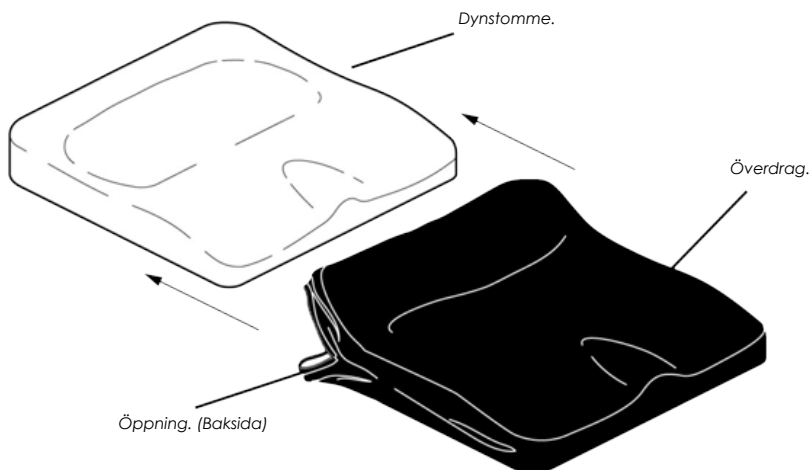



Salubrious AB har avtal med Rangells med avseende på elektroniskrot med mera. I övrigt hänvisar vi till gällande miljölagstiftning och de rutiner i de kommuner där produkten ska utgraderas. Gällande emballage så är vi anslutna till Reparegistrat för att minimera miljöpåverkan. Kartong återvinns som returkartong.


En kasserad dyna med överdrag slängs i behållare för brännbart avfall.

Silikonrengöring:

Relax Duogel innehåller silikonbaserad gel för att få maximal komfort etc. Gelet ligger inpackat i en gelpåse som i sin tur omges av absorberande skum. Utanpå finns ytterligare ett plasthölje och inkontinensöverdrag. Om silikongelen, mot all förmodan, lyckas komma igenom alla dessa barriärer gäller följande rengöring. (Det ska mycket till för att gelen ska komma ut genom alla barriärer.)

1. **OBS! Viktigt!** Begränsa snabbt området, undvik vidare spridning av silikongelet. Tänk på skor, rullstolshjul och själva rullstolen etc.
2. Använd ett fettlösningsmedel (företrädesvis **outspätt** YES diskmedel) och lätt fuktad trasa. Bearbeta ytan där läckaget har uppstått.
3. Eftertorka med torr alternativt lätt fuktad mikrofiberduk.
4. Vid behov, upprepa behandlingen tills önskat resultat är uppnått.
5. Eftertorka tills allt rengöringsmedel är borta.

För ytterligare information och vägledning, vänligen kontakta Salubrious AB!

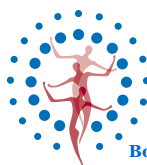

Salubrious

Good Medical

Box 5021 • 448 51 Tollerød • Sverige • växel: +46 (0)31-710 44 70 • fax: +46 (0)31-710 44 75
e-post: rehab@salubrious.se • hemsida: www.salubrious.se • webbshop: www.goodmedical.se