



Produktbeskrivning

Efemia kontinensstöd är ett återanvändbart hjälpmedel, avsedd att tillfälligt lindra urinläckage på grund av ansträngningsinkontinens hos kvinnor, genom att stödja urinröret via vaginalväggen. Efemia kontinensstöd är genom kliniska studier bevisad säker och effektiv. Efemia kontinensstöd kan återanvändas i tre månader vilket reducerar mängden avfall jämfört med engångs- eller fågångsprodukter.

Efemia kontinensstöd är designad för att säkerställa rätt vaginal placering utan andra hjälpmedel eller medicinsk personal. Kvinnan sköter själv utprovning av storlek i hemmet med ett startset.

Produktsortiment



- Startset innehåller de tre storlekarna 30 mm, 35 mm och 40 mm, art.nr 110409



- Efemia kontinensstöd 30 mm, art.nr 110107
- Efemia kontinensstöd 35 mm, art.nr 110207
- Efemia kontinensstöd 40 mm, art.nr 110307

Produktmaterial

Efemia kontinensstöd är formsprutad av medicinsk silikon, SILPURAN®. SILPURAN® är en ren silikon, det tillsätts inga ftalater, andra organiska mjukgörare, nitrosaminer, latex, växtproteiner, organiska stabilisatorer eller djurbaserade material.

SILPURAN® är testad för biokompatibilitet och uppfyller standarder för medicinsktekniska hjälpmedel, ISO 10993 och USP klass VI. Formsprutning av Efemia kontinensstöd görs utan bearbetning med kemikalier eller tillsatser.

Materialet är mjukt och flexibelt, men gör samtidigt produkten tillräckligt stabil för att stödja urinröret när buktrycket stiger. Egenskaperna hos silikon gör också produkten robust nog att motstå vaginal miljö, rengöring och återanvändning.

Användning

Placering: Intravaginalt

Användningstid/dag: 16 timmar

Återanvändningstid: 3 månader

Rengöring: Sköljs i vatten eller tvättas med tvål och vatten. Kan även kokas i 10 min.

Hur väljer man rätt storlek?

Efemia kontinensstöd finns i 3 storlekar och kvinnan provar själv ut vilken storlek som hon har bäst hjälp av. Alla 3 storlekarna finns i ett startset. Vald storlek kan användas i 3 månader.

När man vet rätt storlek!

Beställ singelpaket.

Förvaring

Inga särskilda förvaringsanvisningar

Hållbarhet för oanvänd produkt

> 24 månader