

# Promisemed®

## Verifine Blodlancett



Ditt självklara  
val för  
blodlancetter!

- **Säker och bekväm**

Sterilisering via gammastrålning  
3-fasad kanyl för bra blodflöde

- **Lösningen för alla**

Olika storlekar från 21,23,26,28 och 30G  
Passar nästan alla lancettprodukter

- **Prisvärd**

Pålitlig produkt till en låg kostnad



## Beställningsinformation


Katalog	Nålstorlek	Nållängd	Förpackningsstorlek	CE-märkt
PR-BL30	0.30mm	3mm	100	✓
PR-BL28	0.36mm	3mm	100	✓
PR-BL26	0.45mm	3mm	100	✓
PR-BL23	0.60mm	3mm	100	✓
PR-BL21	0.80mm	3mm	100	✓

## Testprocedur:

1. Skruva loss skyddet på lancettpennan.



2. Sätt in en steril lancett i lancettpennan.

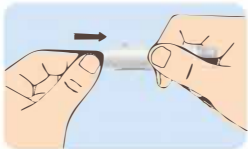

3. Håll lancetten stadigt i lancettpennan och vrid loss säkerhetsplasten tills den lossnar, dra sedan loss plasten från lancetten.



4. Skruva försiktigt tillbaka skyddet på lancettpennan.



5. Justera till önskat djup på lancettpennan.



6. Spänn hanen på lancettpennan.



7. Tryck på lancettpennan mot sidan av fingret med skyddet vilande mot fingret. Tryck på avtryckaren för att få provet.



8. Skruva loss skyddet på lancettpennan. Lägg plastbiten som används som skydd på ett hårt underlag och tryck försiktigt in nålen i plasten.



9. Tryck på pennans avtryckare, se till att lancetten har nålen framme. Skjut avtryckaren framåt för att lossa den använda lancetten. Sätt tillbaka skyddet på lancettpennan.

