


50x60cm/20"x24"

50x70cm/20"x28"



25x60cm/10"x24"

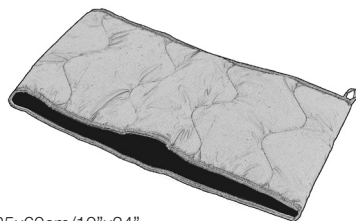

SWL: 300 kg/660lbs

EasySlide används för vändning i säng, överflyttning mellan säng och rullstol/toalett samt högre upp i säng.

EasySlide är utformad som en cylinderformad vadderad matta med ett friktionsreducerandematerial på insidan.

SystemRoMedic är en serie med olika modeller av förflyttningshjälpmedel. Valet av hjälpmedel styrs av förflyttningssituationen och brukarens funktioner och behov.



## Kontroll av funktion

### Visuell inspektion

Gör regelbundna funktionskontroller av hjälpmedlet. Kontrollera alltid efter tvätt. Kontrollera att sömmar och material är hela och fria från skador. Kontrollera om materialet är utsatt för nötning eller är blekt. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.



## Läs alltid manualen



Läs alltid manualerna för alla hjälpmedel som används vid en förflyttning.

Förvara manualen tillgänglig för användare av produkten.

Lämna inte brukaren under förflyttningmomentet.



## Test av friktion

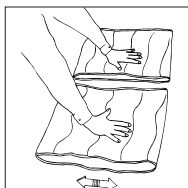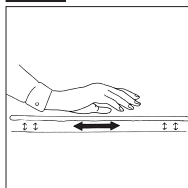

Testa EasySlides friktion genom att rulla den och var uppmärksam på hur lätt den glider. Om möjligt, jämför med en ny EasySlide.

## Placering av EasySlide

Placera EasySlide under halva stussen alternativt skuldran. Vid förflyttning lutas hela kroppstyngden över på glidmattan. Dra i nedre delen av glidmattan för borttagning.

## Användning av EasySlide




1

1. EasySlide kan med födel användas vid överflyttningar till och från rullstol. Komplettera gärna med en EasyGlide.



2

2. EasySlide kan användas under skuldrorna som ett friktionsreducerande hjälpmedel för att underlätta förflyttning högre upp isäng.

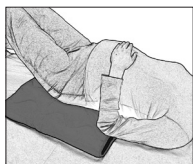

3

3. EasySlide kan användas under höfterna för att underlätta förflyttning i sidled.

Aktiva brukare kan själva använda EasySlide men används också av medhjälpare för mindre aktiva brukare.



4

4. Vid överflyttningar mellan säng/brits och duschvagn skall aldrig glappet vara större än 5 cm.

Obs!

Kom ihåg att alltid låsa hjulen.



5

5. Var försiktig och noggrann med att aldrig lämna EasySlide kvar under brukaren samt placera dem för nära kanten så de glider ner på golvet.

## Material:

Polyester, polyamid, microfiber

## Skötselråd:

Läs på märketiketten.



Använd inte sköljmedel.

Undvik torktumling för ökad livslängd.

Modell	Storlek	Skyddsfodral	Engångsskydd	Kombination
2010	50 x 60	2051	2055	2030 = 2020 + 2051
2015	25 x 60			
2020	50 x 60 (microfiber)	2051	2055	
2011	50 x 70	2052		
2021	50 x 70 (microfiber)	2052		

Vid frågor om produkten och dess användning, kontakta din lokala distributör. Se [www.handicare.com](http://www.handicare.com) för en komplett distributörsförteckning. Se till att du alltid har rätt version av manualen. Den senaste versionen finns att ladda ned från vår hemsida [www.handicare.com](http://www.handicare.com)

### Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8 -557 62 200

Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: [www.handicare.com](http://www.handicare.com)

E-mail: [info@handicare.se](mailto:info@handicare.se)

