

20x60 cm

20x50 cm



Max: 150 kg/330 lbs

FlexiMove används som stöd och hjälp vid olika förflyttningssituationer. Vanliga förflyttningssituationer där FlexiMove används är vid överflyttning, uppresning och högre upp i säng. FlexiMove är utformad med två olika handtagslängder för att möjliggöra en bra arbetsställning. Tillverkas i två material på innersidan; nylon och polyester. Nylon är ett antihalkmaterial som är lätt att ytdesinficera vid behov. Polyester är mjukt och behagligt mot kroppen,

SystemRoMedic är en serie med olika modeller av förflyttningshjälpmedel. Valet av hjälpmedel styrs av förflyttningssituationen och brukarens funktioner och behov.



Kontroll av funktion

Visuell inspektion

Gör regelbundna funktionskontroller av hjälpmedlet. Kontrollera alltid efter tvätt. Kontrollera att sömmar och material är hela och fria från skador. Kontrollera om materialet är utsatt för nötning eller är blekt. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.



Läs alltid manualen


Läs alltid manualerna för alla hjälpmedel som används vid en förflyttning.

Förvara manualen tillgänglig för användare av produkten.

Lämna inte brukaren under förflyttningmomentet.







Funktionstest av FlexiMove

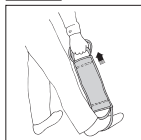

Funktionstesta FlexiMove regelbundet genom att trampa in en fot i ett handtag och sen dra i ett av handtagen på motsatt sida. Upprepa proceduren tills alla handtag är testade.

Användning av FlexiMove

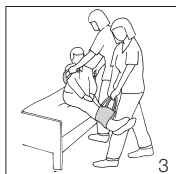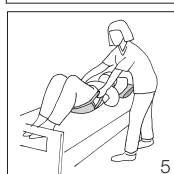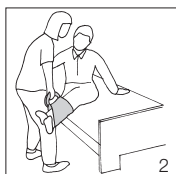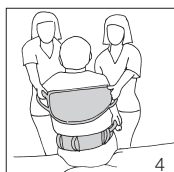

Överflyttning:

Vid en överflyttning mellan till exempel rullstol och säng bör även en EasyGlide och eventuellt ett EasyBelt/FlexiBelt användas (1).

Uppresning:

Vid uppresning kan FlexiMove användas till att föra benen över sängkanten (2) och sedan som stöd bakom ryggen/stussen (4).

Är brukaren i behov av två medhjälpare, hjälper den ena till med benen och den andra med överkroppen (3). Vid själva uppresningen arbetar medhjälparna på var sin sida och väljer det handtag som ger bäst arbetsställning (4).

Högre upp i säng:

För att hjälpa brukaren högre upp i säng används FlexiMove under stussen (5).

Det kan också vara lämpligt att använda ett friktionsreducerande hjälpmedel under skulderna, till exempel EasySlide (6).

Material:

Polyamid, nylon/polyester

Storlek:

3012	20 x 60 nylon
3020	20 x 50 polyester
3030	20 x 60 polyester

Skötselråd:

Läs på märketiketten



Använd inte sköljmedel. Undvik torktumling för optimal livslängd av materialet.

Vid frågor om produkten och dess användning, kontakta din lokala distributör. Se www.handicare.com för en komplett distributörsförteckning. Se till att du alltid har rätt version av manualen. Den senaste versionen finns att ladda ned från vår hemsida www.handicare.com

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWE DEN

Tel: +46 (0)8 -557 62 200

Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: www.handicare.com

E-mail: info@handicare.se

