

InkoGlid

Förflyttningshjälpmedel med handtag och absorption

EasyRoll systemet

glidlakan för alla tillfällen



- Glider friktionsfritt fram, nästan som att sväva
- Ergonomiska Handtag
- Liggyta av Bomull
- Absorberar
- Har spärrskikt



Ergonomiska Handtag
mönsterskydd 002161208-0001

Art.nr	Produkt	Storlek
<input type="checkbox"/>	10990 Systemet InkoGlid	Överdel: 90x180x120cm, Underdel: 180x140cm
<input type="checkbox"/>	10991 InkoGlid Standard	90x85cm
<input type="checkbox"/>	10992 InkoGlid Svävaren	90x180x120cm

Se instruktionsfilm på vår hemsida

Systemet InkoGlid 10990 - 4way SET

Övre delen(10992) och undre delen(4111SSU) bäddas med glidytorna mot varandra. För förflyttning av patient greppas handtagen som finns placerade efter långsidorna på överdelen, och patienten dras enkelt till avsedd valfri position på sängen. OBS! Produktens överdel har vingar som ska bäddas fast efter att patienten positionerats i önskat läge.

InkoGlid Standard 10991 - 2way

Glidet på InkoGlid 10991 är tvärs över sängen vilket ger 2vägs glid. Det underlättar vändning av liggande patient för vårdtagare.

InkoGlid Svävaren 10992 - 4way

Glidet på InkoGlid 10992 är längs med sängen vilket ger 4vägs glid när den bäddas på ett glidlakan.

OBS! Produkten har vingar som ska bäddas fast efter att patienten positionerats i önskat läge.

Fördelar med Handtagen:

- Avlastar fingrar och handleder
- Arbetar närmare patient
- Enormt tåliga

Material:

Liggyta: bomull
Absorbent: polyester/rayon
Spärrskikt: polyuretan (laminerad med absorbenten)
Glidtyg : duchesse (polyester) (belagd med Jersey för stabilitet)
Vingar : Polycotton

Tvättråd:

Kan tvättas ca. 100ggr
Tvättas i 60-90°C.
Kan torktumlas i max 70°C.
Ej sköljmedel(försämrar absorptionsförmågan)
Ej kemtvätt, ej blekmedel.

Vid avförings- eller blodfläckar , bör produkten snarast sköljas i kallt vatten.

Miljö:

Förbrukad produkt kan kastas i soporna. Den plast som ingår (polyuretan) bildar endast vattenånga vid förbränning.

