

Madrasskydd med Vätskespärr

Flergångs Madrassskydd med vätskespärr och liggyta av jersey



Art.nr	Produkt	Fixering	Strl. (cm)
<input type="checkbox"/> 200.200J01	Madrasskydd	Omstopp med resår	200 x 200
<input type="checkbox"/> 180.200J01	Madrasskydd	Omstopp med resår	180 x 200
<input type="checkbox"/> 160.200J01	Madrasskydd	Omstopp med resår	160 x 200
<input type="checkbox"/> 140.200J01	Madrasskydd	Omstopp med resår	140 x 200
<input type="checkbox"/> 120.200J01	Madrasskydd	Omstopp med resår	120 x 200
<input type="checkbox"/> 105.200J01	Madrasskydd	Omstopp med resår	105 x 200
<input type="checkbox"/> 90.200J01	Madrasskydd	Omstopp med resår	90 x 200

Madrasskydd med vätskespärr:

Protecta madrasskydd skyddar din madrass mot nedvätning vid t.ex. inkontinensbesvär, eller som kvalsterskydd, eller "bara" som allmänt skydd för madrassen/bäddmadrassen

Madrasskyddet har ett spärrskikt på undersidan som hindrar väta att tränga igenom samtidigt som det fungerar som en kvalsterbarriär.

Madrasskyddet har en liggyta av bomullsjersey. Spärrskiktet är av miljövänlig polyuretan som "andas" kroppsvärmen.

Material:

Liggyta av bomullsjersey
Vätskespärr av polyuretan som "andas" kroppsvärmen.

Tvättråd:

Kan tvättas ca. 100 ggr
Tvättas i 60-90°C.
Kan torktumlas i 60°C.
Ej sköljmedel
Ej kemtvätt, ej blekmedel.

Vid avförings- eller blodfläckar, bör produkten snarast sköljas i kallt vatten.

Miljö:

Förbrukad produkt kan kastas i soporna.
Den plast som ingår (polyuretan) bildar endast vattenånga vid förbränning.

