




Art.nr	Produkt	Sängbredd	Glidbredd	Längd	Total Storlek
<input type="checkbox"/> 418011	Glidlakan, mönstrade bäddflikar	80 cm	50 cm	100 cm	100 x 180 cm
<input type="checkbox"/> 418021	Glidlakan, mönstrade bäddflikar	80 cm	50 cm	140 cm	140 x 180 cm
<input type="checkbox"/> 418031	Glidlakan, mönstrade bäddflikar	80 cm	50 cm	200 cm	200 x 180 cm
<input type="checkbox"/> 419011	Glidlakan, mönstrade bäddflikar	90 cm	60 cm	100 cm	100 x 190 cm
<input type="checkbox"/> 419021	Glidlakan, mönstrade bäddflikar	90 cm	60 cm	140 cm	140 x 190 cm
<input type="checkbox"/> 419031	Glidlakan, mönstrade bäddflikar	90 cm	60 cm	200 cm	200 x 190 cm
<input type="checkbox"/> 4110511	Glidlakan, mönstrade bäddflikar	105 cm	75 cm	100 cm	100 x 205 cm
<input type="checkbox"/> 4110521	Glidlakan, mönstrade bäddflikar	105 cm	75 cm	140 cm	140 x 205 cm
<input type="checkbox"/> 4110531	Glidlakan, mönstrade bäddflikar	105 cm	75 cm	200 cm	200 x 205 cm
<input type="checkbox"/> 4112011	Glidlakan, mönstrade bäddflikar	120 cm	90 cm	100 cm	100 x 220 cm
<input type="checkbox"/> 4112021	Glidlakan, mönstrade bäddflikar	120 cm	90 cm	140 cm	140 x 220 cm
<input type="checkbox"/> 4112031	Glidlakan, mönstrade bäddflikar	120 cm	90 cm	200 cm	200 x 220 cm

EasyRoll Glidlakan


EasyRoll Glidlakan underlättar vändning i säng. Det bäddas som ett vanligt lakan direkt på sängen, dess bäddflikar bäddas in under madrassen för fixering. Lämplig för personer med nedsatt rörelseförmåga och/eller svår värk då det är ett stort stöd vid självvändning om man ligger direkt på lakanet. Alternativt används EasyRoll i kombination med ett draglakan eller ett dragglidlakan som ett arbetstekniskt hjälpmedel för vårdpersonal vid vändning/förflyttning av liggande vårdtagare.

Placering


EasyRoll Glidlakan placeras med glidytan uppåt och centreras mitt i sängen. De röda markerings sömmarna underlättar centreringen då de indikerar var glidlakanet ska vara placerat vid madrasskanterna. Vid sidorna av glidet finns textila sidopartier, bäddflikar, med högre friktion som bromsar upp vid vändning eller uppsittande vid sängkanten.

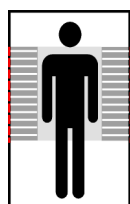


100x180
100x190
100x205
100x220

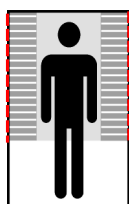

140x180
140x190
140x205
140x220

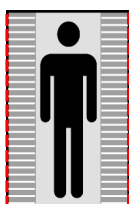

200x180
200x190
200x205
200x220

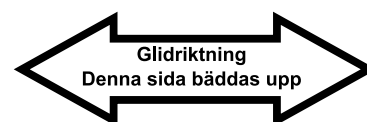

Alla våra standard glidlakan är märkta med glidriktningss pilar för lättare användning.

Röda markeringsränder gör det lättare att kontrollera att glidlakanet ligger rätt placerat

Material:

Glidyta: Duchesse (Polyester)
Bäddflikar: Bomull/Polyester

Tvättråd:

Tvättas före första användning.
Tvättas i max 90°C.
Ej Sköljmedel.
Torkning / tumling i max 70°C.
Hängtorkning rekommenderas för längre livslängd.
Strykning förbättrar glidförmågan ytterligare.

