

EasyRoll Svävaren

4-vägs, avlastning två nivåer

EasyRoll systemet

glidlakan för alla tillfällen



Art.nr	Produkt	Sängbredd	Total storlek överdel	Total Storlek underdel	EAN
<input type="checkbox"/> 4111	EasyRoll Svävaren	90 cm	140 x 210 cm	140 x 200 cm	
<input type="checkbox"/> 4111T	EasyRoll Svävaren, överdel	90 cm	140 x 210 cm		
<input type="checkbox"/> 4111B	EasyRoll Svävaren, underdel	90 cm		140 x 200 cm	
<input type="checkbox"/> 4112	EasyRoll Svävaren	105 cm	140 x 225 cm	140 x 215 cm	
<input type="checkbox"/> 4112T	EasyRoll Svävaren, överdel	105 cm	140 x 225 cm		
<input type="checkbox"/> 4112B	EasyRoll Svävaren, underdel	105 cm		140 x 215 cm	
<input type="checkbox"/> 4113	EasyRoll Svävaren	120 cm	140 x 240 cm	140 x 230 cm	
<input type="checkbox"/> 4113T	EasyRoll Svävaren, överdel	120 cm	140 x 240 cm		
<input type="checkbox"/> 4113B	EasyRoll Svävaren, underdel	120 cm		140 x 230 cm	

Material:

Glidyta: Duchesse (Polyester)
Bäddflikar/Liggyta: Bomull/Polyester
Handtag: Nylon



Parkvägen 5
913 34 Holmsund

Tel. 090-14 26 25
Fax. 090-13 64 52

E-post: info@protecta.nu

PROTECTA[®]
Medical AB

www.protecta.nu

Protecta Medical AB är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

EasyRoll Svävaren

4-vägs, avlastning tre nivåer

EasyRoll systemet

glidlakan för alla tillfällen



Art.nr	Produkt	Sängbredd	Total storlek överdel	Total Storlek underdel	EAN
<input type="checkbox"/> 4111L	EasyRoll Svävaren	90 cm	200 x 210 cm	200 x 200 cm	
<input type="checkbox"/> 4111LT	EasyRoll Svävaren, överdel	90 cm	200 x 210 cm		
<input type="checkbox"/> 4111LB	EasyRoll Svävaren, underdel	90 cm		200 x 200 cm	
<input type="checkbox"/> 4112L	EasyRoll Svävaren	105 cm	200 x 225 cm	200 x 215 cm	
<input type="checkbox"/> 4112LT	EasyRoll Svävaren, överdel	105 cm	200 x 225 cm		
<input type="checkbox"/> 4112LB	EasyRoll Svävaren, underdel	105 cm		200 x 215 cm	
<input type="checkbox"/> 4113L	EasyRoll Svävaren	120 cm	200 x 240 cm	200 x 230 cm	
<input type="checkbox"/> 4113LT	EasyRoll Svävaren, överdel	120 cm	200 x 240 cm		
<input type="checkbox"/> 4113LB	EasyRoll Svävaren, underdel	120 cm		200 x 230 cm	

Material:

Glidyta: Duchesse (Polyester)
Bäddflikar/Liggyta: Bomull/Polyester
Handtag: Nylon



Parkvägen 5
913 34 Holmsund

Tel. 090-14 26 25
Fax.090-13 64 52

E-post: info@protecta.nu

PROTECTA[®]
Medical AB

www.protecta.nu

Protecta Medical AB är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

EasyRoll Svävaren

4-vägs

Brukarinformation




Brukarinformation ver. 3 191217



EasyRoll systemet

glidlakan för alla tillfällen

EasyRoll Svävaren är ett 4-way förflyttnings- hjälpmedel. D.v.s. den glider lika lätt uppåt/nedåt, åt sidorna och diagonalt.

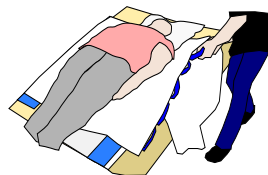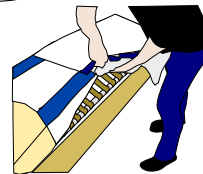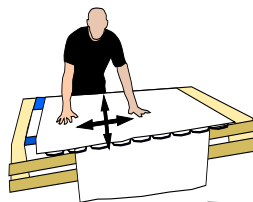

OBS! Båda delarnas bäddflikar ska bäddas fast efter justering av vårdtagarens position.

OBS! Använd endast handtagen vid förflyttning, inte bäddflikarna. Får användas med golv-/taklyft vid skötsel av personlig hygien i sängen.

EasyRoll Svävaren

EasyRoll Svävaren är ett arbetstekniskt hjälpmedel för vårdpersonal för enkel vändning/förflyttning av en liggande brukare. Den består av två produkt delar vars glidytor arbetar tillsammans med mycket låg friktion (motstånd). Detta gäller för alla glidriktningar och medför helt fri positionering av vårdtagaren. Produkten har greppvänliga handtag som underlättar förflyttning.

Placering

Underdel:

Svävarens underdel (som har vitt glidtyg i mitten och blå bromszoner på kanterna) bäddas fast/fixeras i sängen som ett traditionellt glidlakan med glidytan uppåt. De röda markeringsränderna underlättar centreringen då de indikerar var glidlakanet ska vara placerat vid madrasskanterna. Den vita glidytan i mitten är aktiv glidytan för Svävarens överdel. De blå glidytor är bromszoner som endast är aktiva tillsammans med Svävarens överdel.

Överdel:

Svävarens överdel (som har handtag) läggs/bäddas direkt på underdelen med glidytan nedåt. Svävarens glidytor - d.v.s. underdelens och överdelens glidytor - ska ligga mot varandra. Vårdtagaren ligger på Svävarens bomullsöverdel. Vid förflyttning av vårdtagaren greppas handtagen som finns placerade efter långsidorna och vårdtagaren dras enkelt till avsedd valfri position på sängen

Säkerhet

Kontrollera alltid att de röda markeringsränderna följer madrasskanten så att underdelen ligger centrerad i sängen vid bäddning. Underdelen har bäddflikar som ska bäddas fast för att fixera produkten i sängen. De ska inte användas till drag/förflyttning. **OBS! Underdelen får endast användas tillsammans med överdelen, ej som glidlakan. Vid bäddning/byte av överdel får brukaren inte nyttja sängen för att förhindra halkrisk vid sängkanten.**

Överdelen har bäddflikar som ska bäddas fast efter att vårdtagaren positionerats i önskat läge.

Kontrollera regelbundet material och sömmar så att de är hela och fria från skador. Gör även regelbundna funktionstester genom att kontrollera friktionen på glidytan (låg) och bromszonerna (hög). Jämför med ny produkt. Kontroller handtagen så att de håller för belastning. Ett glidlakan som inte uppfyller ställda krav ska bytas ut.

Material:

Glidytor: Duchesse (Polyester)
Liggyta/Bäddflikar: Bomull/Polyester
Handtag: Nylon

Maxvikt: 200 kg






Skötselråd:

Tvättas före första användning.
Tvättas i max 90°C.
Ej Sköljmedel.
Torkning / tumling i max 70°C.
Hängtorkning rekommenderas för längre livslängd.
Strykning förbättrar glidförmågan ytterligare.



Vid frågor om produkten och dess användning

Kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.
Se även www.protecta.nu för instruktionsfilmer.

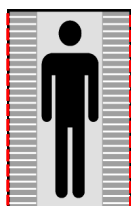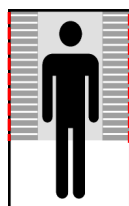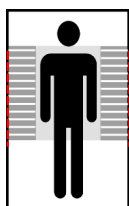

140x210	140x200	200x210	200x200
140x225	140x215	200x225	200x215
140x240	140x230	200x240	200x230