

EasyRoll Glidlakan Antidecubitus










EasyRoll systemet

glidlakan för alla tillfällen



Alla våra standard glidlakan är märkta med glidriktningspilar för lättare användning.

Röda markeringsränder gör det lättare att kontrollera att glidlakanet ligger rätt placerat

Art.nr	Produkt	Sängbredd	Glidbredd	Längd	Total Storlek	EAN
<input type="checkbox"/> 45901S	Glidlakan Antidecubitus	90 cm	70 cm	100 cm	100 x 220 cm	 7 350042 260416
<input type="checkbox"/> 45902S	Glidlakan Antidecubitus	90 cm	70 cm	140 cm	140 x 220 cm	 7 350042 260423
<input type="checkbox"/> 45903S	Glidlakan Antidecubitus	90 cm	70 cm	200 cm	200 x 220 cm	 7 350042 260430
<input type="checkbox"/> 451051S	Glidlakan Antidecubitus	105 cm	85 cm	100 cm	100 x 235 cm	 7 350042 260447
<input type="checkbox"/> 451052S	Glidlakan Antidecubitus	105 cm	85 cm	140 cm	140 x 235 cm	 7 350042 260454
<input type="checkbox"/> 451053S	Glidlakan Antidecubitus	105 cm	85 cm	200 cm	200 x 235 cm	 7 350042 260461
<input type="checkbox"/> 451201S	Glidlakan Antidecubitus	120 cm	100 cm	100 cm	100 x 250 cm	 7 350042 260478
<input type="checkbox"/> 451202S	Glidlakan Antidecubitus	120 cm	100 cm	140 cm	140 x 250 cm	 7 350042 260485
<input type="checkbox"/> 451203S	Glidlakan Antidecubitus	120 cm	100 cm	200 cm	200 x 250 cm	 7 350042 260492

Material:

Glidyta: Duchesse (Polyester)

Bäddflikar: Bomull/Polyester



Parkvägen 5
913 34 Holmsund

Tel. 090-14 26 25
Fax.090-13 64 52

E-post: info@protecta.nu

Protecta Medical AB är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

PROTECTA[®]
Medical AB

www.protecta.nu


EasyRoll Glidlakan Antidecubitus

EasyRoll systemet

glidlakan för alla tillfällen

Brukarinformation

Brukarinformation ver. 2 050216

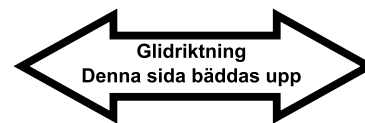

Alla våra standard glidlakan är märkta med glidriktningspilar för lättare användning.

Röda markeringsränder gör det lättare att kontrollera att glidlakanet ligger rätt placerat


EasyRoll Glidlakan Antidecubitus

EasyRoll Glidlakan underlättar vändning i säng. Det bäddas som ett vanligt lakan direkt på sängen, dess bäddflikar bäddas in under madrassen för fixering.


Glidlakan Antidecubitus är specialanpassade för att vara tunnare än de övriga EasyRoll serierna. Det viktigaste med ett glidlakan för en antidecubitus madrass är att lakanet är tunt nog för att man inte ska förlora effekten av själva madrassen.

Placering


EasyRoll Glidlakan placeras med glidytan uppåt och centreras mitt i sängen. De röda markeringsränderna underlättar centreringen då de indikerar var glidlakanet ska vara placerat vid madrasskanterna. Vid sidorna av glidet finns textila sidopartier, bäddflikar, med högre friktion som bromsar upp vid vändning eller uppsittande vid sängkanten. Bilderna nedan visar de olika storlekarnas placering på sängen.

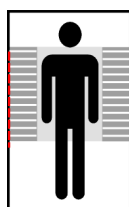

100x220
100x235
100x250

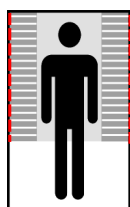

140x220
140x235
140x250

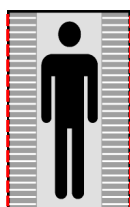

200x220
200x235
200x250

Säkerhet

Kontrollera alltid att glidlakanet ligger centrerat i sängen vid bäddning för att motverka risker för fall ur säng. När de röda markeringsränderna följer madrasskanterna ligger lakanet centrerat. Vid uppresning kontrolleras glidlakanets position innan brukaren sätter sig på sängkanten för att motverka urglidning ur sängen. Vid behov justeras lakanets position med hjälp av bäddflikarna som sedan bäddas fast igen innan uppresning påbörjas.

Kontrollera regelbundet material och sömmar så att de är hela och fria från skador. Gör även regelbundna funktionstester genom att kontrollera friktionen på glidytan (låg) och bromszonerna (hög). Jämför med ny produkt. Ett glidlakan som inte uppfyller ställda krav ska bytas ut.

Material:

Glidytta: Duchesse (Polyester)

Bäddflikar: Bomull/Polyester

Maxvikt: 200 kg



Skötselråd:

Tvättas före första användning.

Tvättas i max 90°C.

Ej Sköljmedel.

Torkning / tumling i max 70°C.

Hängtorkning rekommenderas för längre livslängd.

Strykning förbättrar glidförmågan ytterligare.



Vid frågor om produkten och dess användning

Kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

Se även www.protecta.nu för instruktionsfilmer.

Parkvägen 5
913 34 Holmsund

Tel. 090-14 26 25
Fax. 090-13 64 52

E-post: info@protecta.nu

Protecta Medical AB är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

PROTECTA[®]
Medical AB

www.protecta.nu