

Att använda SystemRoMedic™ produkter skall kännas bra från början till slut.



Kvalitets- och miljöcertifiering

Handicare AB är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 13485. Handicare AB arbetar kontinuerligt och aktivt med att säkra och utveckla kvalitets- och miljötänkandet inom företaget.



Handicare AB strävar efter att alla textila produkter skall vara Ökotex-certifierade, vilket säkerställer att de inte innehåller hälsofarliga ämnen i skadliga koncentrationer.



Testade och godkända produkter

Handicare ABs hjälpmedel är av högsta kvalitet och uppfyller de krav som ställs på denna typ av hjälpmedel för vård och omsorg. Alla hjälpmedel är CE-märkta och många är patentskyddade. Alla produkter uppfyller kraven enligt Medicintekniska direktivet MDD 93/42/EEC, klass 1 produkter.



Funktionella material

ULF™ (Ultra Low Friction) är Handicare ABs varumärkesskyddade begrepp för glidmaterial som används för att uppnå mycket låg friktion i t ex glidmattor.

Engångsmaterial

I SystemRoMedic™ finns ett växande sortiment av patientbundna förflyttningshjälpmedel för korttidsbruk. Istället för att tvättas, kasseras produkten efter användning, när den blir smutsig eller då brukaren inte behöver den längre. Detta motverkar spridningen av multiresistenta och andra typer av smittsamma bakterier.

Skyddsfodral

De flesta storlekar av EasySlide kan försees med ett utbytbart skyddsfodral som är tillverkat av polyester och som är enkelt att rengöra. För de flesta storlekar av EasySlide och RollerSlide finns även engångsskyddsfodral av återvinningsbar polyetenplast vilka ger ytterligare förbättrad hygien och mindre tvätt.

Tvättråd

Tvätt, rengöring och rekonditionering av hjälpmedel är en förutsättning för hygien och säkerhet samt för att undvika smittspridning. Övergripande information om hur man sköter om våra produkter finns här nedan. För mer information om detta, läs instruktionerna på respektive produkts märkning. Våra produkter utvecklas och förbättras hela tiden, varför vi förbehåller oss rätten att göra förändringar i produkterna utan föregående information.

Textila produkter


Alla våra manuella hjälpmedel i textil kan tvättas i 60-80 graders vattentvätt och torkas i torktumlare vid låg temperatur. Låg temperatur för torktumling innebär 45-50 graders värme. Använd inte sköljmedel och undvik torktumling för optimal livslängd. Vid behov av desinficering kan 70 % etanol, 45 % isopropanol eller liknande användas.



Våra lyftselar i textil kan tvättas i 60-85 graders vattentvätt och torkas i torktumlare vid låg temperatur.



WendyLett, WendyLean, TopSheet och IncoSheet kan tvättas i 60-90 graders vattentvätt och torkas i torktumlare.

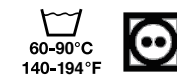

Plastprodukter

Ytan på produkten kan rengöras med varmt vatten eller tvållösning. Vid behov av desinficering kan 70 % etanol, 45 % isopropanol eller liknande användas.

Mobila och stationära lyftar

Vid behov, rengör lyften med varmt vatten eller tvållösning och se till att hjulen är fria från smuts och hår. Använd inte rengöringsmedel som innehåller fenol eller klor då detta kan skada aluminiumet och plastmaterialen. Vid behov av desinficering kan 70 % etanol, 45 % isopropanol eller liknande användas.

SystemRoMedic™ är en helhetslösning för enkla förflyttningar. I konceptet ingår fyra produktområden som tillgodoser de allra flesta behov i olika förflyttningssituationer.

Överflyttning, mellan två enheter. **Positionering**, inom samma enhet.

Stöd, vid mobilisering. **Lyft**, manuella och mekaniska.



handicare

Handicare AB
Veddestavägen 15,
Box 640, 175 27 Järfälla
Tel: 08-557 62 200
Fax: 08-557 62 299
www.handicare.se
info@handicare.se