

Bälten som ger stöd

SystemRoMedic™

*Original-
modeller*

*Och en ny
kramande
version*



EasyBelt och FlexiBelt används vid sittande överflyttning eller för att ge stöd till brukare som står eller går.

SystemRoMedics EasyBelt och FlexiBelt används när man assisterar en brukare som ska resa sig eller sätta sig eller ta sig från rullstolen till sängen, toaletten eller bilen. Båda modellerna finns i flera storlekar. FlexiBelt, hug är en ny version med en patentsökt design som gör att bältet "kramar om" brukaren istället för att glida upp.



handicare

Handtagen är ergonomiskt utformade för att ge möjlighet till bästa tänkbara grepp.

Stabil, skodd kant ger ökad slitstyrka.

Förstärkta sömmar på utsatta ställen.

Spännremmen är stabil och lätt att justera.

Insidan är antihalkbehandlad för att bältet ska sitta säkert på plats utan att glida.

Ett fast grepp i midjan är ofta allt som behövs.

I många förflyttningssituationer är en stabil och hjälpande hand precis det som behövs. SystemRoMedics vårdbälten, EasyBelt och FlexiBelt, används när brukaren skall resa sig eller sätta sig eller förflytta sig från rullstolen till sängen, toaletten eller bilen. Det handlar om lite handfast stöd och hjälp när det behövs som bäst.

Fasta grepp i två versioner

Bältet, som placeras runt brukarens midja eller höfter, har ett flertal stabila handtag, både vertikala och horisontella, vilket gör det möjligt för medhjälparen att ta ett fast grepp i många olika situationer. Vårdbältet finns i två modeller. EasyBelt har en insida av PU-belagd nylon och kan därför användas i miljöer där fukt och väta förekommer eller när det finns speciella hygienkrav. FlexiBelt har en mjuk insida av polyestersammet som gör att bältet är mycket behagligt att bära.

Kombinera vårdbältet med andra hjälpmedel vid tunga förflyttningar


Vid tunga och komplicerade förflyttningar kan man enkelt och med fördel använda vårdbältet i kombination med andra hjälpmedel. Sittande överflyttningar blir lättare med lite extra hjälp av en glidmatta som EasySlide eller en glidskiva som EasyGlide. EasyBelt och FlexiBelt gör livet lättare både för brukare och för medhjälpare samtidigt som de bidrar till positiv samvaro och samarbete i många vardags-situationer.

Snabbspännet är starkt, säkert och lätt att öppna, stänga och dra åt.

Yttermaterialet av slitstark nylon ger maximal livslängd.

Både vertikala och horisontella handtag ger medhjälparen ett bra grepp i alla lägen.

FlexiBelt har en mjuk insida som gör vårdbältet bekvämt.

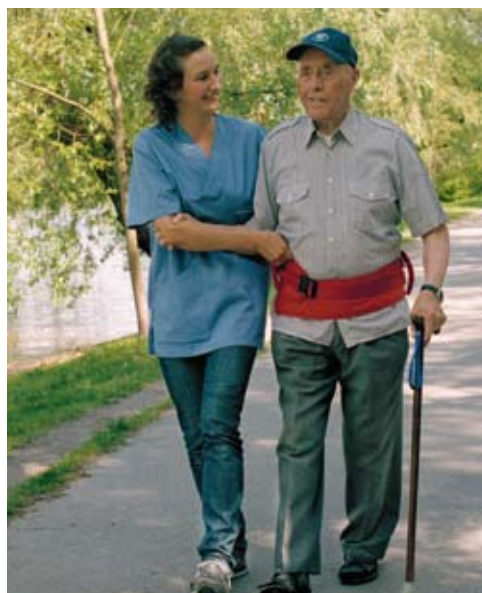

EasyBelt och FlexiBelt används för att ge stöd åt en brukare som står eller går. Det handlar om lite handfast stöd och hjälp när det behövs som bäst.



FlexiBelt

FlexiBelt har en mjuk insida av polyestersammet som gör att bältet är mycket behagligt att bära.



FlexiBelt, hug

FlexiBelt, hug har en ny, patentsökt design som gör att bältet "kramar om" brukaren istället för att glida upp.



EasyBelt

EasyBelt har en insida av PU-belagd nylon som inte glider mot kläderna och som motstår fukt och vatten.

Nyhet!



FlexiBelt, hug

FlexiBelt, hug är en ny version av SystemRoMedics klassiska FlexiBelt. FlexiBelt, hug har en ny, patentsökt design med rörliga, horisontella handtag som glider fritt i öglor och som gör att bältet "kramar om" brukaren istället för att glida upp under olika förflyttningssituationer. Med FlexiBelt, hug kan medhjälparen ge ännu mer stöd utan att anstränga sig mer. Den nya designen gör hela jobbet själv.

PRODUKTSPECIFIKATION

EasyBelt och FlexiBelt används vid sittande överflyttningar eller som stöd när brukaren står och går. Yttermaterial: nylon. Material på insidan: FlexiBelt, polyestersammet och EasyBelt, fuktavvisande PU-belagd nylon. EasyBelt rekommenderas för miljöer med speciella hygienkrav medan FlexiBelt har en yta som är mjukare och behagligare mot kroppen. SupportStraps är ett multifunktionellt tillbehör som används för att ge brukaren extra stöd och säkerhet i samband med gå- och ståträning samt överflyttning med SystemRoMedics vårdbälten, uppresningshjälpmedel och överflyttningsplattformar. SupportStraps kan användas som grenband till EasyBelt och FlexiBelt. De förhindrar då effektivt att vårdbältet glider uppåt vid förflyttning eller gåträning.

Art. nr.	Produkt	Storlek	Mått	Midjemått	Handtag
6012	EasyBelt	XS	75 cm	45–70 cm	5 st
6013	EasyBelt	S	105 cm	60–100 cm	7 st
6014	EasyBelt	M	120 cm	70–120 cm	9 st
6015	EasyBelt	L	135 cm	100–160 cm	11 st
6023	FlexiBelt	S	105 cm	60–100 cm	7 st
6024	FlexiBelt	M	120 cm	70–120 cm	9 st
6025	FlexiBelt	L	135 cm	100–160 cm	11 st
6026	FlexiBelt	XL	150 cm	115–175 cm	13 st
6072	FlexiBelt, hug	XS	75 cm	45–70 cm	5 st (3 + 2 rörliga)
6073	FlexiBelt, hug	S	105 cm	60–100 cm	7 st (4 + 3 rörliga)
6074	FlexiBelt, hug	M	120 cm	70–120 cm	9 st (5 + 4 rörliga)
6075	FlexiBelt, hug	L	135 cm	100–160 cm	11 st (6 + 5 rörliga)
6076	FlexiBelt, hug	XL	150 cm	115–175 cm	13 st (7 + 6 rörliga)
Tillbehör					
6061	SupportStraps	En storlek			

EasyBelt och FlexiBelt kan med fördel kombineras med många av våra övriga förflyttningshjälpmedel. Besök gärna www.handicare.se för mer information.



handicare

Handicare AB
Veddestavägen 15,
Box 640, 175 27 Järfälla
Tel: 08-557 62 200
Fax: 08-557 62 299
www.handicare.se
info@handicare.se

SystemRoMedic™ är en helhetslösning för enkla förflyttningar. I konceptet ingår fyra produktområden som tillgodoser de allra flesta behov i olika förflyttningssituationer.

Överflyttning, mellan två enheter. **Positionering**, inom samma enhet.

Stöd, vid mobilisering. **Lyft**, manuella och mekaniska.