

CEFAR BASIC – väl genomtänkt enkelhet!

CEFAR BASIC är en enklare stimulator som är utvecklad för användning av både medicinskt utbildad personal och patienten i hemmet. CEFAR BASIC innehåller förinställda program för de vanligaste indikationerna och är ett utmärkt alternativ till de mer avancerade stimulatorerna.



Tekniska data:

| | |
|----------------------------------|---|
| Antal kanaler..... | 2 (icke separata) |
| Konstantström | Upp till ett motstånd av 1 500 Ohm |
| Stimuleringsström/kanal | 60 mA per channel |
| Max pulsbredd | 180 µs |
| Max frekvens | 80 Hz |
| Pulsform | Asymmetrisk bifasisk puls, 100% kompenserad |
| Antal förinställda program | 3 |
| Timer | 0-60 min |
| Storlek | 120 x 50 x 30mm |

Program:

P1: 80 Hz Högfrekvent TENS


P2: 2 Hz Lågfrekvent TENS i pulståg

P3: 80 Hz Pulsbreddsmodulerad högfrekvent stimulering 70-180 µs



Pulsform: Asymmetrisk bifasisk puls, 100% kompenserad

Konventionell högfrekvent TENS (enstaka pulser)

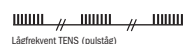

Pulsbreddsmodulerad TENS (enstaka pulser med modulerad pulsbredd)



Lågfrekvent TENS (pulståg)



CEFAR EASY TOUCH™

Automatisk amplitud inställning. Genom ett enkelt knapptryck justeras amplituden automatiskt. En funktion som förenklar för användaren, och försäkrar att en optimal stimuleringsnivå uppnås. Allt för bästa behandlingsresultat!

Bakgrundsbelysning

En större display i kombination med inbyggd belysning gör den lättare att läsa.

Automatisk funktionskontroll,

För att öka säkerheten för användaren är CEFAR PRIMO PRO utrustad med en automatisk funktionskontroll. Om något är fel med PCB (printed circuit board) går det inte att använda stimulatorn. En felsymbolen visas i displayen när du startar stimulatorn vilket betyder att stimulatorn är trasig och måste skickas på service.

Timer

Det finns en timer som gör det möjligt att ställa in behandlingstiden mellan 0-60 minuter.

Uppföljningsfunktion

Uppföljningsfunktionen ger dig möjlighet att övervaka användningen av stimulatorn. CEFAR PRIMO PRO har två olika uppföljnings möjligheter.

- A)** Uppföljning av användning av stimulatorn visat i timmar och minuter med möjlighet att nollställa mellan olika användare.
- B)** Uppföljning av total användning av stimulatorn visat i timmar och minuter. Kan ej nollställas.

Program guide

Ingående information om hur och när programmen ska användas är inkluderad i bruksanvisningen. Här hittar du även information om metoden och en elektrodpaceringsguide med bilder för de olika behandlingarna.

Program- och knappläs, pausfunktion: alla viktiga funktioner för både förskrivare och patient.



cefar®

CEFAR Medical AB | Murmansgatan 126 | SE-212 25 Malmö | Sweden
Tel +46 (0)40-39 40 00 | Fax +46 (0)40-39 40 99 | E-mail info@cefar.se | www.cefar.se