

On/C

- **Startar** Lightwriter om maskinen är avstängd-
- **Rensa textrad** när du skriver
- **Stoppar uppläsning av tal**, när maskinen pratar
- **Går till föregående skärmbild** om du navigerar bland menyerna

Meny

- **Går alltid till huvudmenyn**
- Under telefonsamtal, ger knappen möjlighet att **lägga på**

Mute

- **Stäng av ljudet**
- Under telefonsamtal, ger knappen möjlighet att **lägga på**

123...Hjälp-

- Växlar mellan 2 funktioner på sifferknapparna
- **siffrorna skriver siffor / siffrorna väljer ordprediktion**

Siffor

- Skriv siffor
- Välj ordförslag
- Snabbnavigering i menyer, istället för att bläddra med nästa/tillbaka

Alt

- Visar de olika alternativ du kan göra i den aktiva funktionen: t.ex. redigera, radera och spara ett SMS

Signal

- Påkalla uppmärksamhet

OK

- Läser upp skriven text
- Väljer markerad funktion/post

Shift

- **Skriver VERSAL**
- Shift följt av annan knapp med orange tex ➔ t.ex. Shift 4 = @
- Shift och följt av Alt. ➔ Snabbinställningar för volym och ljusstyrka

Space

- **Gör ett mellanslag**

Tillbaka och nästa

- **Använd för att navigera i menyer**
- Tillbaka **raderar senaste tecknet** när du skriver

Välj

- Skriv ett sökord, tryck välj ➔ fraslistan-
- Shift och Välj ➔ visar olika symboler
- I Inställningar är Välj = fabriksinställning för funktionen

