

MEMOday

Art.nr 508260



Innehållsförteckning

1.	Inledning.....	3
2.	Komma igång	3
3.	Talstöd.....	4
4.	Byt bakgrundsfärg.....	4
5.	Tidsintervaller	4
6.	Batteribackup.....	4
7.	Sätta på/stänga av MEMOday	5
8.	Display.....	5
9.	Skötsel/rengöring.....	5
10.	Miljö	6
11.	Tekniska specifikationer.....	6
12.	Medföljande delar	6
13.	Förvaring	6
14.	Rekonditionering.....	7
15.	Överensstämmelse med Medicintekniska direktivet.....	7
16.	Säkerhet och ansvar	7

1. Inledning

MEMOday påminner om vilken dag och tid det är. På en tydlig display visas tid, veckodag, datum och vilken del av dygnet det är. Man kan också få texten uppläst.

Genom att visa om det är natt eller dag kan MEMOday förhindra att användaren av misstag ringer anhöriga eller går ut mitt i natten.

MEMOday bör placeras på en central plats i hemmet. Den ansluts till ett vägguttag med den medföljande laddaren.

MEMOday är enkel att ställa in för att passa användarens behov.

Vid strömavbrott försvinner texten, men MEMOday fungerar som vanligt när strömmen är tillbaka.

MEMOday ställer automatiskt om för sommar- och vintertid.

2. Komma igång


1. Bestäm hur MEMOday ska introduceras. En del personer vill inte använda "hjälpmedel", och det kan då fungera att bara ge den som en "present".
2. Bestäm var i bostaden som MEMOday ska placeras. Det bör vara någonstans där den lätt uppmärksammas, t ex vid telefonen eller på köksbänken. Se till att det inte blir reflexer på displayen av belysning eller fönsterljus.
3. Anslut den medföljande laddaren till ett vägguttag och till uttaget på sidan av MEMOday.
4. Håll På/Av-knappen på baksidan av MEMOday intryckt tills displayen tänds.
5. Följ instruktionerna som visas för att ställa in språk, land, tid och datum samt vilken information som ska visas på displayen. Se kapitel 8. *Display* för mer information.
6. Se till att laddaren alltid är ansluten. Displayen är endast tänd när MEMOday är ansluten till vägguttaget.

*OBS! Använd endast den medföljande laddaren till produkten.
Kontakta din leverantör om du behöver en ny.*

3. Talstöd

Tryck lätt på displayen så läser MEMOday upp det man trycker på.
Se till att inställningen för talstöd är på, se kapitel 8. *Display*.

4. Byt bakgrundsfärg

När man trycker på knappen  ändras bakgrundsfärgen på MEMOday från ljus till mörk eller tvärt om.

5. Tidsintervaller

MEMOday visar med text vilken del av dygnet det är.

Tidsintervallerna för detta är förprogrammerade och följande tider gäller:

morgon: 06:00 – 09:00
förmiddag: 09:00 – 12:00
eftermiddag: 12:00 – 18:00
kväll: 18:00 – 23:00
natt: 23:00 – 06:00

Under natten sänks ljusstyrkan på skärmen automatiskt.

6. Batteribackup

Om laddaren inte är ansluten, eller vid ett strömavbrott, visas ett meddelande om att man ska ansluta laddaren. Efter en minut utan ström släcks skärmen.


När MEMOday åter får ström (laddaren ansluts eller att strömmen kommer tillbaka efter ett strömavbrott) tänds displayen och rätt tid, veckodag, datum och del av dygnet visas igen. Inställningarna sparas av ett inbyggt batteri.

Om MEMOday har varit utan laddning väldigt länge (flera veckor) kan man behöva ställa in språk, land, tid och datum samt vad som ska visas på displayen på nytt.

7. Sätta på/stänga av MEMOday


Vid normal användning ska MEMOday alltid vara på eftersom användaren alltid bör kunna se informationen på displayen.

Man kan släcka displayen genom att trycka kort på På/Av-knappen.




Om MEMOday inte ska användas under en längre tid kan den stängas av helt genom att man håller in På/Av-knappen länge tills två val visas på displayen. Tryck på  för att stänga av.

8. Display

Det går att ställa in vilken information som ska visas på displayen.

Gå till inställningsguiden genom att hålla länge på På/Av-knappen tills två val visas. Tryck på  för att starta inställningsguiden.

Inställningsguiden har fyra steg;

- **Ange språk.** Språk med symbolen  har talstöd. När språket är valt är symbolen grön  för talstöd på, och röd  för av. Tryck på symbolen för att ändra.
- **Välj land,** där MEMOday ska användas. Detta bestämmer hur tiden visas och omställning för sommar- och vintertid.
- **Ange tid och datum.** Ställ in aktuell tid, år, månad och datum.
- **Ange displayinställningar,** välj vad som ska visas på displayen:



9. Skötsel/rengöring

Rengör MEMOday med en lätt fuktad trasa med mildt rengöringsmedel. Använd inte starka lösningsmedel vid rengöring. Produkten får inte nedsänkas i vatten.

10. Miljö

Emballaget är återvinningsbart och sopsorteras som pappersförpackning.

När produkten eller batteriet ska kasseras, ska det behandlas som elektronikavfall eller sändas tillbaka till leverantören.

11. Tekniska specifikationer

Mått (h x b x d):	140 x 185 x 95 mm
Vikt:	0,35 kg
Batteri:	Inbyggt uppladdningsbart Lithium-ion, 3,7 V
Laddare:	5,0 V, 1500 mA (center positiv) Endast medföljande laddare får användas. Vid beställning av ny, använd artikelnummer <i>508258 Power Supply MEMOday</i> .
Display:	7 tum
Tillgängliga språk:	Svenska, norska, danska, finska, isländska*, engelska, tyska, nederländska, flamländska, franska, spanska, italienska, slovenska*, bosniska*, kroatiska*, serbiska*, tjeckiska, polska, albanska*, arabiska, persiska*, turkiska, somaliska*, ungerska*, ryska, grekiska, (språk med * saknar talstöd)

12. Medföljande delar

MEMOday	1 st
Laddare till MEMOday , art.nr: 508258	1 st
Bruksanvisning	1 st

13. Förvaring

När MEMOday inte används bör den förvaras inomhus i rumstemperatur.

14. Rekonditionering

För att återställa MEMOday till fabriksinställning ska man gå till inställningarna och ställa in den för önskat språk och land, se kapitel 8. *Display*. Rengör enligt instruktioner i kapitel 9. *Skötsel/rengöring*, samt se till att den tillhörande laddaren inte är skadad. Om laddaren är skadad, kontakta leverantören för att beställa en ny.

15. Överensstämmelse med Medicintekniska direktivet

MEMOday marknadsförs som en medicinteknisk produkt klass I för personer med kognitiva funktionsnedsättningar och uppfyller kraven i Medicintekniska direktivet 93/42/EEC.

16. Säkerhet och ansvar

Abilia AB har analyserat riskerna med produkten i enlighet med SS-EN 14971.

Vid idrifttagning och dagligt användande av produkten är det alltid viktigt att tänka på säkerheten. Det är i en bruksanvisning inte möjligt att beskriva alla sätt som man inte får använda produkten på. Om du är osäker på om du ställt in eller satt produkten i drift korrekt rekommenderar vi att du tar kontakt med din leverantör.

Abilia AB är inte ansvariga för eventuella skador, följskador eller förlust som följer av felaktig användning, brist på uppföljning, fel inställning, fel uppkoppling eller liknande. Abilia ABs ekonomiska ansvar är vid alla tillfällen begränsat till värdet av själva produkten.



Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden
Phone +46 (0)8-594 694 00 | info@abilia.se | www.abilia.se

Abilia AS, Tevlingveien 15, 1081 Oslo, Norway
Phone +47 23 28 94 00 | info@abilia.no | www.abilia.no

Toby Churchill Ltd (Abilia), Toby Churchill House,
Norman Way Industrial Estate, Over, Cambridge CB24 5QE, United Kingdom
Phone +44 (0)1954 281210 | info@abilia.uk | www.abilia.com

