

Elektronisk PODD SW

Art.nr 461350



Innehåll

1.	Inledning.....	5
1.1	Support.....	5
1.2	Licens.....	5
2.	Starta upp Elektronisk PODD SW.....	6
2.1	Kontrollera innehållet i kartongen.....	6
2.2	Systemkrav.....	6
2.3	Installera Elektronisk PODD SW.....	6
3.	Kom igång med Elektronisk PODD.....	9
3.1	Avsluta Elektronisk PODD.....	9
4.	Lägga in egna bilder.....	10
5.	Säkerhetskopiering.....	11
5.1	Automatisk säkerhetskopiering.....	11
5.2	Säkerhetskopiering av användarprogrammet.....	11
5.3	Återställa från en säkerhetskopia.....	11
6.	Avinstallera Elektronisk PODD.....	12
7.	Uppdatering av elektronisk PODD.....	14
8.	Teknisk information.....	15
8.1	Säkerhet och ansvar.....	15
8.2	Miljö.....	15
8.3	Medföljande artiklar.....	15

1. Inledning

I denna handbok beskrivs hur man kommer igång med att använda **Elektronisk PODD SW**.

Elektronisk PODD SW är en programvara som installeras på Windows-baserade enheter enligt de systemkrav som anges i separat kapitel.

PODD är en internationellt erkänd metod som bygger på mer än 30 års praktisk erfarenhet att lära sig att kommunicera när man behöver AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) PODD står för Pragmatisk Organisering av Dynamisk Display, vilket helt enkelt betyder effektiv och pedagogisk organisering av ord på ett sätt som stöder språkflexibilitet samtidigt som man uttrycker sig exakt. PODD från Abilia har utvecklats i nära samarbete med Gayle Porter, grundaren av PODD-metoden.

PODD i kombination med gester och texter ger barnet möjlighet att använda den mest effektiva metoden i varje situation - detta gör PODD till ett kraftfullt verktyg i barnets kommunikationsutveckling. Syftet är att ge barnen ett ordförråd så att de på ett konsekvent sätt kan kommunicera med omgivningen. Materialet är det mest kompletta och grundligt dokumenterade materialet på den svenska marknaden och systemet erbjuder kontinuerligt nytt material till nästa språkutvecklingsnivå.

Elektronisk PODD bygger på samma princip som de välkända och populära PODD-böckerna, men drar också nytta av de möjligheter som en elektronisk enhet erbjuder. Kommunikationen kan ta hjälp av talsyntes som ger barnet en röst och gör det lättare att kommunicera även med människor som inte är bekant med AKK kommunikation. Det är lätt att ta med enheten överallt och det är lätt att göra justeringar och lägga till ord i vokabuläret i samband med framsteg i språkutvecklingen. Till skillnad från en bok kan vokabulären utökas utan att behöva skriva ut tryckt material.

1.1 Support

Abilia kan ge support för PODD-funktionerna och inställningar för dessa.

Välkommen att kontakta Abilias support. Skriv till support@abilia.se eller ring 08-594 694 15.

1.2 Licens

Licensen för Elektronisk PODD gäller för installation på upp till 5 enheter som har anknötning till användaren. Licensen finns på det USB-minne som levereras med. Vid installation läggs licensen automatisk in.

2. Starta upp Elektronisk PODD SW

2.1 Kontrollera innehållet i kartongen

I kartongen ska följande finnas:

1. Handbok Elektronisk PODD SW (detta dokument)
2. Bruksanvisning Elektronisk PODD
3. USB-minne med
 - Elektronisk PODD (+Rolltalk Designer), licens för installation på 5 enheter som har anknytning till samma användare
 - Bruksanvisningar i pdf

2.2 Systemkrav

Elektronisk PODD SW kan installeras på enheter med Windows 7, Windows 8 (inte Windows RT) och Windows 10. Det krävs minst 20GB ledigt utrymme och 2GB RAM. Processor Atom Z2760, i3 eller bättre.

För enhet med videoutrustning som t.ex. ögonstyrning rekommenderas minst 4 GB RAM och processor Atom D525, i5 eller bättre.

2.3 Installera Elektronisk PODD SW

I detta kapitel beskrivs hur man installerar Elektronisk PODD SW på en Windows-baserad enhet.


Licensen läggs in automatiskt av installationsprogrammet.

OBS: För att kunna installera krävs administratörsrättigheter.


- För att starta installationen av Elektronisk PODD, anslut USB-minnet till enheten och kör programmet "Electronic - PODD Swedish" från USB-minnet.
- Tryck på *Nästa* i vyn "Välkommen".




- För att komma vidare i installationen måste man acceptera villkoren i licensavtalet, tryck sedan på *Installera*.

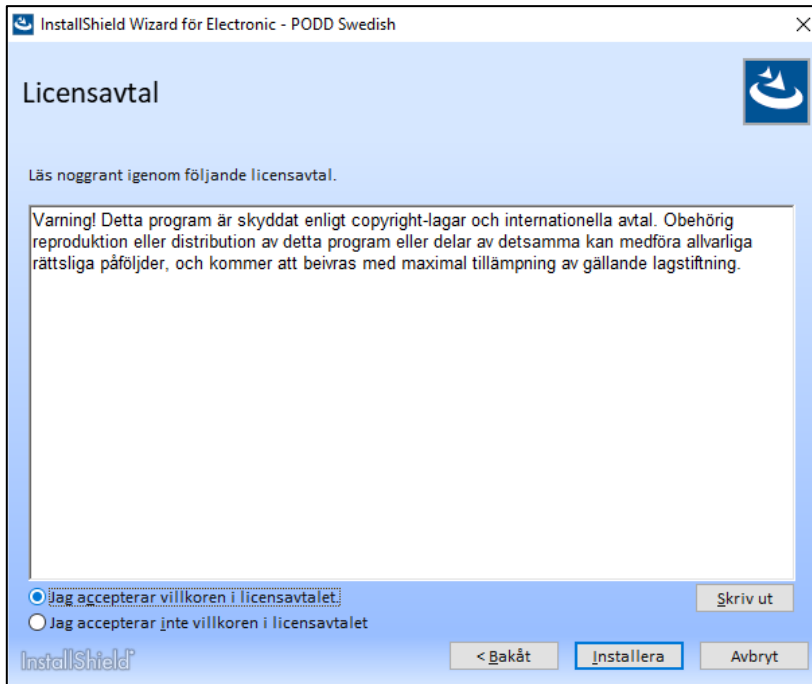

- Installationsprogrammet installerar de nödvändiga komponenterna på enheten. Detta kan ta upp till 15 minuter.

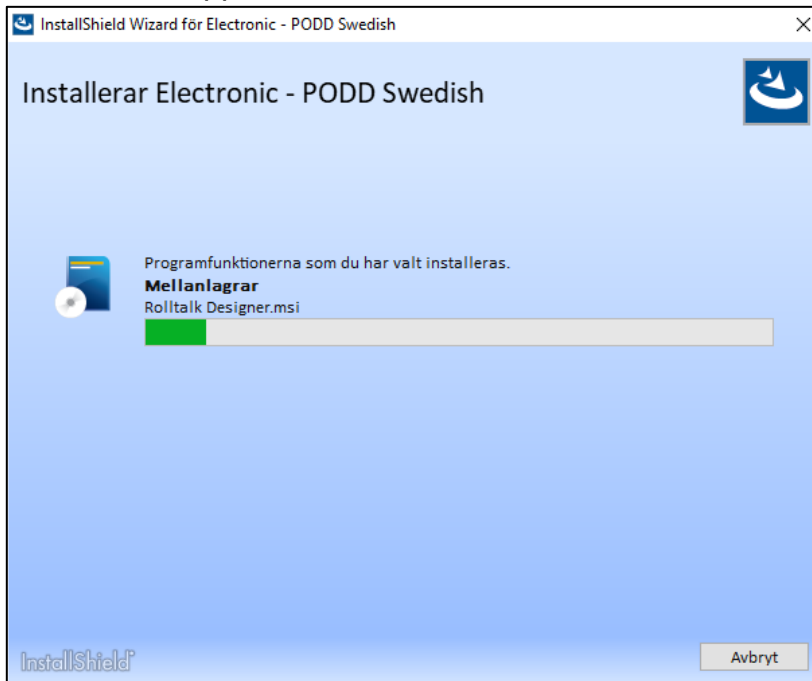

- Tryck på *Slutför* för att avsluta guiden.

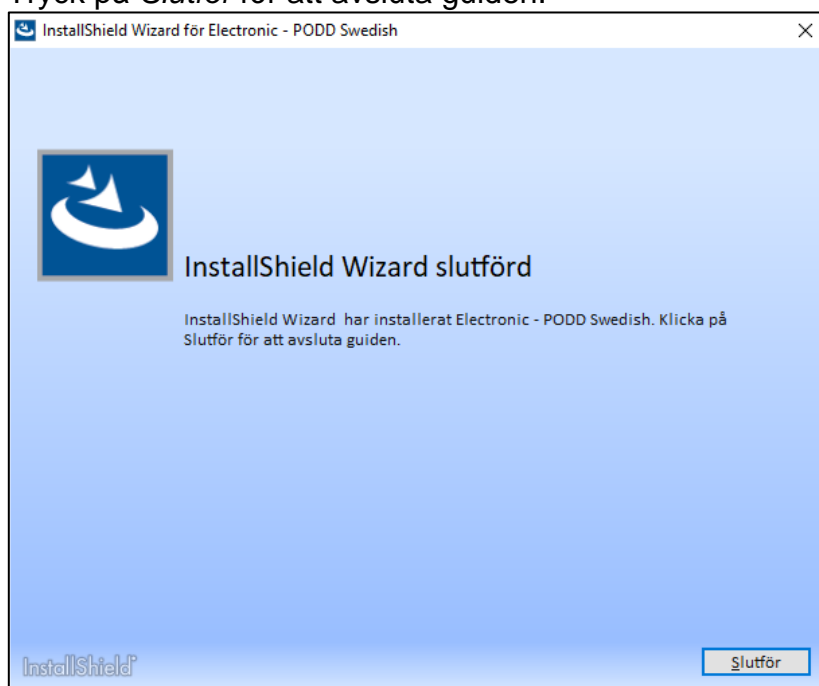

3. Kom igång med Elektronisk PODD

Vid leverans är programvaran Elektronisk PODD installerat på enheten.

Innan du sätter igång är det **viktigt** att läsa igenom *Bruksanvisning Elektronisk PODD*. Här står det bland annat följande:

- Teorin bakom PODD (kap 2)
- Hur man startar upp och anpassar Elektronisk PODD (kap 3)
- Hur PODD 15 resp. PODD 60 fungerar (kap 4 resp. 5)
- Hur man redigerar innehållet i Elektronisk PODD, t ex lägger in egna bilder (kap 7)

Första gången du startar Elektronisk PODD visas en anpassningsguide som hjälper dig att ställa in PODD. Följ anvisningarna på skärmen för att välja inställningar för röst, PODD-program och inställningar, tangentbord och styrsätt. Alla inställningar kan också göras senare från inställningsmenyn i programmet.

3.1 Avsluta Elektronisk PODD

Om man behöver få tillgång till skrivbordet måste användarprogrammet avslutas. Gå till **Inställningar|Stäng program**.

4. Lägga in egna bilder

Det är möjligt att lägga in egna bilder i mappen *Mina bilder*, Windows standardmapp.

Bilderna i mappen kan användas till spel som Memory, bygga egna samtalskartor, använda i e-post, kalendern mm.

Det är även möjligt att lägga in egna bilder från GoogleDrive, Dropbox eller OneDrive. Dessa program måste installeras lokalt på enheten innan de kan användas.

För att installera respektive online-lagringsprogram, gå till:

drive.google.com

OneDrive.live.com

www.dropbox.com

Följ sedan nedladdningsinstruktionerna.

Bilder från GoogleDrive, Dropbox eller OneDrive kan synkroniseras mellan olika enheter om samma konto används på de olika enheterna.

OBS: GoogleDrive, Dropbox eller OneDrive kräver att man skapar ett konto.

OBS: Det rekommenderas att inte använda bilder med hög upplösning då det längre tid att ladda hem och visa bilder med hög upplösning.

OBS: Om man använder OneDrive måste bilderna göras tillgängliga lokalt, högerklicka på OneDrive-mappen och välj att göra tillgängliga lokalt.

5. Säkerhetskopiering

5.1 Automatisk säkerhetskopiering

Rolltalk säkerhetskopieras automatiskt varje vecka natten till måndag klockan 05.00. Detta gör det möjligt att återställa data från föregående vecka. Enheten måste vara på för att backup ska kunna köras.

De säkerhetskopierade filerna sparas på diskpartitionen «Abilia Backup» i Rolltalk:

E:\Backup\Rolltalk

5.2 Säkerhetskopiering av användarprogrammet

Det är viktigt att man gör en kopia av användarprogrammet som sparas på en extern enhet (t.ex. ett USB-minne) både som säkerhetskopia vid stöld eller skada på enheten, eller om användaren ska få en ny enhet och användarprogrammet måste flyttas.


5.3 Återställa från en säkerhetskopia

OBS: Återställning från säkerhetskopia ska göras endast om man verkligen behöver det. Om du är osäker kontakta din hjälpmedelscentral eller Abilia för support.

Det som har lagts in efter en säkerhetskopiering som har gjorts efter måndagen för veckovis säkerhetskopiering förviner.

Innan en säkerhetskopia kan återställas måste Rolltalk avslutas.

I Windows startmeny finns en genväg till mappen Rolltalk. I Rolltalk-mappen finns en genväg, "Återställa backup". Denna kan nyttjas för att starta en backup.

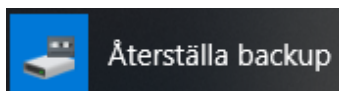

6. Avinstallera Elektronisk PODD

For att starta avinstallationen av Elektronisk PODD, kör programmet "Electronic - PODD Swedish" från USB-minnet.

OBS: För att kunna avinstallera krävs administratörsrättigheter.

- Välj "Ta bort".



- Elektronisk PODD tas bort från enheten.



- Tryck på *Slutför* för att avsluta guiden.



7. Uppdatering av elektronisk PODD



Sök efter uppdateringar ligger som en genväg på skrivbordet. Starta detta program och tryck på *Sök efter uppdateringar*.

Om det finns en ny version av Elektronisk PODD att ladda hem anges detta i listan. Tryck på *Ladda ner* för att ladda ned uppdateringen.

När uppdateringen är nedladdad startar installationen, följ instruktionerna på skärmen.

När Elektronisk PODD har uppdaterats måste man använda de nya PODD 15/PODD 60-filerna för att alla funktioner för redigering och inställningar ska fungera. Om de anpassningar som gjorts i det gamla användarprogrammet ska användas måste det sedan importeras.

Gör så här efter uppdatering:

1. Öppna *PODD Anpassa* från skrivbordet.
2. Välj den nya versionen av PODD 15 eller PODD 60 som valt program. I exemplet nedan är PODD 60 v1.1 valt:



3. Spara den nya PODD-versionen med önskat namn genom att gå till **Administrera program|Spara som**. Det nya filnamnet visas som *Valt program*. Det nya programmet startar, med anpassningsguide om det är valt.
4. I anpassningsguiden (eller gå till **Redigera och inställningar|Inställningar|Administrera program**), tryck på *Importera ändringar*. Följ instruktionerna för att importera de individuella ändringar som har gjorts i den gamla versionen. Se instruktioner för *Importera ändringar* i *Bruksanvisning Elektronisk PODD*.

8. Teknisk information

8.1 Säkerhet och ansvar

Abilia AB har gjort en riskanalys för denna produkt enligt NS-EN 14971 för medicinsk utrustning. Produktens användarhandbok och tekniska specifikationer har utarbetats på grundval av de säkerhetsvärderingar som redovisas i detta dokument.

Vid installation och daglig användning av produkten måste säkerhetsaspekten alltid beaktas. Det är omöjligt att i handboken beskriva alla sätt som produkten inte får brukas på. Om du är osäker på om produkten är korrekt installerad eller konfigurerad bör du kontakta leverantören.

Abilia AB ansvarar inte för eventuella skador, följskador eller förluster till följd av användning, felaktig användning, bristande kontroll, felaktiga inställningar, felaktig anslutning etc. Abilia AB ekonomiska ansvar är under alla omständigheter begränsat till produktens värde.

8.2 Miljö

Emballaget ska återvinnas som pappersavfall.

Produkten ska återvinnas som elektronikavfall när den ska kasseras. Den kan lämnas till alla försäljningsställen som säljer elektronikprodukter, till din leverantör eller till en kommunal återvinningscentral.



8.3 Medföljande artiklar

Art.nr	Benämning	Beskrivning	Antal
	USB-minne	Med licens, programvara och bruksanvisningar	1 st
	Bruksanvisningar	Handbok (detta dokument), Bruksanvisning Elektronisk PODD	2 st

För tillbehör, se www.abilia.se.



Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden
Phone +46 (0)8-594 694 00 | info@abilia.se | www.abilia.se

Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norway
Phone +47 23 28 94 00 | info@abilia.no | www.abilia.no

Abilia UK Ltd, Unit 12 Buckingham Business Park, Swavesey,
Cambridge, CB24 4AE, United Kingdom
Phone +44 (0)1954 281210 | info@abilia.uk | www.abilia.uk

