



Idéhäfte Röstförstärkare



ABILIA

Innehållsförteckning

Röstförstärkning	3
Komma igång	4
Rätt Volym	4
Mikrofonens placering	4
Laddning	4
Om Micro Voice Röstförstärkare	5
Micro Voice	5
Levereras med	5
Headset justerbart beige	5
Headset svart	5
Strupmikrofon	5
Välja tillbehör	6
Headset svart	6
Myggmikrofon	6
Mikrofon handhållen	6
Tips för användning i hemmet	7
Exempel	7
Tips för användning på arbetet	8
I skolan	8
I ett mötesrum	8
Utomhus	8
Tips för användning i en träningssituation	9
Tips för användning på sjukhus	10
Val av mikrofon	10
Registrering av sväljning	10
Produkter och artikelnummer	11
Support	12



Röstförstärkning

RÖSTFÖRSTÄRKAREN GÖR EN SVAG RÖST STARKARE

Den bidrar till att förstärka svagt men tydligt tal till normal ljudnivå och minskar därmed belastningen på stämbanden. Även en viskande röst blir betydligt starkare med röstförstärkare.

Förstärkaren ökar ljudnivån och kan därmed göra det lättare att delta i samtalen. Den kan bidra till ett aktivt deltagande i skolan, på arbetet, i hemmet och på fritiden.

Det kan finnas olika skäl till att rösten sviktar. Man brukar skilja på organiska och funktionella röstproblem. Organiska problem har en rent fysiologisk/anatomisk orsak, medan de funktionella kan bero på att man använder sin röst fel eller överanstränger den.


Oavsett orsakerna till röstproblemen är sannolikheten stor att man sliter onödigt mycket på den röst man har.

Personer med nedsatt hörsel kan också behöva förstärka sin egen röst. Då kan en röstförstärkare vara till god hjälp.

Röstförstärkaren är ett hjälpmedel som kan minska frustration och förhindra att stämbanden överansträngs.

En röstförstärkare är ett tekniskt hjälpmedel som man antingen kan använda då och då eller kontinuerligt.

I det här idéhäftet vill vi ge några bra tips på vad man ska tänka på och hur man kan använda röstförstärkaren.

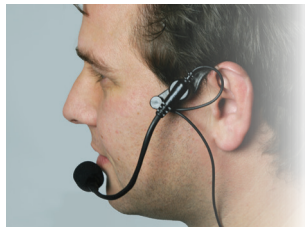

Röstförstärkaren förstärker rösten och minskar belastningen på stämbanden



Den som alltid måste ta i för att höras anstränger troligen sin röst onödigt mycket



Komma igång

I Micro Voice Röstförstärkare är hela förstärkarenheten inbyggd, med en integrerad högtalare. Du kan koppla olika mikrofoner till förstärkaren för olika behov. För att förstärkaren ska fungera bra är det viktigt att placera mikrofonen rätt och använda rätt volym.

RÄTT VOLYM

Volymknappen använder man för att få maximal förstärkning utan att ljudet blir skrikigt. För korrekt inställning av volymen skruvar du upp volymen tills du hör att röstförstärkaren börjar bli instabil. Sänk då volymen något för att få en god förstärkning.

Rundgång är ett fenomen som uppstår när mikrofon och högtalare har placerats för

MIKROFONENS PLACERING

Mikrofonen bör placeras i mungipan. Då får man den bästa förstärkningen samtidigt som man undviker att förstärka "raspiga" andningsljud.

Avståndet mellan ljudkällan (munnen) och mikrofonen bör vara så konstant som möjligt för att få ett jämnt ljud. Vid halvsidig ansiktsförslamning placeras mikrofonen på den sida som har den friska mungipan för att ljudet ska bli så tydligt som möjligt.

LADDNING

När batteriindikatorn på röstförstärkaren lyser är det dags att ladda batterierna med den medföljande laddaren. Micro Voice har inbyggda laddningsbara batterier.



Om Micro Voice Röstförstärkare

Micro Voice har synnerligen god och klar ljudkvalitet och passar dig som önskar få god röststyrka med en diskret lösning. Lämplig för personer med svag eller viskande röst orsakat av sjukdom eller skada. Röstförstärkaren är också perfekt för personer som ska tala i större sammanhang, som t.ex. reseguider, träningsinstruktörer, lärare, föredragshållare osv.

MICRO VOICE

Modellen har en god design och väger lite. Volymkontrollen är intuitiv med färgad led-indikator och mute-funktion. Batteriet har mycket bra kapacitet och laddningen går snabbt. Micro Voice kan användas i flera dagar utan att laddas (40 timmars aktiv användning och 200 timmars standby).



MICRO VOICE, ART. NR: 462220

I produkten ingår: Laddare, Headset justerbart beige, Strumpmikrofon, Bältesklips, Halsrem, Midjebälte och bruksanvisning.

MICRO VOICE, ART. NR: 462230

I produkten ingår: Laddare, Headset svart, Bältesklips, Halsrem, Midjebälte och bruksanvisning. I produkten ingår inte Strumpmikrofon.

HEADSET JUSTERBART BEIGE

Nackbygeln har en lätt, böjlig mikrofonomarm som gör det enkelt att placera mikrofonen rätt. Den väger lite, är diskret och ger mycket god ljudkvalitet och förstärkning. Den ger också god rörelsefrihet. Fördelen med en nackbygel är att man har båda händerna fria.


HEADSET SVART

Standardmikrofonen med nackbygel är lätt att ta av och på och ger mycket bra ljud. Nackbygeln har en böjlig mikrofonomarm som kan justeras något. Det gör det enkelt att placera mikrofonen rätt vid munnen.

STRUMMIKROFON

Strumpmikrofonen förstärker ljudet vid struphuvudet. Är också mycket lämplig för att registrera sväljning.



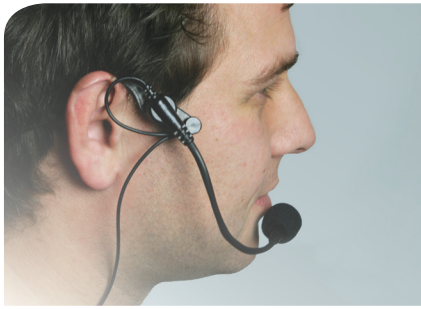

Välja tillbehör



HEADSET SVART

Levereras med produkten art. nr:462230. Kan också levereras som tillbehör.



MYGGMIKROFON

Levereras med en liten klämma som gör den lätt att fästa på kläderna.



STRUPMIKROFONEN

Levereras med produkten art. nr:462220. Kan också levereras som tillbehör.



Tips för användning i hemmet

En del personer som är beroende av röstförstärkare tycker det är besvärligt när de ska påkalla uppmärksamhet. Ett sådant problem kan förstärkas om partnern har nedsatt hörsel.

EXEMPEL

Pensionärerna Tina och Hans bor i en småstad. Tina har fått diagnosen Parkinsons och hennes röst är därför svag. Det gör inte saken bättre att Hans hör dåligt och inte tycker om att använda sin hörapparat. Det blir svårt att kommunicera. Korta meningar fungerar, men att prata om vardagliga ting är inte längre så lätt. Nu har Tina börjat använda Micro Voice Röstförstärkare och ställt in volymen så att Hans kan höra allt hon säger.

Micro Voice Röstförstärkare

EXEMPEL

Anne bor i ett tvåvåningshus tillsammans med sina döttrar. Anne har MS. Barnen har sina rum på andra våningen och Anne måste naturligtvis kunna nå dem från första våningen utan att behöva gå uppför trappan. De har löst problemet med hjälp av Micro Voice Röstförstärkare.

Micro Voice Röstförstärkare

Tips för användning på arbetet



Micro Voice Röstförstärkare har synnerligen god ljudkvalitet och lämpar sig mycket väl som hjälpmedel vid samtal.

Många lärare som har ansträngt sin röst under flera år behöver förstärka sin röst när de undervisar.

EXEMPEL

Tora är lärare och har fått konstaterat att hon lider av fonasteni (rösttrötthet), efter att under många år ha undervisat i stora gymnastiksalarna med mycket oväsen. Lösningen för henne är Micro Voice. Som lärare måste hon kunna röra sig obehindrat och hon använder för det mesta headset justerbart beige.



UTOMHUS

Micro Voice Röstförstärkare är mycket lämplig att användas utomhus tack vare den goda ljudkvaliteten och batterikapaciteten.

EXEMPEL

Kalle är ridlärare. Han har stora problem med rösten, i synnerhet vid utomhusträning när han inte kan använda ridskolans högtalaranläggning. Med Micro Voice Röstförstärkare hörs han bra!



Tips för användning i en träningssituation

En röstförstärkare kan vara ett bra hjälpmedel vid artikulationsträning. I pedagogiska sammanhang kan en röstförstärkare bidra till att förbättra träningen genom att göra det lättare för den som har talproblem att uppfatta talkvaliteten. Detta kan vara värdefullt även om talet inte är tydligt. Röstförstärkaren kan motivera till ökad ansträngning. Det är lättare att koncentrera sig när man pratar i en mikrofon.

Att använda röstförstärkare vid barns språkinläring kan ge många möjligheter. Barnet får återkoppling på sin egen röst och bättre förståelse för sin egen ljudproduktion och artikulation. Att höra sin egen röst kan ge bättre självkänsla.

RÖSTFÖRSTÄRKAREN KAN ANVÄNDAS FÖR ATT

- Uppfatta den egna rösten
- Höra resultatet av de egna talförsöken
- Stimulera till användning av den egna rösten
- Höra egna och andras ljud
- Barn med nedsatt hörsel ska få en extra ljudförstärkning
- Få uppmärksamhet
- Inläring och turtagning i lek och samtal
- Ge återkoppling på den egna rösten och bättre förståelse av den egna ljudproduktionen och artikulationen





Tips för användning på sjukhus

EXEMPEL

På sjukhusens rehabiliteringsavdelningar används Micro Voice Röstförstärkare ofta vid läkarbesök och i samtal med patienter med svag röst. Då blir det lättare att höra vad patienterna säger, samtidigt som man har ögonkontakt och kan observera ansiktsuttrycket under samtalen.

VAL AV MIKROFON

Strupmikrofonen har ingen bygel som går runt huvudet och kan vara ett behagligt alternativ för den som sitter i rullstol med nackstöd, eller ligger i sängen.

Myggmikrofonen kan också vara ett praktiskt tillbehör i sammanhanget, speciellt för den som inte klarar att lyfta armarna över huvudet.

Röstförstärkare med strupmikrofon eller myggmikrofon



REGISTRERING AV SVÄLJNING VID DYSFAGI

Dysfagi betyder ät- och sväljsvårigheter. När man använder Micro Voice Röstförstärkare med strupmikrofon hörs ett tydligt sväljljud när mat eller dryck sväljs ner på rätt sätt. Denna lösning kan man också använda som en del av diagnosarbetet.

Röstförstärkare med strupmikrofon eller myggmikrofon



PRODUKT

Micro Voice Röstförstärkare

Levereras med:

Headset justerbart beige
Strupmikrofon

Art.nr. 462220

Art.nr. 462201

Art.nr. 462203

Micro Voice Röstförstärkare

Levereras med:

Headset svart

Art.nr. 462230

Art.nr. 462206

TILLBEHÖR

Strupmikrofon

Headset svart

Mikrofon Handhållen

Myggmikrofon

Vindhätta till mikrofon svart, 10 pack

Art.nr. 462203

Art.nr. 462206

Art.nr. 151052

Art.nr. 151054

Art.nr. 462204





Det svåraste med att prata med varandra är egentligen att skratta. Men då bara gör vi det.

SUPPORT?

Support och hjälp med våra produkter får du genom att ringa 08-594 694 00 eller skicka e-post till info@abilia.se

ÖNSKAR DU BESÖK?

Vi kommer gärna ut och visar våra hjälpmedel. Vi har säljare runt om i landet. Du kan ta kontakt med din länsansvariga säljare genom att ringa 08- 594 694 00 eller skicka e-post till info@abilia.se för att boka en tid.

VILL DU VETA MER?

Vi håller kurs, workshops och presentationer runt om i Sverige. På vår hemsida www.abilia.se kan du läsa mer. Här finner du också information om våra produkter, bilder och filmer.

Abilia finns på Facebook, www.facebook.com/AbiliaSverige

Kontakta oss på telefon: 08-594 694 00 eller e-post: info@abilia.se