

Rekonditionering Falck 6901 EpiTon



Ändringar historik, version

Datum och sign.	Beskrivning:

EpiTons funktioner beskrivs utförligt i bruksanvisningen.

Rekonditioneringsanvisning:

- Koppla upp och utför följande funktionstest:
- Kontrollera att alla potentiometrar är ok.
- Kontrollera att larmutgången sänder signal till externt larm.
- Kontrollera strömförsörjning (8311) kabel och kontakt, ok.
- Komplettera med bruksanvisning mm.
- Komplettera med bormall för uppsättning av larmet.
- Packas i passande låda
- Alla delar rengöres med teknisk sprit.
- Byt ut Mikrofonsensor innan den lämnas ut till ny brukare. Art.nr. 323910

Vad som följer med:


- Falck 6901 EpiTon
- Strömförsörjning 8311 12VDC
- Plastmapp för bruksanvisningar
- Enkel bruksanvisning (laminerad)
- Bruksanvisning
- Loggschema (laminerat)
- Överlåtelseprotokoll
- Larmkabel, 6p modular och 3,5mm han-kontakt i andra änden.
- Larmkabel, 6p modular-6p modular (KK-ledning)
- Mikrofonsensor med kabel och kontakt (8pin modular)
- Påse med skruv och plugg
- Långa buntband 3st.



Uppkoppling:

- Koppla upp enheten på följande sätt:
- Koppla in strömförsörjning till enheten och vägguttaget
- Vrid ratt "Känslighet" till 0
- Koppla in sensorkabeln i ingång "Sensor"
- Koppla in ett larm i utgång "Utgång" (Ep-larmet måste ha ström för att vara i läge NO)
- Enheten är klar att användas

skall stå i ON-läge

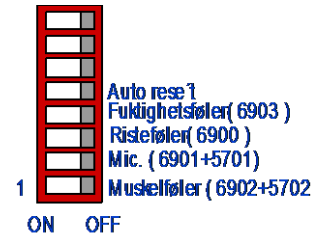

Funktionstest:

- När EpiTon är uppkopplad, kontrollera följande:
- Vrid ratt "Varaktighet" till 0
- Prata i mikrofonen och kontrollera att Ljudlampan lyser
- EpiTon registrerar ljud och sänder en slutning till Utgången
- Testa med att ställa upp ratten Känslighet och kontrollera att ett mindre ljud i mikrofonen får Ljudlampan att lysa och EpiTon sänder en slutning
- Testa olika inställningar på rattarna och kontrollera att de fungerar

