

Swingbo VTi

Monteringsanvisning

I-fit 2-punkt / 4-punkt bälte

Ver. 2016-08-29



Höftbälte 2-punkt





Höftbälte 4-punkt

Trä bältet genom bältesfästet underifrån, och sen tillbaks genom justeringsspännet.



Våra bälten kan monteras på flera olika sätt, här visar vi några exempel.

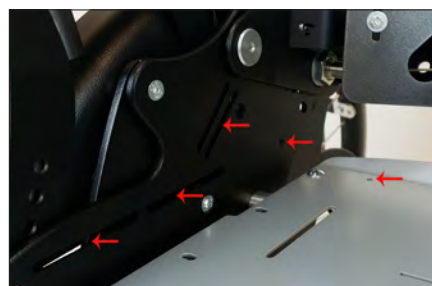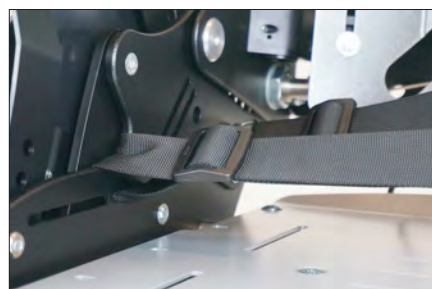

Fästpunkter.



medemagruppen

Swingbo VTi

Monteringsanvisning

I-fit Brösthälte

Ver. 2016-08-29



Brösthälte

Trä bältet genom bältesfästet och sen tillbaka genom justeringsspännet.



Vårt brösthälte kan monteras på flera olika sätt, här visar vi några exempel.



Swingbo VTi

Monteringsanvisning

I-fit Väst

Ver. 2016-08-29



Väst

Trä bältet genom fixlocken , och knäpp åt fixlocken.



Exempel på hur vår väst kan monteras.

Alt 1, Fixlock



Fixlock uppe.



Fixlock nere. Justeringsmöjligheter i spår.

Alt 2. Stealth spänne



Justeringsmöjligheter i spår.


Swingbo VTi / Cleo

Monteringsanvisning

Huvudstöd Stealth

Ver. 2016-09-11


Montera fästet för Stealth huvudstöd bak på ryggen i de förborrade hålen.
För ner staget på huvudstödet i fästet och dra åt fingerskruven i önskad position.

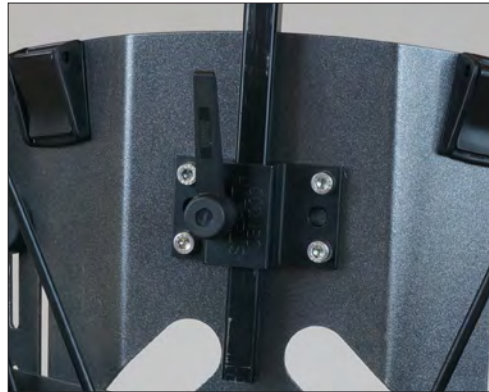

Huvudstöd Stealth Comfort med höjd, djup och sidledsjustering.



Huvudstöd Stealth i2i höjd, djup och sidledsjustering.

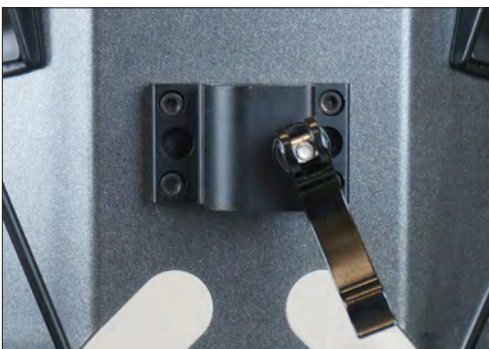

Swingbo VTi

Monteringsanvisning

Huvudstöd / förlängd rygg

Ver. 2016-08-29

Verktyg som krävs:

Insexnyckel 4 mm
Fast nyckel 10 mm



1)

Öppna dragkedjan i stolens ryggklädsel och för ner huvudstödet bakom rygglattan.



2)

Sätt i skruvarna med den platta skruvskallen på insidan av stolen. Samtliga fyra skruvar ska sättas dit.



3)

Bricka och mutter skruvas fast på baksidan av stolsryggen.



Swingbo VTi / Cleo

Monteringsanvisning

Abduktionskloss med skruv.

Verktyg som krävs:

4 mm insexnyckel
8 mm fast nyckel

1.

För installationen behöver du följande verktyg och hjälpmedel:

- lång tång
- Insexnyckel storlek 4 och 2,5
- Fast nyckel storlek 7 och 8

2.

Placera bottenplattan vid den främre kanten av sittplattan.

- Sätt i två M4 skruvar


3.

Använd tång för att montera M4 muttrar på dessa två M4 skruvar. Dra inte åt skruv ännu.

4.

Montera nu fästet som visas med en M5 skruv.

- Säkra skruven med en M5 mutter men dra inte åt skruv ännu.

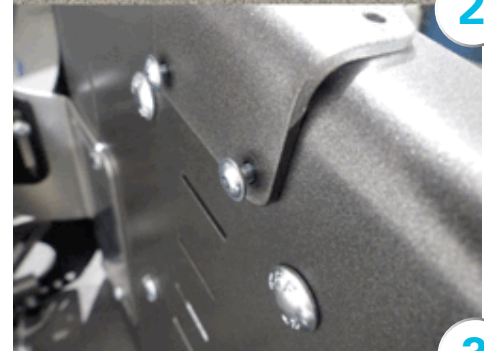

Monteringsanvisning för bord



Bordet kan monteras med hjälp av stöd på armstöden.

Dessa är utformade efter armstödens avstånd.

- Lossa den räfflade muttern och tryck på klämman.
- Placera bordet på armstöden.
- Dra åt den räfflade muttern.

Swingbo VTi

Monteringsanvisning

Fotplattor delade

Monteras utan verktyg

1)

Trä fotplattan på benstödsrören.



2)

Dra åt fingerskruvarna i önskad höjd.



Delad fotplatta kan även monteras direkt på mittmonterat benstödsrör.





medemagrupper

Swingbo VTi

Monteringsanvisning

Vadstöd hel

Ver. 2016-09-11

Monteringen kräver inga verktyg



- 1)
Placera vadstödet på benstödsrören i önskad höjd.



- 2)
Skruva fast med hjälp av fingerskruvarna.





medemagrupper

Swingbo VTi

Monteringsanvisning

Vadstöd delade

Ver. 2016-09-11


Monteringen kräver inga verktyg



- 1)
Placera vadstödet på benstödsrören i önskad höjd.



- 2)
Skruva fast med hjälp av fingerskruvarna.

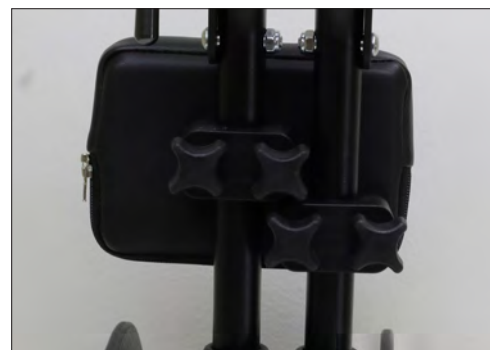

Swingbo VTi

Monteringsanvisning

Bröst /Thorax stöd

Ver. 2016-08-29

Verktyg som krävs:

Insexnyckel 3 mm

Fast nyckel 8 mm



1)

Ta bort stolens ryggklädsel och placera bröst/thoraxstödet i lämplig höjd och bredd. Stödet monteras i de vertikala spår i ryggplattan.




2)

Sätt i skruvarna med den platta skruvskallen på insidan av stolen.

3)

Bricka och mutter skruvas fast på baksidan av stolsryggen

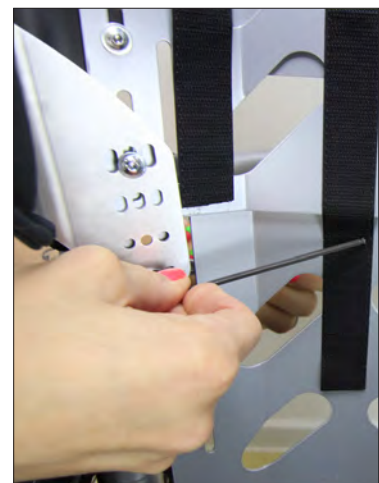


Swingbo VTi

Monteringsanvisning

Stealth bålstöd

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Verktyg som behövs:
Insexnyckel 4 mm



- 1)
Placera bålstödet klämfäste runt rullstolens rygggrör. Se till att klämfästet sitter ihop ordentligt.

Var uppmärksam på att bålstöden är olika på höger och vänster sida.



- 2)
Placera därefter bålstödet mot fästet. Skruva dit bålstödet med de två medföljande skruvarna.



- 3)
Bild på färdigmonterat bålstöd.



Swingbo VTi

Monteringsanvisning


Bålstöd

Monteras utan verktyg



1)

Ta bort stolens ryggklädsel och placera bålstödet i lämplig höjd och bredd. Stödet monteras i de vertikala spåren i ryggplattan.

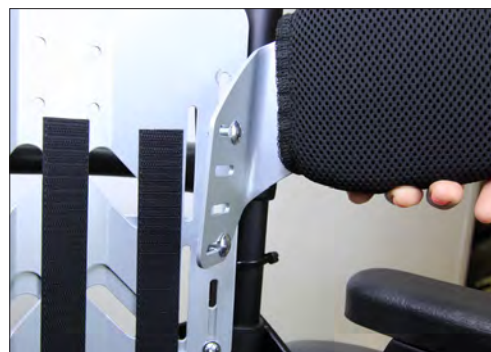


2)

Sätt i skruvarna med den platta skruvskallen på insidan av stolen.



3)

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Bålstödet skruvas fast från baksidan med den medföljande fingerskruven.







medemagruppen

Swingbo VTi

Monteringsanvisning

Tramprör


Ver. 2016-09-11

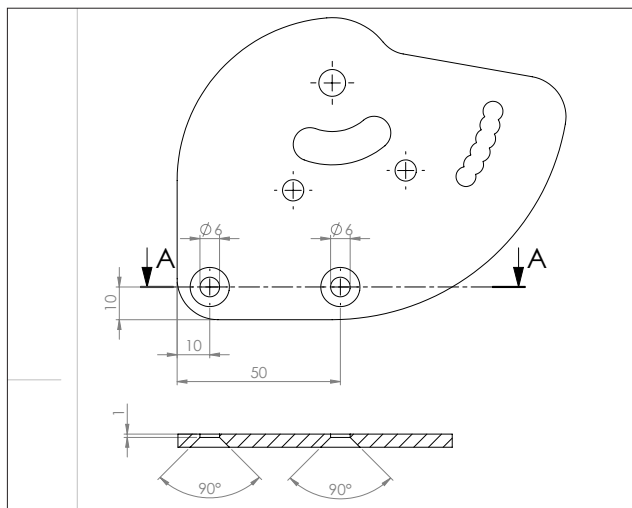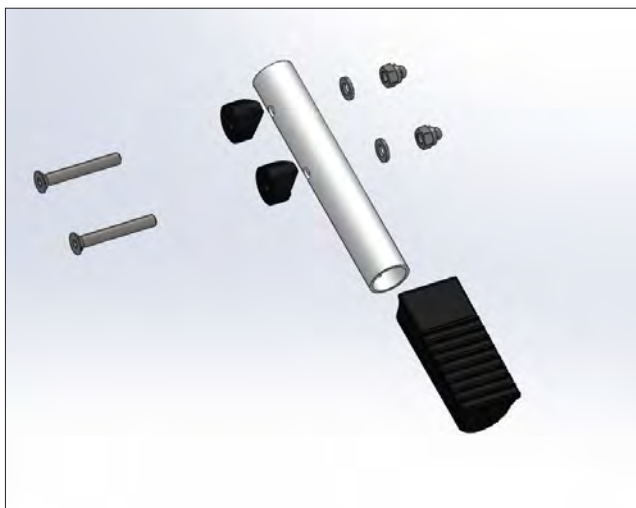

Swingbo VTi

Monteringsanvisning

Syrgashållare

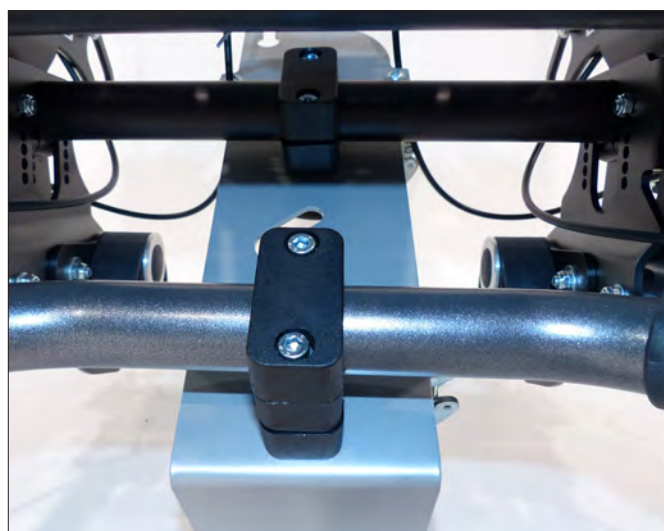

5.

Nu montera fästet som visat med en andra M5 skruv och en bricka.


- Säkra skruven med en M5 mutter men dra inte åt skruv ännu.



6.

Nu sätts de andra två M4 skruvar i bottenplattan.

- Använd tång för att montera M4 muttrar på dessa två M4 skruvar.

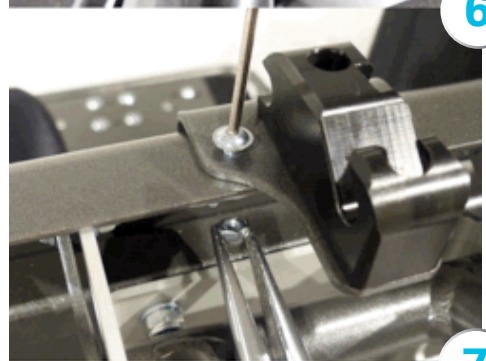


7.

Dra nu åt alla 6 skruvarna.



7.

Skruvanslutningar ska se ut så här.

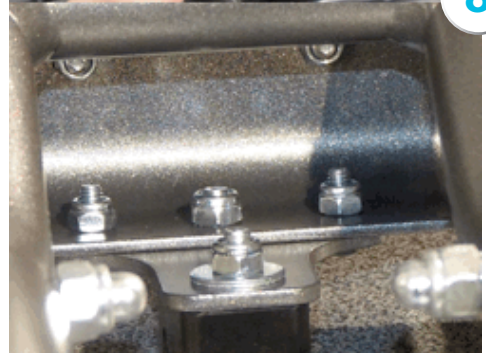

Swingbo VTi

Monteringsanvisning

Sufflett

Ver. 2016-09-11

Verktyg som krävs:

- Insexnyckel 3 mm
- Blocknyckel 8 mm

Paketet innehåller:

- 1x sufflett
- 2x fästen
- 4x skruv/bricka/mutter



1)

Ta bort stolens ryggklädsel och placera sufflettens fästen i lämplig höjd. Fästena monteras i de vertikala spåren i ryggplattan.



2)

Sätt skruvarna med den platta skruvskallen på insidan av stolen.



3)

Bricka och mutter skruvas fast på baksidan av stolsryggen.

4)

Sätt dit suffletten i fästena.



Swingbo VTi

Monteringsanvisning

Droppställning

Ver. 2016-09-11

Paketet innehåller:

- Droppställning med hållare för droppåse eller flaska
- Fäste för droppställningen
- Klämbäck för 25 mm rör
- Klämbäck för 22 mm rör

Verktyg som krävs:

- Insexnyckel 5 mm (klämbäckar)
- Insexnyckel 8 mm (vinkeljustering)

1)
Montera hållaren för klämbacken för 22 mm rördiameter på rullstolens nedre körhandtagsbygel. (bild 2)

2)
Alternativt monteras hållaren med klämbacken för 25 mm rördiameter på rullstolens övre körhandtagsbygel, strax bakom körhandtagets led. (bild 3)

3)
Dra åt samtliga skruvar.

4)
Sätt fast droppställningen i hållaren. (bild 4)

5)
Dra fast ställningen genom att skruva åt fingerskruv (A).





medemagruppen

Swingbo VTi

Monteringsanvisning


Ankelfixering I-fit

Ver. 2016-09-13

Verktyg:

Insex 3, 4 mm
Fastnyckel 8, 10 mm
Stjärnskruvmejsel.

1)
Montera av fotplattan, 4 skruv.

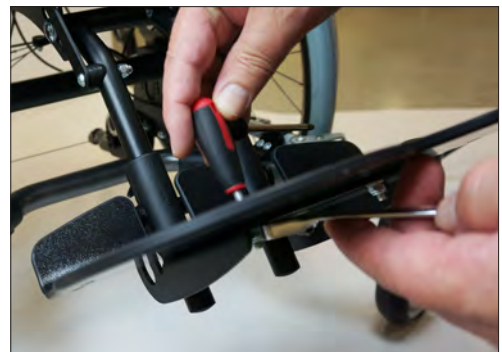

2)
Sätt de försänkta stjärnskruven i de främre mitthålen.



3)
Montera byglarna med kupolmuttrarna.



- 4)
De övriga sex infästningarna ska monteras med skruv.



- 5)
Träd remmen genom byglarna.



- 6)
Gör samma sak på motsvarande sida.

- 7)
Montera tillbaks fotplattan.

Monteringsanvisning g: "Förankringskit" **SWINGBO-VTi** (3248-7300)

Du behöver följande verktyg vid monteringen:

- Insexnyckel 4 mm
- Skruvnyckel (storlek 10)

Originalförpackningen innehåller följande komponenter:

- 1x förankringsfäste (bak), höger (A)
- 1x förankringsfäste (bak), vänster (B)
- 1x förankringsfäste (fram), vänster (C)
- 1x förankringsfäste (fram), höger (D)

Montera delarna på följande sätt:

- Ta loss bakhjulet (snabbkopplingsaxel).
- Lossa och ta bort de förmonterade skruvarna med kullrigt huvud (M8x20) på "förankringsfästet (fram), höger".
- Skruva fast förankringsfästet framtill på sätesstödet med skruvarna med kullrigt huvud såsom visas på bilden.

Se till att det vita klistermärket (med kroksymbolen) sitter på insidan.



Dra åt alla skruvar.


- Lossa och ta bort de förmonterade skruvarna med kullrigt huvud (M8x20) på "förankringsfästet (bak), höger".
- Skruva fast förankringsfästet baktill på sätesstödet med skruvarna med kullrigt huvud såsom visas på bilden.

Se till att det vita klistermärket (med kroksymbolen) sitter på insidan.



Dra åt alla skruvar.

Gör på samma sätt när du monterar "förankringskittet" på vänster sida.

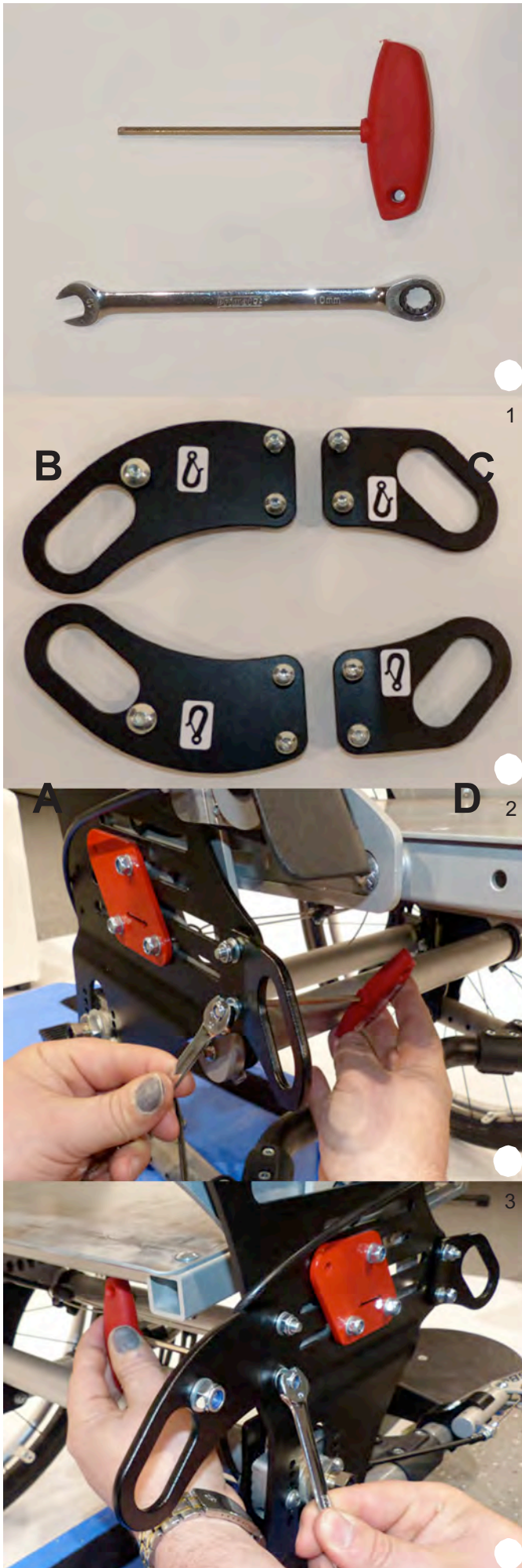

Monteringsanvisning för ekerskydd

För monteringen behövs följande verktyg: (bild 1)

- Elektrisk skruvdragare, borrar 9 mm

Paketet innehåller:

- Ekerskydd (2x)

- Fästclips (12x)

1



2



3



4

- Placera ekerskyddet på hjulet. Se till att urtagen på ekerskyddet passar mot drivringsfästena. (bild 2)
- Markera fixeringspunkterna på insidan av ekerskydden med en penna. Fixeringspunkterna ska vara mitt på hjulets ekrar (ca 9 cm från hjulnavet).
- Använd symmetriska fixeringspunkter.
- Hjul med 36 krysssekrar och trumbromsar behöver 3 x 2 fästclips.
- 24" hjul med 24 radialekrar behöver 6 clips.
- 20" och 22" hjul med 20 radialekrar behöver 5 clips.
- Borra hålen som markerats ut. (bild 3)
- Rensa hålen på skräp.
- Pressa fast fästclipsen på ekrarna. (bild 4)

Monteringsanvisning för ankelfixering art nr 3201-6400 och art nr 3203-6400

För monteringen behövs följande verktyg:
(bild 1)

- Elektrisk skruvdragare, borrh 6 mm
- Blocknyckel, 8 mm

1



2

Paketet innehåller: (bild 2)

- Ankelfixering (2x)
- Fästöglor (4x)
- Brickor (4x)
- Muttrar (4x)



3

- Positionera barnets fötter på fotplattan. Markera ytterkanten av ankelfixeringens fästrem på fotplattan för borrhål. Borrhålen ska placeras med 45 mm mellanrum. (bild 3)
- Gör likadant för fästremmen på fotens insida.


4



- Borra hålen som markerats i föregående steg. (bild 4)



- Sätt i de fyra fästöglorna (bild 5) och skruva fast dem på fotplattans undersida (bild 6).

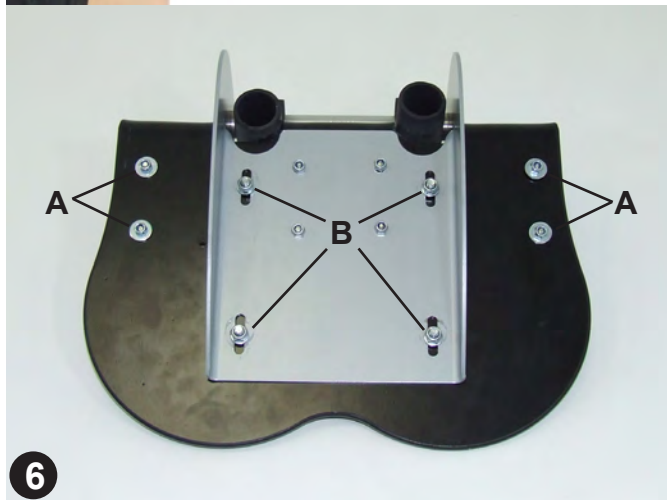

- Använd bricka och mutter för att skruva fast skruvarna i den yttre kanten (bild 6, position A)



- Endast mutter används för att skruva fast de inre fästpunkterna (bild 6, position B)
- Positionera barnets fötter med ankelfixeringen placerad som på bild 7.
- Se till att fästremmens spänne är placerat enligt anvisning (bild 7, position A).



- För fästremmen genom den monterade fästöglan i fotplattan (bild 8).



9

- För tillbaka fästremmen genom ankelfixeringens spänne (bild 9).



10

- Förankra fästremmen (bild 10).



11

- Fästremmen förs in i spänner nerifrån och uppåt enligt anvisning (bild 11).




12




13


- Klipp av fästremmen med en sax (bild 12).
- Bränn klippytan med en tändare enligt anvisning (bild 13).
- Upprepa steg 7 till 13 på fotens insida, därefter på ankelfixering på barnets andra fot.

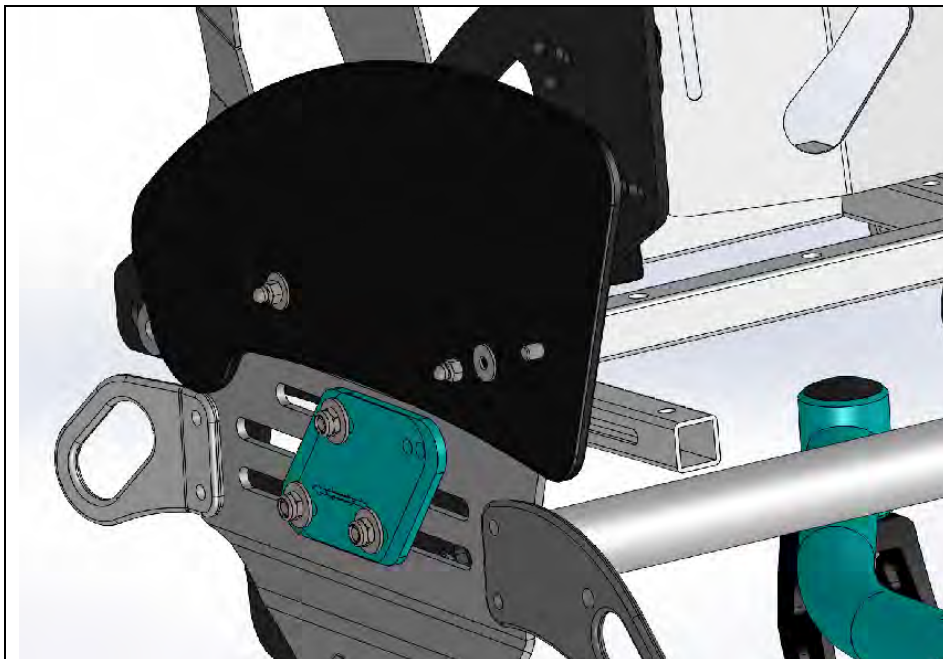

Ta bort rullstolens stänkskärm samt det integrerade bromssystemet. Montera det enkla, raka sideskyddet istället för stänkskärmarna.

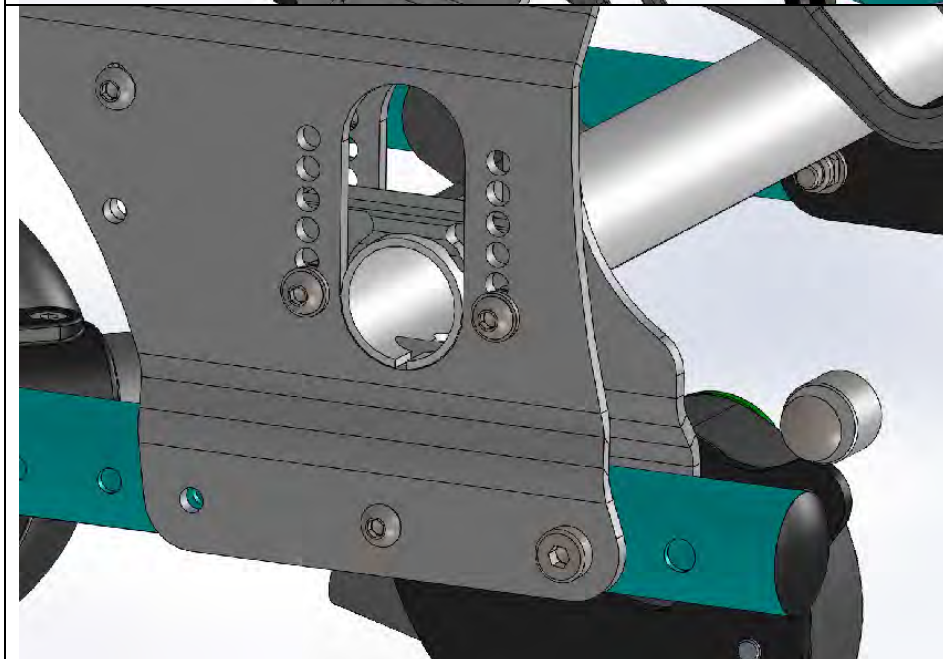


Ta bort adapterna för cambervinkel från rullstolens bakaxel. Placera bakaxeln i den nedersta positionen, som bilden visar.

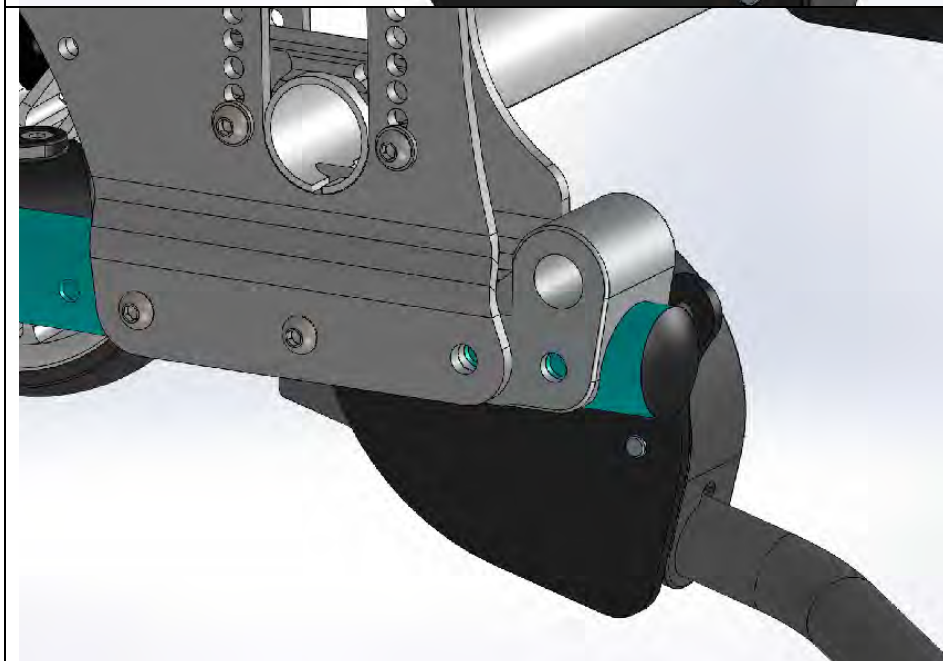


Ersätt plasticskenorna för sitsen med adapter för 16" transporthjul. Monteras med två st M6 skruvar.




Montera bromsens delar enligt bilden. Använd de längre M8 delarna till bromsens adapterplatta. Bromsens adapterplatta möjliggör olika monteringsvinklar för bromsmekanismen.

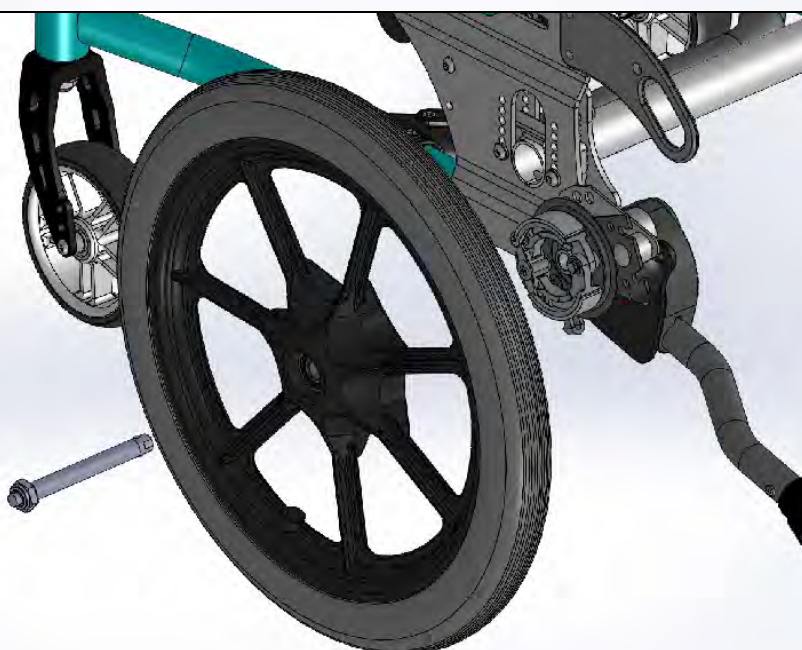

Installera bromsvajrarna och bromsspakarna. Montera 16" trumbromsade hjul med quickrelease axel (98 mm).

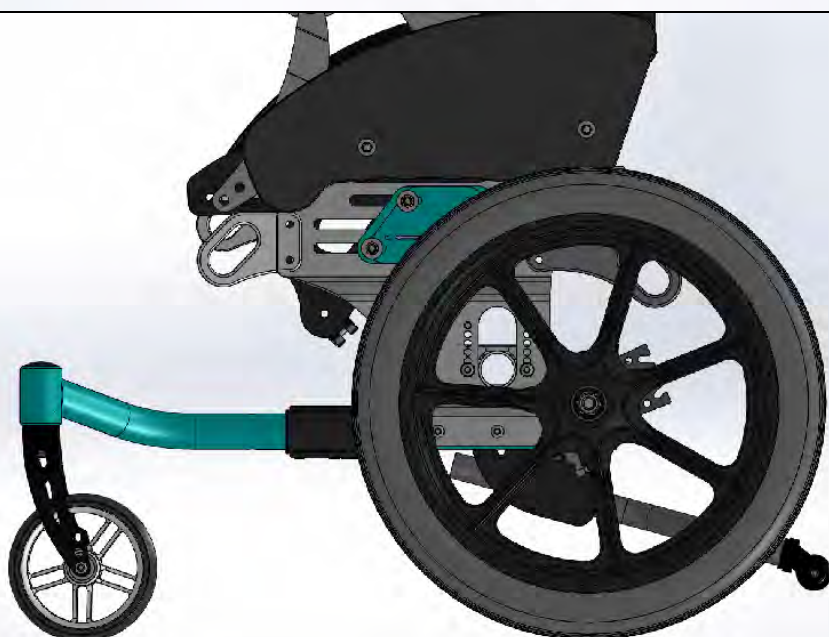

Korrigerar tippskyddets längd. Bilden visar monteringen för låg sitthöjd med kort länkhjulsgaffel för Swingbo sb 24-30 cm.

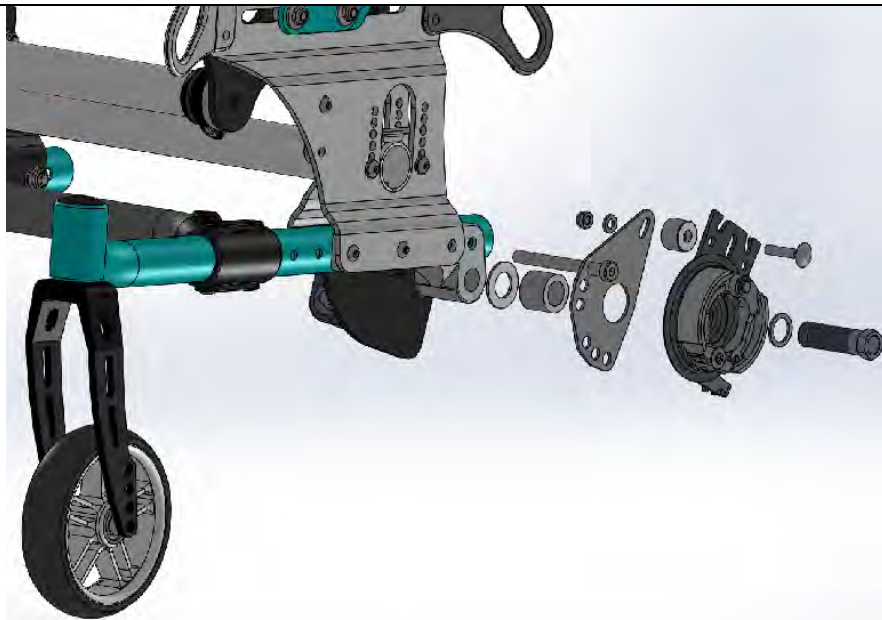

Swingbo Vti sb 32-26 med lång länkhjulsgaffel har två alternativa monteringspositioner. Som beskrivet ovan, men med länkhjulen monterade i översta hålet, alternativt med 16" adaptarna vända nedåt (se bild). Montering av bromsmekanismen är den samma, oavsett hjulposition.



125 mm länkhjul måste monteras i framgaffelns nedersta hål.

Monteringsanvisning g: "Förankringskit" **SWINGBO-VTi** (3248-7300)

Du behöver följande verktyg vid monteringen:

- Insexnyckel 4 mm
- Skruvnyckel (storlek 10)

Originalförpackningen innehåller följande komponenter:

- 1x förankringsfäste (bak), höger (A)
- 1x förankringsfäste (bak), vänster (B)
- 1x förankringsfäste (fram), vänster (C)
- 1x förankringsfäste (fram), höger (D)

Montera delarna på följande sätt:

- Ta loss bakhjulet (snabbkopplingsaxel).
- Lossa och ta bort de förmonterade skruvarna med kullrigt huvud (M8x20) på "förankringsfästet (fram), höger".
- Skruva fast förankringsfästet framtill på sätesstödet med skruvarna med kullrigt huvud såsom visas på bilden.

Se till att det vita klistermärket (med kroksymbolen) sitter på insidan.



Dra åt alla skruvar.


- Lossa och ta bort de förmonterade skruvarna med kullrigt huvud (M8x20) på "förankringsfästet (bak), höger".
- Skruva fast förankringsfästet baktill på sätesstödet med skruvarna med kullrigt huvud såsom visas på bilden.

Se till att det vita klistermärket (med kroksymbolen) sitter på insidan.



Dra åt alla skruvar.


Gör på samma sätt när du monterar "förankringskittet" på vänster sida.

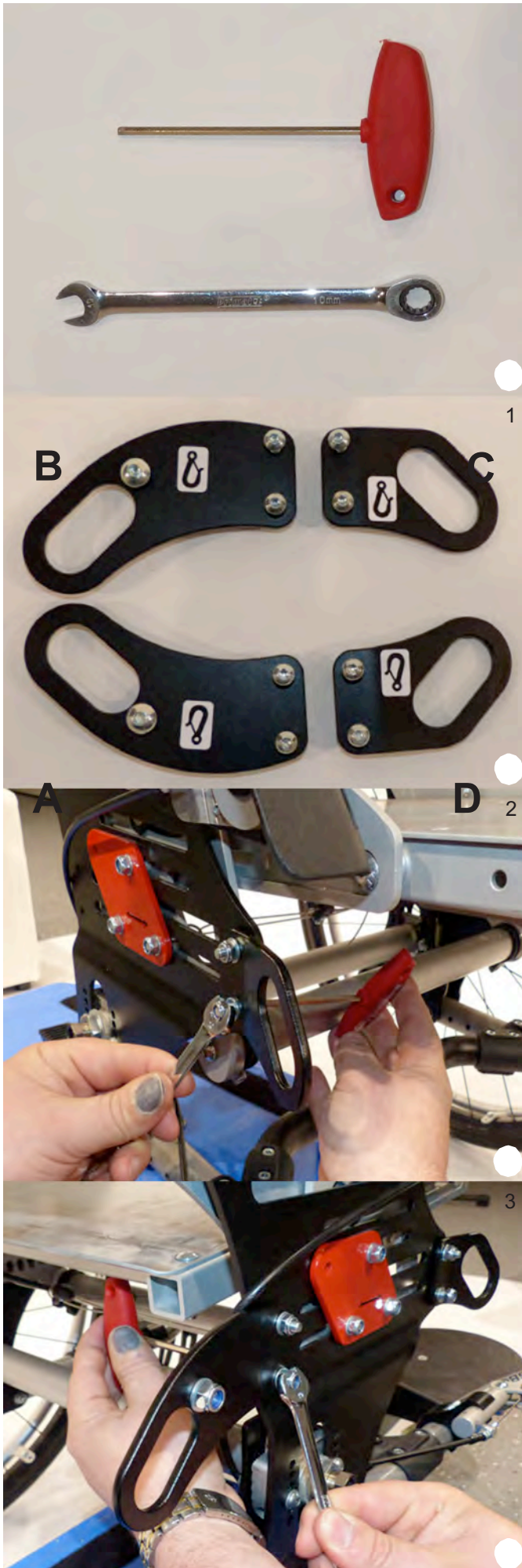

Monteringsanvisning för **SWINGBO-VTi** främre utomhusdel

Förpackningen innehåller följande komponenter:

- 1x förmonterad främre utomhusdel
- 2x förmonterade rör med ställring
- 1x spärr, fram, vänster
- 1x spärr, fram, höger

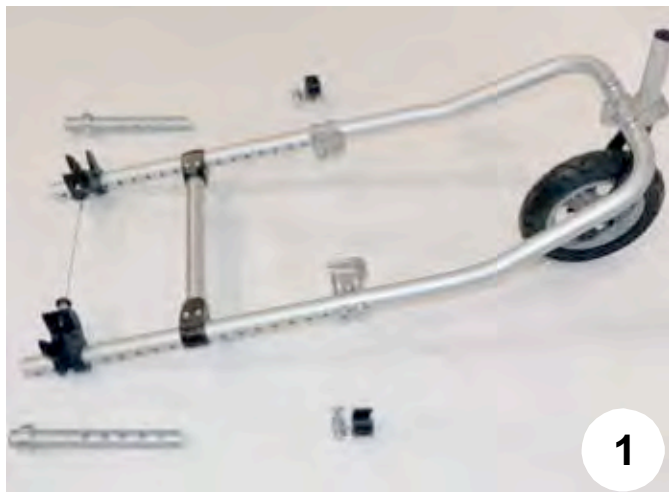


Du behöver följande verktyg vid monteringen:


- Insexnyckel, storlek: 4, 5, 8
- Skruvnyckel, storlek: 13
- Momentnyckel (insex), storlek 8, inställd på 25 NM
- Borrmaskin med borrarstorlek 6 (ej på bild)




I anvisningarna visas monteringen på den ena sidan av ramen. Gör på motsvarande sätt på den andra sidan.

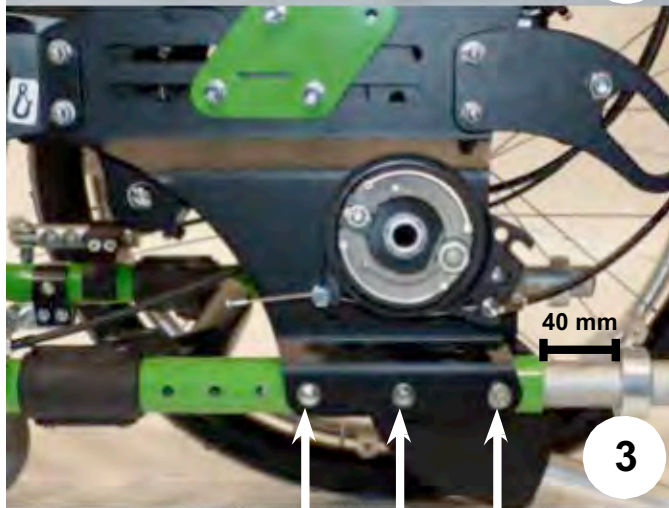

- Lossa och ta bort de tre markerade skruvarna och sätt in det förmonterade röret med ställring i ramröret.
- Kontrollera att avståndet mellan ramröret och ställringen är **40 mm** (såsom visas på bild 3).

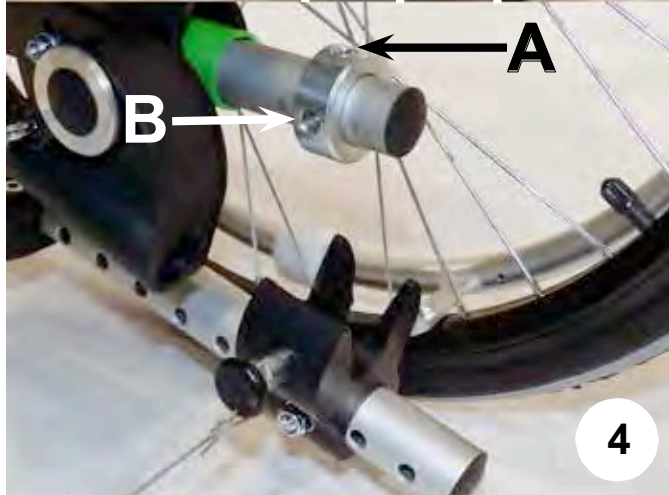

- Rikta insexskruven upptill (A) och borrhålet inåt (B).

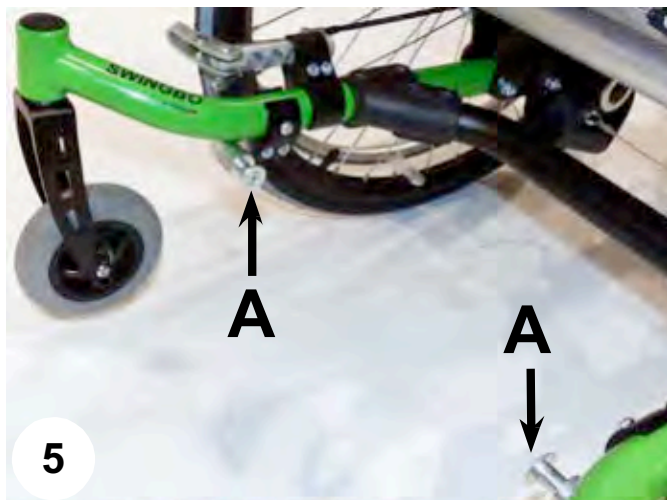


- Skruva fast frontfästet på sidoramen.
- Utdragsadaptorn (A) ska peka inåt (se bild 5).



- Justera utdragsadaptorn så att avståndet till mitten av ställringen är exakt **425 mm** (se markeringen på bild 6).



- Dra inte åt skruvarna ännu.

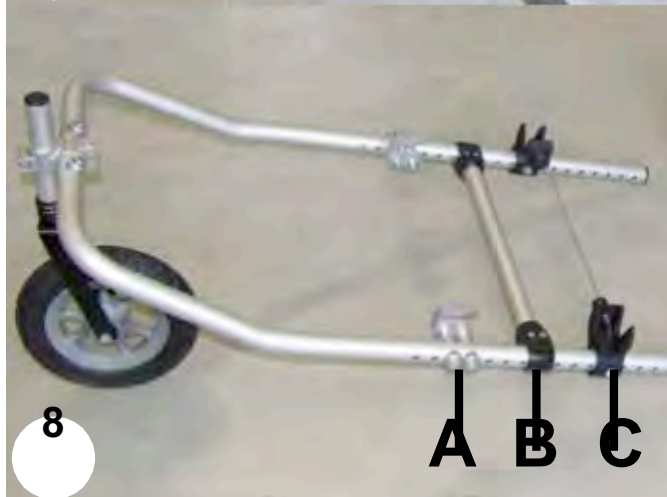

- Justera den bakre kroken (A) på den främre spärren och justera spärrhuset (C) på motsvarande sätt efter ramlängden och efter den förmonterade ställringen och utdragsadaptorn.
- Avståndet mellan utomhusframhjulet och fotplattan kan justeras med hjälp av hålen.
- Montera stabiliseringsstången (B) när du har gjort alla justeringar.




9



10

- Framhjulscaffeln kan även användas som handtag.
- Om rören på den främre utomhusdelen sticker ut bakåt kan de kapas.
- Men tänk på att fotstödet skjuts framåt om sittdjupet utökas.

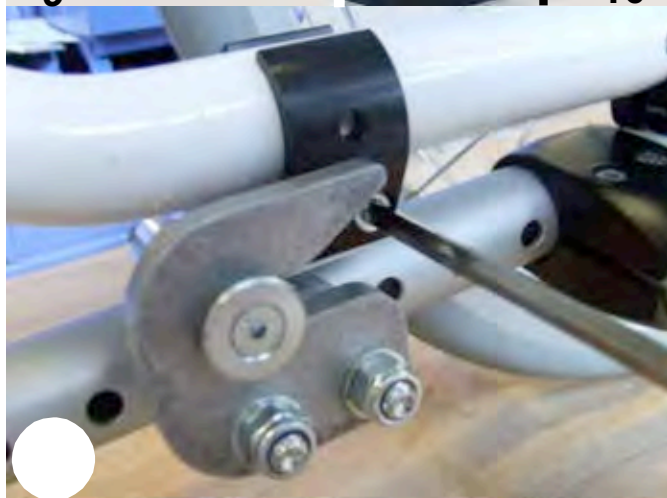

11

- Ställ in den främre utomhusdelen på båda sidorna med de bakre krokarna över ställringarna.



12

- Lyft upp rullstolens framhjul tills du hör att (det bakre) huset på spärrlåset klickar fast i ställringarna.
- Justera låsdelarna vid behov.
- Dra nu åt alla skruvar.



Dra åt alla skruvar.



13

- Borra hål i ramen såsom visas på bild 13.



14

- Sätt in en skruv med kullrigt huvud (M6x50) och skruva fast den med en bricka och självsäkrande M6-mutter.




Dra åt alla skruvar.



15

- Justera avståndet mellan framhjulet och marken samt vinkeln på utomusframhjulet.

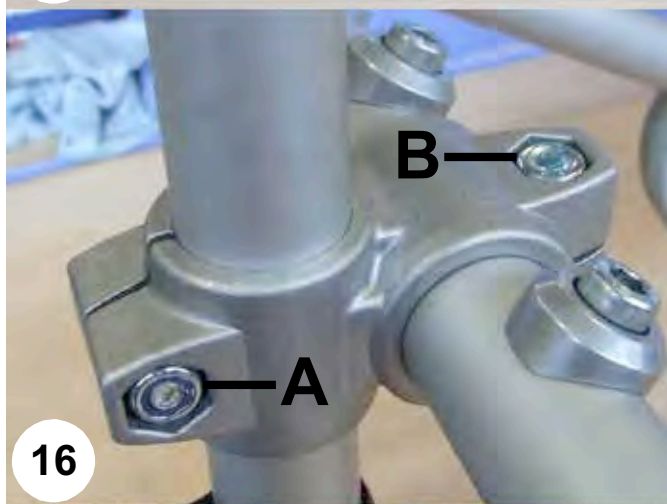

16

- Justera vid behov höjden på framhjulsgaffeln efter att skruven (A) har lossats. På så sätt justerar du avståndet mellan rullstolens framhjul och marken.
- Justera eventuellt tippskydden.
- Tippskydden måste justeras så att de fungerar både med och utan monterad främre utomhusdel.
- Justera framhjulsgaffeln vertikalt när att du har lossat skruven (B).
- Båda skruvarna måste dras åt med en momentnyckel (insex) inställd på 25 NM.

Montera den främre utomhusdelen:



17

- Ta bort båda tippskyddsrören (se bild 17).



18

- Klicka först fast den främre utomhusdelen i de främre spärrarna (se även bilderna 7 och 11).



19

- Ställ dig bakom rullstolen och lyft upp framhjulet genom att trycka ner körbygeln tills låsstiften klickar fast hörbart i spärren (se även bild 12).
- Kontrollera att låsstiften har låsts säkert.
- Tryck in låsstiften igen manuellt och/eller justera ställringarna igen.



20

Ta loss den främre utomhusdelen:

- Ställ dig bakom rullstolen när du ska ta loss den främre utomhusdelen.
- Lås upp framhjulet genom att trycka ner körbygeln.
- Aktivera låsmekanismen (såsom visas på bild 20) så att båda låsstiften låses upp.
- Sätt ner rullstolen långsamt och säkert (med körbygeln).
- Ställ dig framför rullstolen och dra ut den främre utomhusdelen.



21

SWINGBO-VTi Justering av sittdjup

**Du behöver följande
verktyg och hjälpmedel vid justeringen:**

- Skruvnyckel storlek 10
- Spetstång




- Ta loss hjulen med snabbkopplingsaxeln.
- Ta bort sittdynan.

- Lossa skruvarna på båda grundplattorna
(se bild 2).

- Flytta sittenheten till läge 0
(se bild 3).

- Lossa samtliga fyra skruvar på sittramen så
att sittramen kan förflyttas i det avlånga hålet.

Luta rullstolen 45°.

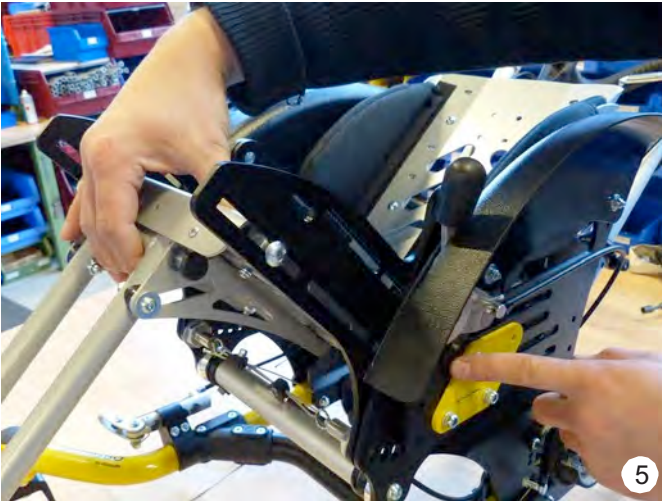


– Flytta sittramen så att den bakre skruven (markerad på bild 6) blir synlig.



– Lossa och ta bort den bakre skruven (se bilden).

– Gör på motsvarande sätt på den andra sidan av ramen.

– Lossa och ta också bort de två främre skruvarna.

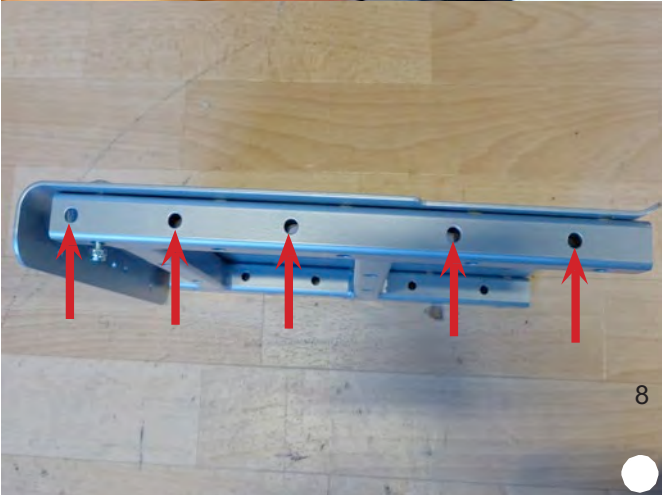


– Mät ut vilka hål på sittramen som sitshållaren ska fästas i för önskat sittdjup (se exemplet på bild 8).


– Välj de hål som ger maximalt avstånd vid önskat sittdjup.



– Skruven kan endast monteras när sittenheten står i läge 0 samt när rullstolen lutar 45° (se bild 9).

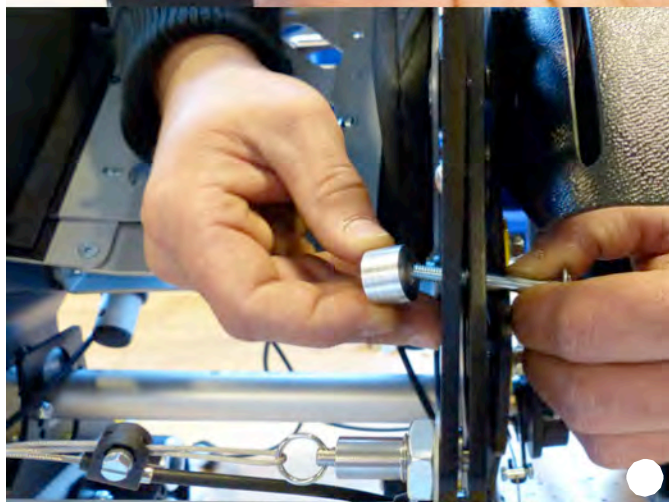

– Montera distansdelen såsom visas på bilderna 10 och 11.

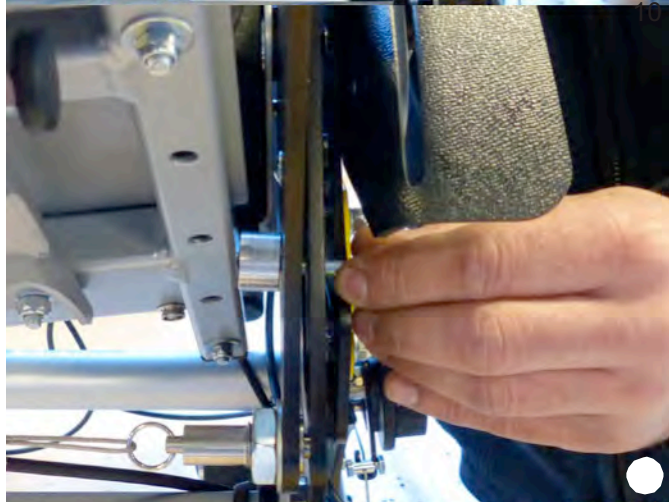

– Skruva fast skruven och distansdelen i rätt hål på sitsramen med en distansbricka och en mutter (se bilderna 11 och 12).



– Gör på motsvarande sätt på den andra sidan av ramen.



– Sätt fast skruven och distansbrickan framtill på ramen (se bild 13).




– Skruva fast skruven och distansdelen i rätt hål på sitsramen med en distansbricka och en mutter (se bilderna 14 och 15).

– Gör på motsvarande sätt på den andra sidan av ramen.



– Dra **inte** åt de fyra skruvarna ännu.

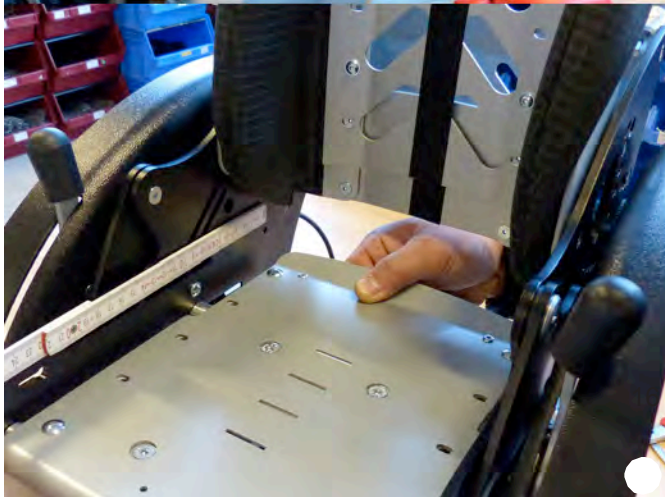

– Ställ in önskat sittdjup genom att flytta sittramen.

– Dra nu åt samtliga fyra skruvar såsom visas på bilderna 17 och 18.

