



Swingbo VTi Rekonditionering / underhåll

Ver. 2015-04-20

Underhåll, skötsel och användningstid

SWINGBO-VTi rullstol är CE-godkänd. Tillverkaren garanterar härmed att denna medicinska produkt somhelhet uppfyller kraven i direktivet 93/42/EEG. Rullstolens funktion, särskilt hjullåsen, ska kontrolleras före varje användning. Säkerhetsmuttrar ska bara användas en gång. Om de har lossats flera gånger måste de bytas ut.

Swingbo VTi	Typ	Datum
-------------	-----	-------

	Kontrollera följande	Justering/ Anmärkning
1	Funktionskontroll av bromsar	
2	Kontrollera så att fällning och tiltfunktioner fungerar obehindrat	
3	Kontrollera benstöd, eventuell låsfunktion, fällning, justering Kontroll av att fotplattan sitter fast	
4	Funktionskontroll av tippskyddet	
5	Kontroll av att drivhjulen sitter ordentligt (hjulaxel) Kontroll av drivhjulets ekerspänning Rengöring av hjulen, avlägsna hår exempelvis.	
6	Kontrollera att quick release-låset låser korrekt	
7	Kontrollera lufttryck.	
8	Kontrollera att rullstolen går rakt	
9	Inspektion av ramen med hänsyn till skada, vid behov utbyte av defekta delar. Kontroll av slitagedelar som hjul och lager	
10	Inspektion av rörliga delar, vid instabilitet eller för mycket rörlighet dra åt alla skruvar.	
11	Låt inte smuts torka in, utan rengör med vatten och en mjuk trasa eller svamp. Spola ej med högtryckstvätt direkt på lager. Spola ej med högtryckstvätt från nära håll på klädseln	
12	Delar som har skevhet, sprickor, rostskador eller deformationer skall bytas ut. Delar som är slitna och har nedsatt funktion bör bytas ut. Mindre lackskador kan lagas med bättringsfärg	
13	Kontrollera att bruksanvisning och märkning finns	
14	Vid behov eller vid återanvändning, behandla överdrag/klädsel med ett desinfektionsmedel för ytor.	
15	Förvara hjälpmedlet i ett torrt utrymme med rumstemperatur, särskilt under vintern.	
16	Regelbundet underhåll utfört av aktorerad verksamhet bevarar produktens livslängd.	

Underhåll - rengöringsanvisning finns även i produktens bruksanvisning.



Swingbo VTi Skötselråd

- Rengöring och underhåll
- Rengör alla ramkomponenter och plastdelar med mildt rengöringsmedel (t.ex. Sagrotan).
- Klädsel och vadderade delar kan tvättas i 40 grader. Lägg dem i en linnepåse eller ett örngott vid maskintvätt.
- Många gånger räcker det att torka med en fuktig trasa.
- Använd inte SWINGBO rullstol i saltvatten.
- Undvik att sand eller andra partiklar skadar hjullagren.
- Om rullstolen blir blöt ska den torkas med handduk så snart som möjligt.
- Hår och annan smuts samlas ofta mellan de svängbara hjulen och gaffeln. Det kan påverka hjulens funktion negativt. Ta bort hjulen och rengör delarna med mildt rengöringsmedel.
- Bakhjulen är utrustade med en snabbkoppling. Säkerställ funktionen genom att avlägsna eventuell smuts vid snabbkopplingsaxeln och axelhuset.
- Snabbkopplingsaxeln bör även smörjas lätt och regelbundet med hartsfri symaskinsolja.
- Skruvanslutningar ska kontrolleras ofta, särskilt när rullstolen är ny och efter justeringar. Om samma skruvanslutning släpper flera gånger kontakter du din återförsäljare.