



Niga Rekonditionering / underhåll

Niga barnstol

Ver. 2014-12-01

Niga	Typ	Datum

	Kontrollera följande	Justering/ Anmärkning
1	Kontrollera samtliga skruvar och bultar. Rörliga delar går lättare om en droppe olja tillsättes efter rengöring. Kontrollera att hjulen är i korrekt position och dra eventuellt åt lösa delar.	
4	Inspektion av bromsfunktionen. I de fall bromsfunktionen inte fungerar riktigt måste hjulen bytas ut.	
5	Rengöring av hjulen, avlägsna hår exempelvis.	
8	Inspektion av ramen med hänsyn till skada, vid behov utbyte av defekta delar.	
9	Inspektion av rörliga delar, vid instabilitet eller för mycket rörlighet dra åt alla skruvar.	
10	Låt inte smuts torka in, utan rengör med vatten och en mjuk trasa eller svamp. Använd inte högtryckstvätt då detta kommer skada lager, lack och dekor.	
11	Använd inte någon form av aggressivt rengöringsmedel.	
13	Förvara hjälpmedlet i ett torrt utrymme med rumstemperatur, särskilt under vintern.	
14	Vid behov eller vid återanvändning, behandla överdrag/klädsel med ett desinfektionsmedel för ytor.	
15	Bälten rengöres med en trasa + vatten + mildt rengöringsmedel. Klädseldelarna maskintvättas i 40°C.	
16	Regelbundet underhåll utfört av aktiverad verksamhet bevarar produktens livslängd.	
Underhåll - rengöringsanvisning finns även i produktens bruksanvisning.		