


Användning av syrgas (tillbehör)




- O₂ måste vara avstängd när Vivo 45 LS inte är i drift-mode!
- Övervakning av syrgaskoncentrationerna rekommenderas.

1. Montera syrgasslangen på anslutningen.

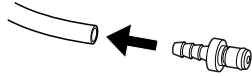


2. Anslut syrgasslangen. Ett klickljud hörs när slangen är ordentligt isatt.

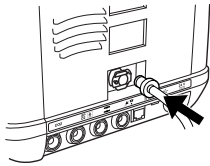


Koppla från:

1. Stäng av syrgaskällan.
2. Tryck på frigöringsknappen för att koppla från syrgasslangen.
3. Ta loss slangen.

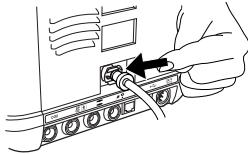

Byta patientluftfilter

Filtren sitter i filterkassetten.
Tvättbart filter (grått): Byt ut minst en gång om året, tvätta minst en gång i veckan.
Engångsfilter (vitt): Byt filtret minst var fjärde vecka eller oftare om det används i en miljö med förorenad eller pollenrik luft.

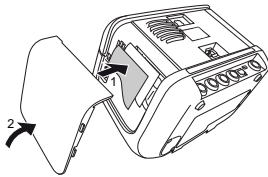

Symboler

SYMBOL	BESKRIVNING
	Internt batteri
	Click-in-batterinivå
	Hemma-mode aktiverat
	Befuktare och/eller uppvärmd slang ansluten
	SpO ₂ -sensor ansluten
	FiO ₂ ansluten
	EtCO ₂ ansluten
	PtcCO ₂ ansluten
	Andningsrörelsebälte anslutet
	Flera sidor
	Mer innehåll tillgängligt

Vivo 45 LS

Snabbreferensguide
Dok. 007897 Sv M-2
2022-12-01



BREAS

Breas Medical AB · Företagsvägen 1
SE-435 33 Mölnlycke · Sweden
Phone +46 31 86 88 00 · Fax +46 31 86 88 10
Find your local distributor at www.breas.com




SVENSKA



vivo
by Breas


From hospital to home

Snabbreferensguide


 Det här är inte någon komplett guide för Vivo 45 LS. Kompletta anvisningar hittar du i manualen.

Slå på/av


1. Koppla nätdelen till Vivo.

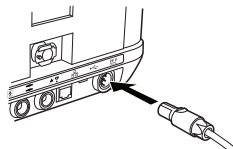


2. Tryck på Start/Stopp-knappen på topppanelen. Vid fråga om ett test före användning ska instruktionerna på skärmen följas.

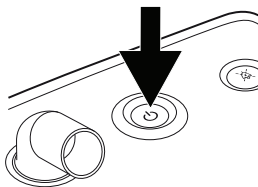


Ansluta patientslangen

 Utför alltid ett test före användning när patientslangen byts ut eller ändras. Om det inte finns någon fråga om test före användning vid start kan du starta det från avsnittet Övrigt.

1. Anslut patientslangen till patientluftuttaget på ventilatorn.

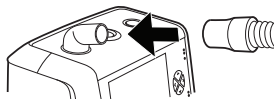


2. Om en patientslang med aktiv exspirationsventil används, anslut pilottryckslangen på ventilatorns baksida.

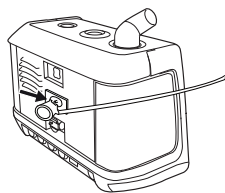

3. Anslut den andra änden av slangen till patientutrustningen. För läckageslangar ska läckaget vara åtminstone 12 liter per minut vid ett tryck på 4 cmH₂O för att förhindra återandning av utandad luft.

Starta/stoppa behandling

1. Påbörja behandlingen och starta drift-mode genom att först trycka på och hålla ned Start/Stopp-knappen på topppanelen.

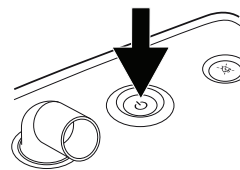

2. Släpp upp Start-/stopp-knappen när förloppsindikatorn är ifylld.




3. Avsluta behandlingen och gå till standby-mode genom att först trycka på och hålla ned Start/Stopp-knappen på frontpanelen.

4. Släpp upp Start-/stopp-knappen när förloppsindikatorn är ifylld.




5. Tryck på knappen ljuduppehåll för att stoppa behandlingen.

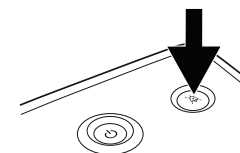


i-knappen

Använd i-knappen när du vill visa förklaringar till inställningar och larm.

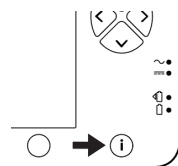


Hantera kontakterna

Se till att markeringen är vänd uppåt.

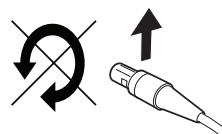


Dra i kontakten, inte i själva kabeln, för att lossa kontakten.

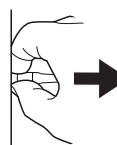


Ansluta click-in-batteriet (tillbehör)


1. Frigör sidohöljet genom att trycka på knappen under handtaget.

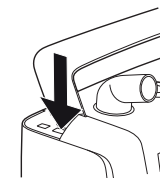

2. Öppna och ta bort sidopanelen.

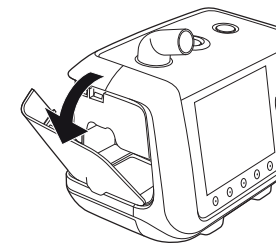

3. Sätt i click-in-batteriet. Se till att haken längst ned i click-in-facket stängs.

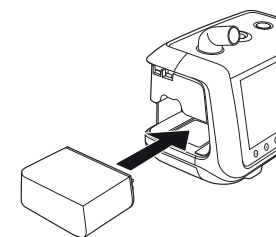

4. Stäng sidopanelen. Ett klickljud ska höras när du sätter fast sidopanelen.

