

Beställ produktprover:
Kundtjänst 031-376 40 20
www.lofric.se

Nelaton 15 cm

STERILE R

Sterilized
by irradiation



Single use


R_x only



Consult instructions
for use

CE 0086

PVC FREE

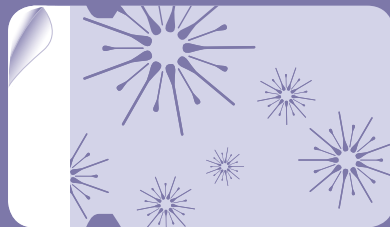

LoFric
Sense

Smartare design, säkrare kateterisering. Varför välja?

LoFric Sense är ett resultat av Wellspect HealthCares strävan av kontinuerlig utveckling – en process som kombinerar den senaste tekniken med erfarenheter från brukare och vårdpersonal för att förverkliga en så komplett produkt som möjligt.

LoFric Sense tar ett steg framåt för självkateterisering, som samtidigt bygger på vår välbeprövade LoFric kateter. LoFric, med Urotonic™ Surface Technology, är världens mest använda kateter och den enda med långtidsdokumentation för trygg och säker kateterisering. Tack vare den nya designen är LoFric Sense mer hygienisk, mer

diskret, och gör självkateteriseringen så bekväm som den kan vara. Ett lätt tryck och den är klar att använda.

Praktiska behov i din livsstil kan vara lika viktigt som medicinska behov. Med LoFric Sense behöver du aldrig välja.

- **Säker** – trygg, tömmer komplett och är bevisat säker för långtidsanvändning.
- **Hygienisk** – före, under och efter användandet.
- **Bekväm** – funktionell design från förvaring till den kastas.

Art. nr.	längd	CH	antal/frp
4160820	15	08	30
4161020	15	10	30
4161220	15	12	30
4161420	15	14	30



Vi behöver din åsikt!

Det skulle bidra till att göra en skillnad för de personer som tömmer blåsan med Ren Intermittent Kateterisering (RIK) över världen. LoFric Sense har utvecklats med hjälp av vårdpersonal och hundratals kvinnor som RIKar sig. För framtida utveckling är det viktigt att vi får feedback från experter – därför inbjuder vi dig att delta i vår undersökningspanel – TellUs. Om du vill ge ett värdefullt bidrag som TellUs panelmedlem, registrera dig på www.lofric.se

LoFric Sense – en kateter som gör skillnad i vardagen

Det finns inte två kvinnor som är lika. Vi utropar "vive la différence" när vi introducerar LoFric® Sense™ – vår nya kateter som är anpassad till varje individs livsstil utan att försumma de medicinska behoven.

Intermittent självkateterisering är personligt, det är viktigt att kvinnors naturliga rytm och dagliga liv fungerar smidigt. Över 25 års samarbete med brukare och vårdpersonal har lärt oss att en kateter måste vara lätt att ta med sig och kunna användas var som helst – utan att någonsin göra avkall på de faktorer som påverkar hälsan eller säkerheten.

LoFric Sense är designad för att lösa just det. De viktigaste funktionerna är:

- Att katetern är tillräckligt lång för att säkerställa komplett blästömning.
- Att ytskiktet minimerar friktionen både vid införandet och utdragandet.
- Ett användarvänligt handtag för bättre grepp och non-touch teknik.

Allt detta tillsammans minimerar risken för urinvägsinfektioner och gör kateteriseringen säker och mer bekväm för alla kvinnor. Dessutom erbjuder LoFric Sense ett helt nytt förpackningskoncept som är lätt att öppna. Katetern kan efter användandet lätt föras tillbaka i förpackningen och på så sätt kastas på ett diskret och hygieniskt sätt. Eftersom förpackningen inte är medicinsk till utseendet, så är en diskret kateterisering möjlig var som helst och när som helst.

Vive la
différence

Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, Box 14, 431 21 Mölndal.
Tel: 031-376 40 00. Fax: 031-376 30 17. Kundservice: 031-376 40 20.
www.lofric.se

wellspect
HEALTHCARE

1. Ett lätt tryck och den är klar att använda.




2a. Öppna fliken.



2b. Håll upp fliken och ta ur katetern.



3. Katetern kan lätt föras tillbaka i förpackningen och därmed kastas diskret och hygieniskt.

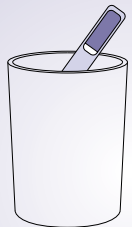

Användarvänlig förpackning

Enkel att öppna och stänga

Diskret design

Optimal kateterlängd

- 10 cm kateterlängd säkerställer att båda kateterögonen når upp i blåsan för en komplett blåstömning

Mjuka kateterögon

- den enda katetern med klinisk långtidsdokumentation, för att säkerställa minskad risk för komplikationer

Urotonic™ Surface Technology

- minimerar friktionen under hela kateteriseringen
- säkerställer en bra känsla
- minskar risken för både kort- och långtidskomplikationer
- unikt för LoFric® katetrar

Användarvänligt handtag

- bra grepp ger bättre kontroll
- steril i förpackningen
- möjliggör non-touch teknik
- standardform på konnektorn
 - kan anslutas direkt till uppsamlingspåse/ förlängningsslang
 - fritt urinflöde
 - färgkodad för storlek (CH)

Klar att använda direkt efter aktivering

- integrerad steril saltlösning
- aktiveras genom ett lätt tryck, därefter är katetern klar att använda

PVC- och ftalatfri

- mycket god miljöprestanda i jämförande dokumentation – LCA analys av IVL, Svenska Miljöinstitutet

Självhäftande flik

- för att fästa vid någon torr och ren yta inom räckhåll

