


# Visit dörrsändare

## BE1411

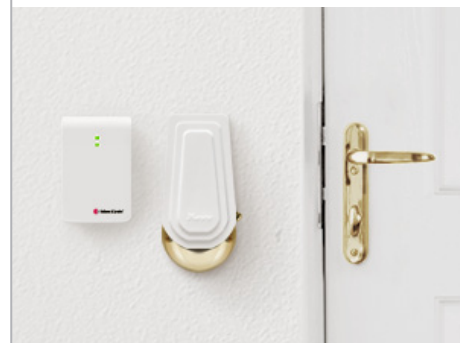

### Egenskaper

#### Flexibel

Klarar dörrklocka och porttelefon

#### Tillförlitlig detektering

Digital fingeravtrycksalgoritm

#### Programmerbar

Lär sig känna igen din dörrklocka

#### Lång batteritid

Upp till 10 års batterilivslängd

#### Säker radiolänk

Upp till 250 m räckvidd

## Miss a inga besök

Visit dörrsändare är en del av Visitsystemet som hjälper människor med hörselnedsättning att uppfatta signaler i hemmet. Den är förprogrammerad att känna igen de flesta dörrklockor och porttelefoner och kan dessutom lära sig att känna igen praktiskt taget vilken dörrsignal som helst.

### Så fungerar det

När någon ringer på, skickar dörrsändaren en trådlös signal till din Visitmottagare som visar med ljud, blyxtljus eller vibrationer att gästerna har kommit.

### Flexibel detektering

Visit dörrsändare kan aktiveras genom:

- Den interna mikrofonen
- Den inbyggda magnetiska detektorn
- Det externa mikrofontillbehöret
- En galvaniskt ansluten dörrklocka

Visit dörrsändare använder dubbla mikrofoner för tillförlitlig detektering och en säker radiolänk med lång räckvidd. Den är mycket enkelt att installera, praktiskt taget underhållsfri och har en batterilivslängd på minst fem år.




# Teknisk information

## Mått och vikt

Höjd:	100 mm
Bredd:	65 mm
Djup:	27 mm
Vikt:	120 g inkl. batterier



## Knappar och anslutningar

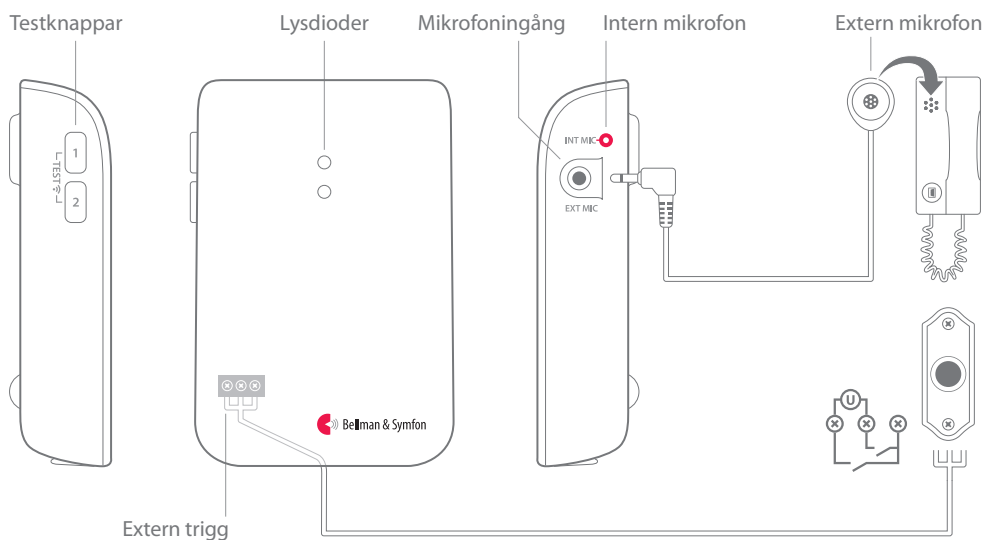

## Anslutningar

- Mikrofoningång (3,5 mm monokontakt)
- Extern trigg för galvanisk anslutning

## Aktivering

- Testknappar
- Intern mikrofon
- Extern mikrofon (tillbehör)
- Magnetisk detektion
- Befintlig dörrklocka ansluten till extern trigg

## Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens: 868.3 MHz
- Räckvidd: Upp till 250 m fritt fält. Räckvidden reduceras av väggar, stora föremål och andra radiosändare som t.ex TV och mobiltelefon.

## Omgivning

- Endast för inomhusbruk
- Arbetstemperatur: 15°-35° C
- Relativ luftfuktighet: 5 % -95 % (ej kondenserande)

## Ström och batteri

- Strömförsörjning  
Batteridrift 2 x 1.5 V AA litium eller alkaliskt
- Strömförbrukning  
Aktiv < 70 mA, Viloläge < 15 µA
- Drifttid  
Alkaliskt batteri ~ 5 år Litiumbatteri ~ 10 år

## Antal radionycklar

- 64. Kan utökas till 256 med speciell programvara.

## Underhåll och rengöring

- Underhållsfri. Rengör endast med en torr trasa.
- Använd inte rengöringsmedel, spray, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Ej för återanvändning

## Regulatoriska krav

- Uppfyller följande regulatoriska krav:  
WEEE, Der Grüne punkt, CE, RoHS, C-tick, A-tick



## I paketet

- BE1411 Visit dörrsändare
- 2 x 1.5V AA alkaliska batterier
- Kardborreband för väggmontage
- Skruv och plugg
- Våtservett
- Bruksanvisning



## Tillbehör

Följande tillbehör finns tillgängliga:

- BE9199 Extern mikrofon 2.5 m
- BE9200 Extern mikrofon 0.75 m

© och TM 2015, Bellman & Symfon AB

Bellman och Bellman & Symfon är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB, alla rättigheter förbehållna. Produktdesignen är patenterad. Innehållet i trycksaken kan komma att ändras utan förvarning.

BE1411\_001DAS001\_SE

[bellman.com](http://bellman.com)