

Användning

LoFric® Hydro-Kit™ engångs-katetrar är avsedda att användas för intermittenta kateterisering av urinvägarna.

Sterilisering och hållbarhet

Steriliserade med hjälp av strålning. Använd innan sista förbrukningsdag som anges på förpackningen.

Förpackning

30 katetrar per kartong.
2 kartonger per transportförpackning.

Material

Hydrofil ytbeläggning:
Polyvinylpyrrolidone (PVP).

Kateter: Polyolefinbaserad elastomer, (POBE).

Vätskebehållare: Laminerad folie av polyeteneterphthalat (PET), aluminium och polyeten (PE). Sterilt vatten med natriumklorid (NaCl).

Plastförpackning: Polyetenbutylacrylat (EBA).

Produktsortiment

Art nr	Benämning	Längd	Stk
423 08 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 08
423 10 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 10
423 12 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 12
423 14 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 14
423 16 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 16
423 18 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 18
420 08 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 08
420 10 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 10
420 12 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 12
420 14 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 14
420 16 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 16
420 18 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 18
425 10 003	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (male)	40 cm	CH 10
425 12 003	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (male)	40 cm	CH 12
425 14 003	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (male)	40 cm	CH 14
425 16 003	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (male)	40 cm	CH 16
425 18 003	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (male)	40 cm	CH 18

LoFric® Hydro-Kit™

Instruktioner

Viktig information


Var noga med att användaren får tillräcklig träning i att utföra kateteriseringen.

Börja med att tvätta händerna med tvål och vatten.


Detta är en engångsprodukt. När den har använts försämras ytbeläggningen och katetern är inte längre steril. Använd enbart saltlösningen som finns i vattenbehållaren för att aktivera katetern.




1. Håll förpackningen upprätt. Vik vattenpåsen och tryck. Låt saltlösningen rinna ner över katetern

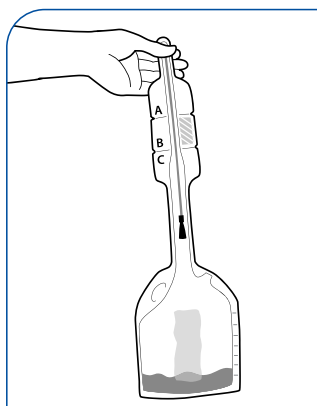


2. Vänd förpackningen och låt saltlösningen rinna ner i uppsamlingspåsen.

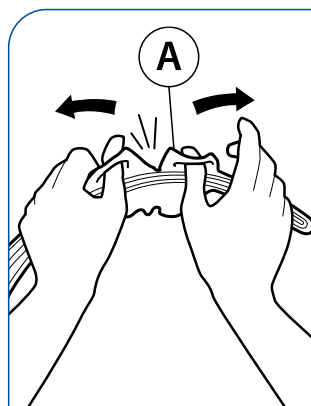


3. Använd öglorna vid markering "A" för att öppna förpackningen och frilägga kateterspetsen.

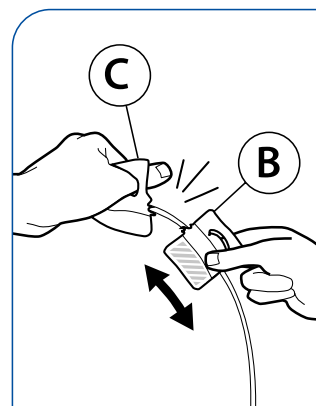


4. Använd öglorna vid markering "B/C" för att öppna. Använd del "B" som införingshjälpmedel.

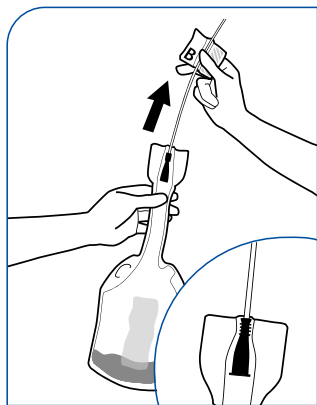

5. Dra försiktigt katetern ur förpackningen tills konnektorn stannar, för att tätta mellan katetern och uppsamlingspåsen. Kateterisera.

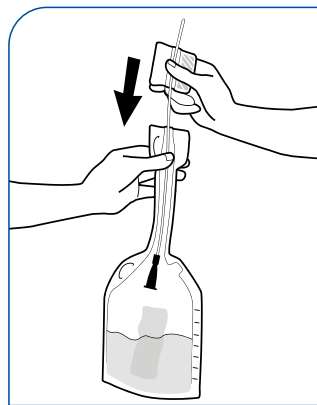

6. Tryck tillbaka katetern in i uppsamlingspåsen.

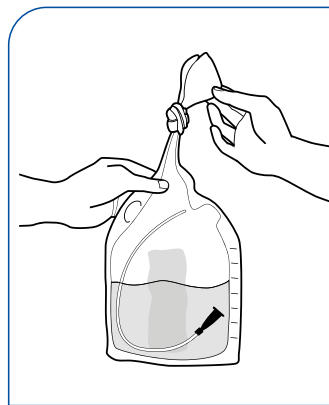

7. Innan du kasserar påsen, töm den genom halsen, eller knyt ihop och töm via öppningen på sidan. Du kan även knyta ihop och kassera hela påsen.

