

wellion®

PROTECT PRO



Bruksanvisning säkerhetspennkanyler

1. Öppna genom att ta bort förseglingen

När förseglingen är borttagen, skruva fast insulinpennan ordentligt så pennkanylen sitter säkert.



Ta bort förseglingen

2. Före insulininjektion

- En färgad skyddshätta är synlig när Wellion PRO säkerhetspennkanyl är oanvänd. Gul = 5 mm, Blå = 8 mm.
- Ge en testdos på 1-2 enheter för att kontrollera kanylens passage. Ställ därefter in korrekt dos som ska ges.
- Injektionen ska ges i en rät vinkel, 90°, mot huden. Ge injektionen med den teknik du lärt av din diabetessköterska.
- OBS: kanylen måste gå helt in i huden för att säkerhetsmekanismen ska aktiveras.
- Därefter injiceras den ordinerade insulindosen. Efter injektion, håll pennan kvar i ca. 10 sekunder.



Före injektion: synligt innerskydd

3. Efter insulininjektion

- Efter avslutad injektion syns ej längre det färgade innerskyddet i kanylen. Detta är bevis för att stickskyddet automatiskt har aktiverats.



Injektion i 90°
vinkel



Insulininjektion

4. Avfall

- Fatta ett grepp om kanylens vita del och skruva av den från pennan. Behåll samma grepp om kanylen och släng den i avsedd behållare.



Felsökning

Stickskyddet är inte aktiverat om:

- Det färgade innerskyddet fortfarande syns
- Säkerhetspennkanylen används i en felaktig vinkel mot huden.



Efter injektion syns ej längre det färgade innerskyddet

MED TRUST Sweden AB
Tel.: 040-157775, e-mail: info@medtrust.se
www.wellion.se