

Liljenbergmadrassen

Mjukfiber madrass



Liljenbergmadrassen

Liljenbergmadrassen är en mjukfiber madrass som används för brukare som behöver en mjuk och ventilerande madrass. De glatta silikoniserade hålfibrerna avlastar utsatta kroppsdelar och de glatta fibrerna motverkar skjuvning. Bäddflikarna på sidorna gör att den ligger stadigt i sängen.

En mycket uppskattad madrass vid värk och smärttillstånd.

HANTERING

Liljenbergmadrassen läggs på en vanlig madrass, fästes på den med resårbanden i hörnen och bäddflikarna på sidorna vikas under.

Bädda med ett lakan, hygienunderlägg eller inkontinensskydd vid behov. För att undvika ökad belastning mot huden, använd så få lager som möjligt mellan brukare och madrass.

RENGÖRING	FAKTA
<p>Tvättanvisning: Normalfall - tvätta i 60 °C. Vid infektionsrisk/hård nedsmutsning - tvätta i 70 °C, minst 10 min. Torktumlas i normal temperatur.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Vikt: 3.2 kg (90 cm bred)• Färg: Benvit• Brand: SS 8760001• Garanti: 2 år
STORLEKAR	  Läs bruksanvisningen före användning av produkten.
80/90/105/120x200 cm.	

Care of Sweden är registrerat varumärke som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2014. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2018-05-02.