

# Handhavande mellan patienter

(Rekonditioneringsanvisning VELOX och eFlow)

## Rengöring av apparat

Viktigt när man skiftar apparat mellan patienter är att man rengör och desinfekterar utrustningen.

Vår rekommendation är att rengöra och desinfektera utsidan av apparaten. Lämpligt är Isopropanol baserade ytdesinfektionsmedel.

Observera att vätskor som kommer in i enheten kan orsaka fel. Därför får aldrig vätskor sprayas på apparaten eller nätsladden.

Detta skall utföras av auktoriserad personal alternativt av Mediplast AB (se nedan för att rekvirera service).

Mellan varje patient skall även en ny årsförpackning (nebulisator) erhållas till patienten (se artikelnummer nedan).

Det rekommenderas att man läser den mycket utförliga beskrivningen som finns i bruksanvisningen för produkten.

## Varning!

Vätskor kan leda elektricitet och skapar därmed en risk för elstötar. Därför ska du alltid slå av kompressorn och dra ur kontakten ur vägguttaget innan man skall rengöra den.

Om vätska kommer in i kompressorn får enheten inte användas under några omständigheter. Innan du använder kompressorn återigen måste du kontakta tekniker på er serviceavdelning eller Mediplast AB.

|                                       |               |         |
|---------------------------------------|---------------|---------|
| PARI BOY Classic - Årsförpackning     | Artikelnummer | 23G3219 |
| PARI LC Sprint SINUS - Årsförpackning | Artikelnummer | 23G2860 |

Vid service och garantiärenden, kontakta Mediplast AB:  
[repair@mediplast.com](mailto:repair@mediplast.com) eller 040-671 23 00

