

# Handhavande mellan patienter

(Rekonditioneringsanvisning PARI BOY och PARI Sinus)

## Rengöring av kompressor

Viktigt när man skiftar apparat mellan patienter är att man rengör och desinfekterar utrustningen.

Vår rekommendation är att rengöra och desinfektera utsidan av kompressorkåporna. Lämpligt är Isopropanol baserade ytdesinfektionsmedel.

Observera att vätskor som kommer in i enheten kan orsaka fel. Därför får aldrig vätskor sprayas på kompressorn eller nätsladden.

Om en apparat har befunnits i ett hem eller omgivning med mycket damm och eller husdjur så kan damm förekomma i apparaten. Detta kan man oftast se genom att hålla upp apparaten mot en lampa, alternativt lysa in i apparaten med en ficklampa för att se om den är kontaminerad med damm, husdjurs hår eller medicinrester.

Vid sådana tillfällen rekommenderas att apparatens kåpor tas isär och rengörs ordentligt med diskmedel och ytdesinfektionsmedel.

Även kompressorn eller delar av kompressorn kan ha utsatts för damm eller medicinrester som då skall rengöras.

Detta skall utföras av auktoriserad personal alternativt av Mediplast AB (se nedan för att rekvirera service).

Mellan varje patient skall även en ny årsförpackning (nebulisator) erhållas till patienten (se artikelnummer nedan).

Det rekommenderas att man läser den mycket utförliga beskrivningen som finns i bruksanvisningen för produkten.

## Varning!

Vätskor kan leda elektricitet och skapar därmed en risk för elstötar. Därför ska du alltid slå av kompressorn och dra ur kontakten ur vägguttaget innan man skall rengöra den.

Om vätska kommer in i kompressorn får enheten inte användas under några omständigheter. Innan du använder kompressorn återigen måste du kontakta tekniker på er serviceavdelning eller Mediplast AB.

PARI BOY Classic - Årsförpackning	Artikelnummer	23G3219
PARI LC Sprint SINUS - Årsförpackning	Artikelnummer	23G2860

Vid service och garantiärenden, kontakta Mediplast AB:  
[repair@mediplast.com](mailto:repair@mediplast.com) eller 040-671 23 00

