

# Så här inhalerar du med VELOX®



**1** Tvätta händerna noggrant före varje inhalation.



**2** Vid drift med batterier (eller laddningsbara batterier) ska de sättas i innan nebulisatorn monteras.



**3** Placera läkemedelsbehållaren rakt på nebuliseringskammaren och stäng klackarna.



**4** Sätt in nebulisatorn i styrenheten (området vid stickkontakten måste vara helt torrt). Stäng klacken på apparatens undersida.



**5** Anslut munstycket eller masken till nebulisatorn.



**6** Skruva loss läkemedelslocket. Fyll på läkemedel (min. 2 ml, max. 6 ml). Skruva fast locket.



**7** Anslut styrenheten till nätadaptern och ett lämpligt nätuttag vid drift med nätadapter.



**8** Sätt dig avspänt och med upprätt rygg. Slå på apparaten. Det hörs en ljudsignal, knappens LED-lampa lyser grön. Aerosol samlas i nebulisatorn.



**9a** Håll VELOX vågrätt. Sätt munstycket mellan tänderna och slut läpparna om det.



**9b** Håll VELOX vågrätt. Masken måste sitta tätt.



**10** Andas långsamt och djupt in och ut aerosolen som har samlats i nebulisatorn. Inhalationen kan avslutas så snart det inte längre kommer ut någon aerosol ur ventilen.



**11** Stäng av apparaten. Det hörs en ljudsignal, knappens LED-lampa slocknar. Det ska finnas kvar rester av läkemedlet i nebulisatorn.



**12** Vid drift med nätadapter: för att apparaten ska separeras helt från elnätet Dra ut nätkontakten.

## Apparatsignaler

Slå på apparaten:	LED-lampan lyser grön.	1 pipsignal.
Under drift:	LED-lampan lyser grön.	
Svagt batteri:	LED-lampan blinkar grön.	
Batteriet tomt/för låg spänning:	LED-lampan blinkar orange tre gånger.	1 pipsignal. Apparaten stängs av automatiskt.
Nebulisatorn är inte ansluten till styrenheten:	LED-lampan blinkar orange tre gånger.	Apparaten stängs av automatiskt.
Den maximala drifttiden på 15 min. har överskridits:	LED-lampan blinkar grön tre gånger.	1 pipsignal. Apparaten stängs av automatiskt.
Stänga av apparaten:	LED-lampan slocknar.	1 pipsignal.

# Hygien och underhåll på VELOX®

Se till att området vid stickkontakten på nebulisatorn och styrenheten är helt torrt innan ny användning, eftersom apparaten annars inte nebuliserar.  
Om inhalationen tar längre tid än vanligt kan aerosolgeneratoren vara igensatt. Skölj den med VELOXcare.



1

## Rengöring

före första idrifttagande och efter varje användning:

- Lägg nebulisatorn (isärplockad), munstycket och masken i varmt kranvatten med lite diskmedel i ca 5 minuter.
- Skölj av alla delar noggrant under rinnande vatten.



2a


**Skölj aerosolgeneratoren med VELOXcare** en gång per vecka vid inhalation 1x per dag

Sätt in läkemedelsbehållaren med öppningen nedåt (de blå ventilbladen ska vara uppåt) i VELOXcare, stäng VELOXcare och klackarna.



2b

- Fäst VELOXcare på styrenheten. Stäng klacken på apparatens undersida.
- Fyll på 2,5 ml isoton saltlösning eller destillerat vatten.

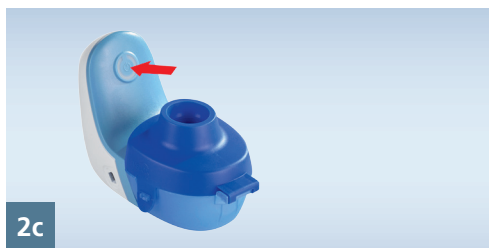

2c

- Anslut styrenheten till nätadaptern och nätuttaget vid drift med nätadapter.
- Slå på VELOX. Det hörs en ljudsignal, knappens LED-lampa lyser grön.
- Sköljning genomförs.



2d

- Stäng av apparaten när sköljvätskan har runnit igenom.
- Det hörs en ljudsignal, knappens LED-lampa slocknar.
- Dra loss VELOXcare från styrenheten.
- Ta bort läkemedelsbehållaren, skölj av läkemedelsbehållaren och VELOXcare noggrant med kranvatten.



3

## Desinficering

en gång per vecka efter rengöringen

- I kokande destillerat vatten (minst 5 min.)
- eller**
- I desinficeringsapparat t.ex. för nappflaskor (minst 6 min.)



4

## Torkning

efter varje rengöring och/eller desinficering. Lägg delarna på ett torrt, rent och absorberande underlag och låt dem torka fullständigt

## Återförsäljare:

**MEDI PLAST**

Medioplast AB

Box 1004, 212 10 Malmö

T 020-78 80 35

mediplast.info@mediplast.com

www.mediplast.com



5

## Förvaring


Förvara delarna på en torr, dammfri plats



6

## Nebulisatorbyte (VELOX Year Pack):

1x per år eller efter 365 användningar och 52 desinficeringar

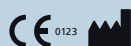

PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation

Moosstraße 3 · 82319 Starnberg · GERMANY · Tel: +49 (0)8151 279-0 · E-Mail: info@pari.de · www.pari.com

Mer information:

