

Du kan göra ännu mer

med **PARI SINUS2**

Genom att kombinera med PARI LC SPRINT®-nebulisatorn kan du utrusta din PARI SINUS2 för behandling av de nedre luftvägarna, eller för att fukta samtliga andningsorgan.



Mer information finns i våra användarvideor som du kan titta på på www.pari.com



Översikt



PARI SINUS2
med PARI LC SPRINT® SINUS-nebulisator

Artikelnummer: 128G1006
Bruksanvisning medföljer.



PARI SINUS2 årsförpackning
PARI LC SPRINT® SINUS-nebulisator, PARI SINUS2 slangsystem och filter

Artikelnummer: 23G3816
Bruksanvisning medföljer.



PARI GmbH, Moosstraße 3, 82319 Starnberg, Tyskland
Tfn.: +49 (0)8151 279 220, Fax: +49 (0)8151 279 6220
E-post: export@pari.de www.pari.com

Distributör:

Mediplast AB, Bronsåldersgatan 2, 213 76 MALMÖ
Tel: 020 78 80 35, E-post: mediplast.info@mediplast.com
hemsida: www.mediplast.com

128D0069-A-2021-04



PARI SINUS2 – Målinriktad
inhalationsbehandling

För exakt, effektiv och
Skonsam Behandling av Sinuit

Tips om användning och hygien



www.pari.com

Användningstips

Genomför inte behandlingen om du är täppt i näsan.

Om du är förkyld kan en nässköljning hjälpa.

1. Tvätta händerna noga före varje användningstillfälle med nebulisatorn.



2. Använd ett lätt tryck för att föra in det orange munstycket så långt det går i nebulisatorns nederdel. Skruva fast den övre delen av nebulisatorn.



3. Anslut kröken och näsanslutningsdelen till nebulisatorns behållare.



4. Tillsätt inhalationslösningen och sätt på locket.



5. Fäst den ena ändan av den första slangerna till vibrationskopplingen överst på nebulisatorn och den andra ändan till anslutningsuttaget på kompressorn. Anslut den ena ändan av den andra slangerna till nebulisatorns nederdel och den andra ändan till enhetens andra uttag.




6. Sitt upprätt i en avslappnad position. Täpp till den ena näsborren med näspluggen och sätt nebulisatorn mot den andra näsborren. Sätt på kompressorn.



Mycket viktigt:

Se till att mjukgommen är stängd! Ett sätt att göra detta är att upprepa gånger säga "ing" (uttalas som den andra stavelsen i Peking) så länge som möjligt. Varje gång du gör detta stängs mjukgommen automatiskt.

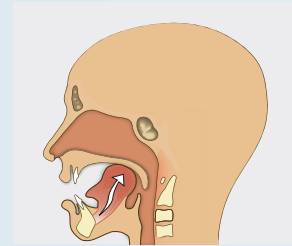

Hur vet jag att mjukgommen är stängd?

Du vet att mjukgommen är stängd på rätt sätt om dina näsborrar vibrerar något (kontrollera genom att känna på dina näsborrar med fingret).

7. När ena halvan av behandlingen har avslutats (2-3minuter), byt näsborre och upprepa enligt beskrivningen i steg 6.

8. Efter avslutad inhalation, stäng av kompressorn och ta loss slangarna från nebulisatorns behållare. Sätt på enheten igen för att torka ut slangarna.



Om du upplever en obehaglig tryckande känsla medan du inhalerar finns det ett sätt att minska den:

Vänd ut och in på näspluggen och klipp av spetsen vid kanten med en sax. Vänd pluggen inåt igen.

Tips om hygien

1. Ta loss slangarna från nebulisatorn. Ta isär nebulisatorns enskilda komponenter: näsanslutningsdel, krök, nebulisatorns överdel respektive underdel samt det orange munstycket och vibrationskopplingen.



2. Rengör alla delar utom slangarna noggrant i varmt vatten och lite diskmedel. Skölj samtliga komponenter noga med rent vatten.



3. PARI SINUS2-nebulisatorn kan desinficeras i en vanlig kommersiell ångdesinfektor.



Som alternativ kan alla delar sänkas ner i kokande vatten i minst 5 minuter. Kontrollera att alla delar är helt nedsänkta i vattnet.



4. Låt de enskilda komponenterna torka i rumstemperatur.



5. När delarna är helt torra ska de förvaras torrt och dammfritt.



6. Luftfiltret, nebulisatorn och anslutningsslangarna ska bytas ut varje år. Dessa komponenter ingår i PARI SINUS2 årsförpackning som du kan köpa från PARI eller din återförsäljare. Om någon del blivit för smutsig för att kunna rengöras ordentligt, eller om den har skadats, måste den bytas ut.