

SORBACT® ABSORPTION DRESSING

Infektionsförebyggande absorptionsförband



MINSKAR DEN MIKROBIELLA BELASTNINGEN I MÅTTLIGT TILL RIKLIGT VÄTSKANDE SÅR

Sorbact® Absorption Dressing är ett bakterie- och svampbindande sårförband. Det består av en grön Sorbact® sårkontaktyta kombinerad med en absorberande kärna och en vit baksida. Sorbact® Absorption Dressing absorberar och håller kvar sårvätska, vilket minskar risken för maceration samt möjliggör en fuktig sårmiljö. Kan användas vid kompressionsbehandling.

Produkt	Art. nr	Storlek	St/förp.
Sorbact® Absorption Dressing	98224	7x9 cm	20
Sorbact® Absorption Dressing	98222	10x10 cm	20
Sorbact® Absorption Dressing	98225	10x10 cm	10
Sorbact® Absorption Dressing	98223	10x20 cm	10



AVSEDD ANVÄNDNING

Sorbact® Absorption Dressing är avsett att användas vid behandling av rena, koloniserade, kontaminerade eller infekterade sår med måttliga till rikliga vätskemängder, såsom operationssår, traumasår, trycksår, diabetessår och fot- och bensår.

BRUKSANVISNING

1. Förbered såret i enlighet med lokal klinisk praxis.
2. Välj lämplig förbandstorlek för såret. Förbandet bör överlappa sårkanterna med minst 2 cm.
3. Ta ut förbandet ur förpackningen med aseptisk teknik.
4. Applicera förbandet. Se till att den gröna kontaktytan kommer i direktkontakt med hela sårytan.
5. Applicera lämplig förbandsfixering.
6. Hur ofta förbandet behöver bytas beror på hur mycket såret vätskar samt sårets och den omgivande hudens allmänna tillstånd. Om det kliniska tillståndet tillåter kan förbandet sitta på i upp till sju dagar



SORBACT® – FÖREBYGGER INFEKTION

Sorbact® mikrobiellt bindande förband förebygger och behandlar sårinfektioner genom att reducera den mikrobiella belastningen på naturlig väg. Mikroorganismerna binds irreversibelt till förbandets yta och avlägsnas när förbandet byts