


SORBACT® RIBBON GAUZE

Mikrobiellt bindande tamponad

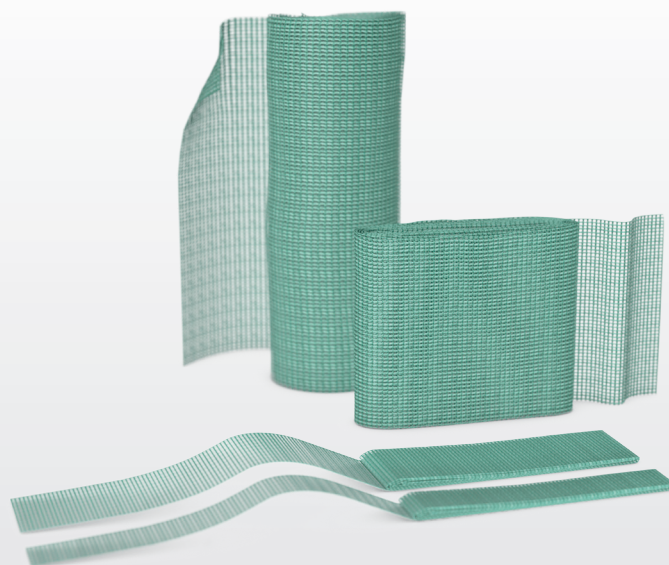

MINSKAR DEN MIKROBIELLA BELASTNINGEN I SÅRHÅLOR OCH FISTLAR

Sorbact® Ribbon Gauze är ett sterilt bakterie- och svampbindande sårförband. Det består av ett grönt Sorbact® sårkontaktlager som låter sårvätska passera igenom till ett sekundärförband. Förbandet kan användas vid kompressionsbehandling.

Produkt	Art. nr	Storlek	St/förp.
Sorbact® Ribbon Gauze	98118	1x50 cm	20
Sorbact® Ribbon Gauze	98121	2x50 cm	20
Sorbact® Ribbon Gauze	98120	5x200 cm	10
Sorbact® Ribbon Gauze	98119	10x200 cm	10




AVSEDD ANVÄNDNING

Sorbact® Ribbon Gauze är avsedd att användas vid behandling av rena, kontaminerade, koloniserade eller infekterade vätskande sår såsom kaviteter och fistlar. Sorbact® Ribbon Gauze är också avsedd för användning vid svampinfektioner i hudveck.


BRUKSANVISNING - SÅR

1. Förbered såret i enlighet med lokal klinisk praxis.
2. Välj lämplig förbandstorlek för såret. Förbandet kan överlappa sårkanterna om det behövs.
3. Ta ut förbandet ur förpackningen med aseptisk teknik.
4. Om förbandet klipps ska det klippas tvärs över med aseptisk teknik. Kassera öppnade och oanvända förband.
5. Applicera förbandet. Se till att förbandet kommer i direktkontakt med hela sårytan.
6. Klä/fyll kaviteten eller fisteln. Undvik att packa tätt. Lämna alltid en del av förbandet att sticka ut så att det lätt kan avlägsnas. Om förbandet klipps av rekommenderas att den kapade ändan lämnas utanför kaviteten eller fisteln för att undvika kvarvarande trådar i såret.
7. Applicera ett lämpligt sekundärförband.
8. Hur ofta förbandet behöver bytas beror på hur mycket såret vätskar samt sårets och den omgivande hudens allmänna tillstånd. Om det kliniska tillståndet tillåter kan förbandet sitta på i upp till sju dagar.

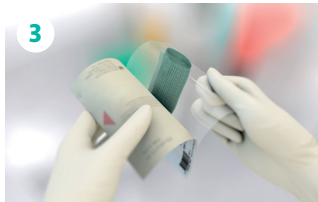

BRUKSANVISNING - SVAMPINFEKTION

1. Förbered det påverkade området i enlighet med lokal klinisk praxis.
2. Använd inte antimykotiska krämer eller salvor i kombination med förbandet.
3. Välj ett förband av lämplig storlek för att täcka det påverkade området.
4. Applicera förbandet, klipp det om det behövs. Se till att förbandet kommer i direktkontakt med det påverkade området.
5. Om fixering behövs kan bh eller underkläder användas. Hudvänlig häfta rekommenderas om ytterligare fixering behövs. Häftan ska appliceras utanför det påverkade området.
6. Byt förbandet en gång om dagen i samband med inspektion.
7. Fortsätt att använda förbandet i 2-3 dagar efter att symtomen har försvunnit för att undvika återfall.

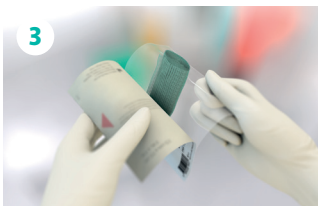

Sjukvårdspersonal har ansvar för att produkten används i enlighet med tillverkarens bruksanvisning.

SORBACT® RIGHT FROM THE START FÖREBYGGER OCH BEHANDLAR SÅRINFEKTIONER

Sorbact® mikrobiellt bindande förband förebygger och behandlar sårinfektioner genom att reducera den mikrobiella belastningen. Mikroorganismerna binds till förbandets yta och avlägsnas när förbandet byts.

Sorbact® är en svensk innovation och sortimentet av sårförband säljs via ABIGO partners och återförsäljare i över 65 länder runtom i världen. I vissa regioner säljs Sorbact® som Cutimed® Sorbact® och Leukomed® Sorbact®. Hitta din lokala återförsäljare på abigo.com.

Sorbact® är ett registrerat varumärke som ägs av ABIGO Medical AB.