

LightNeb

Effektiv portabel
meshnebulisator



Tillverkad i
Italien



Portabel och
kompakt



Drivs av utbytbara
AA-batterier



Mycket tyst
endast 40 dBa



Effektiv nebulisering
även av läkemedels-
suspensioner (t.ex
beklometason och
budesonid)


LightNeb

Portabel, tystgående och effektiv meshnebulisator, testad för nebulisering av suspensioner såsom beklometason och budesonid.



Innovativ ljusindikator

- Nebulisatorn PÅ
- Behandlingen klar
- Låg batterinivå
- Batterier urladdade

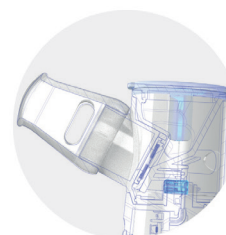

Utvecklad och tillverkad i Italien





Bekväma Soft Touch-tillbehör: munstycke, barn- och vuxenmask

Beskrivning

LightNeb är en portabel, batteridrivnen nebulisator med VMT (Vibrating Mesh Technology). Avsedd för användning i såväl hem- som sjukvård. Lämplig för nebulisering av läkemedel i lösning (mukolytika i allmänhet), läkemedel i suspension (t.ex. kortikosteroider, såsom beklometason och budesonid) och saltlösning. Möjlighet att välja mellan två driftsätt, kontinuerlig nebulisering (5 min) och "on demand".

Startklar inhalationsutrustning inkluderar: Munstycke, Soft Touch vuxenmask, Soft Touch barnmask, transport- och förvaringspåse, 2 st alkaliska AA-batterier.

Tekniska specifikationer

Modell	P0318EM
Nebulisatortyp	Mesh
Drift	5 min kontinuerlig eller "on-demand"
Strömförsörjning	2,4-3Vdc 1,5W 2 x AA-batterier (alkaliska eller uppladdningsbara)
Givarfrekvens	108 KHz +/- 3KHz
Ljudnivå (vid 1 m)	ca 40 dBA
Mått (L x B x H)	50 x 62 x 137 mm
Vikt	115 g (exkl. batterier)
Överensstämmelser	Överensstämmer med förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter och efterföljande uppdateringar. 
	Fri från ftalater. I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006. 

Nebuliseringsdata

LightNeb



MAX fyllnadsvolym: 10 ml

Nebuliseringshastighet ⁽¹⁾	≥ 0,30 ml/min
Aerosol Output (AO) ⁽²⁾	0,701 mg
Aerosol Output Rate (AOR) ⁽²⁾	0,172 mg/min
MMAD ⁽²⁾	3,93 µm
Andningsbar fraktion ⁽²⁾	<p>> 5 µm: 38,7 % < 5 µm: 61,3 %</p>
Restvolym ⁽¹⁾	< 0,2 ml

⁽¹⁾ Nebuliseringshastigheten mäts med en 0,9% saltlösning vid 23°C enligt FLAEMs interna procedur. Detta kan variera beroende på det medföljande nebulisatorhuvudet, medicinen och miljöförhållandena. Värdena för nebuliseringshastigheten kan också variera beroende på patientens andningskapacitet.

⁽²⁾ In vitro-karakterisering utförd av TÜV Rheinland Italia S.r.l. i samarbete med Parmas Universitet, i enlighet med standarden EN ISO 27427:2020. Ytterligare information kan erhållas på begäran.

Artikeldata LightNeb och tillbehör

	Artikelbenämning	Atomas art.nr	Tillverkarens art.nr
	LightNeb, portabel nebulisator Munstycke; Soft Touch vuxenmask; Soft Touch barnmask; transport- och förvaringspåse; 2 st alkaliska AA-batterier	24401	MF32E01
	LightNeb årsförbrukningsset Nebulisatorhuvud (medicinbehållare & meshdel); LightNeb munstycke	24411	ACO770P
	Nebulisatorhuvud (medicinbehållare & meshdel)	24821	ACO001C
	Munstycke	24803	ACO563P
	Soft Touch vuxenmask (inkl. elastiskt band)	24804	ACO611P
	Soft Touch barnmask (inkl. elastiskt band)	24805	ACO612P
	Transport- och förvaringspåse	24824	19018

— 50 —
anni di eccellenza italiana



Tillverkare:
FLAEM NUOVA S.p.A
Via Colli Storici, 221-223-225
25015 San Martino della Battaglia (BS)
Italien
Tel: +39 030 9910168
E-post: info@flaemnuova.it
www.flaemnuova.it



SVENSK
DISTRIBUTÖR


 **medicatoma**
PRODUKTER FÖR BÄTTRE VÅRD
Tel: 08 590 754 00
E-post: info@medicatoma.se
www.medicatoma.se

Medicatoma är en division inom
AB Atoma, Vargmötesvägen 2D, 186 30 Vallentuna