



Nima 600 Spark, 600 Spark höger och 600 Spark vänster.

Dynan är trycksårsförebyggande genom:

1. Dyna och överdrag andas.
2. Mjukt material.
3. Dynans form motverkar skjuv.

Beskrivning

Nima 600 Spark är en Tryckfördelande allround dyna för brukare som vill kunna sparka sig fram med ett eller båda benen. Dynan är uppbyggd i två lager. Baslagret består av formgjutet Polyuretanskum. Ovanpå detta finns ett en cm lager mjukt kallsaum. Polyuretanskummet ger stabilitet och kallsaummet ger en jämn och skön sittyta. Dynan finns i tre alternativ, ett där polyuretanskummet är utskuret på höger sida (600 Spark Höger) för att sänka det högra benet, ett med utskärning för vänster (600 Spark Vänster) och ett alternativ där båda benen sänks (600 Spark).

Brukarinformation/bruksanvisning: Dynan kommer färdig i sin förpackning, det finns inga lösa delar att ställa in. Det enda viktiga att tänka på är att placera dynan enligt dynans etikettering (fram, bak, upp, ner) i rullstolen.

Vid behov kan dynan beskäras utan att det påverkar dynan negativt

Destruering. Dyna som skall destrueras sorteras under brännbart.

Teknisk Specifikation/varudeklaration

Dynans Bas

Fasade kanter på dynans undersida för att passa i både hängmattesits och plansits.

Material

Dyna: Slabstocksgjuten polyuretan i dynbasen, Toppskikt av kallsaum. Allt skum har öppna celler som andas.

Överdrag: Polyestertyg som andas mycket väl.

Tvättråd

Dynbasen kan ytdeinficeras med på marknaden förekommande medel men ej tvättas i maskin. Dynbasen lufttorkas

Överdraget tvättas i maskin 60 grader och kan torktumlas.

Dynans vikt

0,7-1,5 kg, beroende på storlek.

Brukarvikt

Max 150 kg upp till 45x45 cm

Max 250 kg över 45x45 cm

Dynan är CE Märkt och brandskyddad

Tillbehörsförteckning

- Inkontinensskyddat överdrag
- Standardöverdrag
- luftgenomsläppligt